

INSTRUKCJA MONTAŻU ORAZ OBSŁUGI

AQUARIUS

WANNA DO HYDROTERAPII OGÓLNOUSTROJOWEJ



0197 — Szanowny Kliencie,

Gratulujemy właściwego wyboru!

Wanna do hydroterapii ogólnoustrojowej AQUARIUS E, jest innowacyjnym rozwiązaniem wykorzystującym zalety hydromasażu całego ciała pacjenta. Zwiększa to intensywność zabiegu poprzez możliwość indywidualnego dopasowania parametrów zabiegu do potrzeb pacjenta. Poprawia również komfort pacjenta podczas terapii. Proponujemy wnikliwą lekturę umieszczonej poniżej instrukcji. Zawiera ona istotne informacje dotyczące: uwag producenta związanych z prawidłową instalacją sprzętu, użytkowania go jak i konserwacji.

Życzymy samych korzyści oraz tylko satysfakcji z eksploatacji naszego produktu.

WSKAZÓWKI OGÓLNE








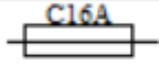

1. WYRÓB POWINIEN BYĆ UŻYWANY ZGODNIE Z PRZEWIDZIANYM ZASTOSOWANIEM. Przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie zaznajomić się z kompletną, instrukcją obsługi. W razie niejasności urządzenie nie może zostać uruchomione!
2. Korzystanie z naszego produktu (obsługiwanie, używanie, serwisowanie) w sposób niezgodny z jego instrukcją jest NIEDOZWOLONE. Może spowodować to powstanie szkód, które będą obciążały jedynie użytkownika. Producent nie ponosi za nie odpowiedzialności.
3. NIE WOLNO korzystać z naszego produktu jeśli jego działanie i parametry są różne z opisem zawartym właśnie w tej instrukcji. Należy bezzwłocznie zgłosić tę okoliczność producentowi lub dostawcy.
4. Jeśli naprawa naszego produktu będzie konieczna to musi być ona wykonana przez fabryczny lub autoryzowany serwis.
5. Każdą naprawę należy zarejestrować w liście napraw (dołączonej do karty gwarancyjnej).
6. Nierespektowanie tych warunków doprowadzi do UTRATY GWARANCJI na nasz produkt.
7. Kiedy użytkownik będzie korzystał z naszego produktu nieadekwatnie z jego przeznaczeniem albo nie będzie stosował się do reguł jego użytkowania (podanych w tejże instrukcji) to warunki gwarancji NIE BĘDĄ brane pod uwagę.

Jeżeli zdarzy się konieczność naprawy urządzenia, należy pamiętać o odłączeniu zasilania sieciowego 230 V AC / 50 Hz !

SPIS TREŚCI

WSKAZÓWKI OGÓLNE.....	2
OZNACZENIA.....	4
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRODUCENTA:.....	5
MIEJSCE I WARUNKI UŻYTKOWANIA I PRZECHOWYWANIA.....	6
PARAMETRY TECHNICZNE WANNY.....	6
PARAMETRY EKSPLOATACYJNE WANNY.....	7
WYMIARY WANNY.....	8
SKŁAD URZĄDZENIA.....	8
OSTRZEŻENIA.....	9
BEZPIECZEŃSTWO.....	10
KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA.....	11
MONTAŻ URZĄDZENIA.....	13
PRZYGOTOWANIE PO STRONIE NABYWCY:.....	13
OBŚŁUGA AQUARIUS E.....	14
PIERWSZE URUCHOMIENIE.....	15
PROGRAMY I OZNACZENIA WYŚWIETLACZA.....	17
REGULACJA TEMPERATURY.....	19
ZAKOŃCZENIE ZABIEGU.....	20
URUCHOMIENIE MASAŻU RĘCZNEGO.....	20
CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA WANNY.....	20
DEZYNFEKCJA.....	21
ODKAMIENIANIE.....	21
KONSERWACJA, NAPRAWA I SERWIS.....	22
WAŻNE INTERWENCJE EKSPLOATACYJNE.....	22
USUWANIE AWARII.....	22
TRANSPORT.....	23
URZĄDZENIE NIE DZIAŁA (OBJAWY, PRZYCZYNY).....	24
BADANIA BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNEGO.....	25
UTYLIZACJA.....	25
WARUNKI ORAZ WYŁĄCZENIA Z GWARANCJI.....	26
WARUNKI GWARANCJI.....	27
PRZYKŁADY WYŁĄCZENIA Z GWARANCJI.....	28
KARTA GWARANCYJNAAQUARIUS E.....	29

OZNACZENIA

	Wytwórca
	Data wytworzenia
	Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi
	Część aplikacyjna typ B
	Zgodnie z przepisami ustawy o zużytym sprzęcie zabronione jest wyrzucanie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy oddać do właściwego punktu zbiórki
	Znak ostrzegawczy. W ten sposób oznaczono czynności, których wykonanie niezgodnie z treścią niniejszej Instrukcji Obsługi
IPX5	Ochrona przed strugą wody laną z każdej strony obudowy.
	Oznaczenie CE na produkcie stanowi deklarację producenta potwierdzającą zgodność produktu z zasadniczymi wymogami odpowiednich przepisów Unii Europejskiej dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Numer umieszczony pod znakiem CE to oznaczenie jednostki certyfikującej- TUV Rheinland.
	Bezpiecznik 16A
ZIMNA WODA	Oznaczenie kurka z wodą zimną
CIEPŁA WODA	Oznaczenie kurka z wodą ciepłą
PRYSZNIC	Oznaczenie prysznica
SPUST WODY	Oznaczenie spustu wody
	
MASAŻ RĘCZNY	Oznaczenie masażu

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRODUCENTA:

Biuro Handlowe KINESIS z siedzibą w Iwoniczu-Zdroju, ul. Penara 23 odpowiada za wiarygodność i bezpieczeństwo działania aparatu, gdy spełnione zostaną następujące wymagania:

1. Instalacji, naprawy oraz przeglądu sprzętu dokonuje autoryzowany serwis. Jedynym autoryzowanym serwisem jest Biuro Handlowe KINESIS ANDRZEJ BORUTA.
Serwis wykonuje przeglądy, naprawy i dostarcza części oraz materiały eksploatacyjne.
2. Środowisko, w którym pracuje sprzęt powinno spełniać opisane standardy bezpieczeństwa.
3. Wanna eksploatowana jest zgodnie z zaleceniami zawartymi w tej instrukcji obsługi.
4. Sprzęt używany jest z oryginalnym wyposażeniem.
5. BH KINESIS ANDRZEJ BORUTA nie ponosi odpowiedzialności za wyniki terapii spowodowane niewłaściwym wykorzystaniem sprzętu.

W PIGUŁCE:

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Wanna do hydroterapii ogólnoustrojowej **AQUARIUS E** przeznaczona jest do wykonywania zabiegów hydroterapii za pomocą strumienia wody – generowanego przez pompę. Obejmuje on całe ciało pacjenta a także może zostać podzielony na określone części ciała.

WSKAZANIA DLA HYDROTERAPII

- Różne postacie chorób reumatycznych.
- Rehabilitacja kończyn górnych w stanach pourazowych,
- Zaburzenia nerwowe
- Zmęczenie układu mięśniowo-nerwowego.
- Niektóre postacie zaburzeń krążenia obwodowego:
 - a) stany po zakrzepach żylnych;
 - b) wczesne okresy zwężającego zapalenia tętnic;
 - c) choroba Raynauda;
 - d) stany po odmrożeniach
 - e) chirurgiczne leczenie żylaków.

PRZECIWSKAZANIA

- Bezwzględny przeciwwskazaniem są:
 - a) stany zapalne i zakrzepowe żył,
 - b) niewydolność krążenia,
 - c) troficzne zmiany skórne,
 - d) ostre stany zapalne stawów i tkanek miękkich.

MIEJSCE I WARUNKI UŻYTKOWANIA I PRZECHOWYWANIA

1. Miejsca wykonywania zabiegów: centra zdrowia, szpitale, centra rehabilitacyjne i gabinety masażu. Wanna musi być podłączona do sieci bieżącej wody.
2. Użycie innego rodzaju wody (np. basenowy zamknięty obieg wody) wymaga specjalnego projektu i musi być koniecznie skonsultowana z producentem.
3. Wanna nie może być używana w pomieszczeniu ZAGROŻONYM WYBUCHEM.
4. Przed instalacją urządzenie proszę zapoznać się ze schematem montażu i upewnić się, że spełnione zostały wszelkie wytyczne.
5. Wyrób nie może być stosowany w środowisku bogatym w tlen.
6. Bezpieczne podłączenie do instalacji elektrycznej, funkcjonalność i odpowiednie uszczelnienie wanny jest sprawdzane przed przekazaniem urządzenia. Jeżeli pomimo tego wystąpią jakiegokolwiek inne problemy prosimy o kontakt z serwisem.
7. Wanny powinny być przechowywane w suchym pomieszczeniu, gdzie nie ma dużych wahań temperatur. Wannę należy przechowywać w temperaturze od 10°C do 40 °C w pozycji poziomej.
8. Standardowy poziom wilgotności w jakim wyrób jest przechowywany, użytkowany lub transportowany to nie więcej niż 80%.

PARAMETRY TECHNICZNE WANNY

Wyrób AQUARIUS E jest wyrobem medycznym klasy IIa wg reguły 9.

Urządzenie spełnia wymagania zasadnicze Dyrektywy Medycznej 93/42/EWG oraz następujących norm zharmonizowanych z tą Dyrektywą:

EN ISO 13485:2016

EN 60601-1:2006+AC:2010, A11:2011, A1:2013, A12:2014

EN 60601-1-2:2015

EN 60601-1-6:2010

EN 62366:2008

EN 62304:2006/A1:2015

EN ISO 15223-1:2016

EN 1041:2008+A1:2013

EN-ISO 14971:2019

EN ISO 10993-1:2009 /AC:2010

EN 50419:2006

EN 62321:2009

EN 60529:1991, EN 60529:1991/A1:2000, EN 60529:1991/A2:2013

EN 62366-1:2015

Klasa bezpieczeństwa elektrycznego: I

Typ części aplikacyjnej- B.

Wanna jest urządzeniem montowanym na stałe w miejscu użytkowania.

PARAMETRY EKSPLOATACYJNE WANNY

POJEMNOŚĆ ROBOCZA NIECKI	
MAKSYMALNA (do przelewu)	MINIMALNA (załane wszystkie dysze)
280 [l]	250 [l]
WYDAJNOŚĆ POMPY WODY	
360[l/min]	
ZASILANIE	
230 [VAC/Hz]	
MOC WEJŚCIOWA URZĄDZENIA	
2000 VA	
STOPIEŃ OCHRONY PRZED WNIKANIEM CIAŁ STAŁYCH I CIECZY	
IP X5	
ZGODNOŚĆ WYKONANIA	
EN ISO 13485:2016, EN 60601-1:2006+AC:2010, A11:2011, A1:2013, A12:2014 EN 60601-1-2:2015, EN 60601-1-6:2010, EN 62366:2008 EN 62304:2006/A1:2015, EN ISO 15223-1:2016, EN 1041:2008+A1:2013 EN-ISO 14971:2019, EN ISO 10993-1:2009 /AC:2010, EN 50419:2006 EN 62321:2009, EN 62366-1:2015 EN 60529:1991, EN 60529:1991/A1:2000, EN 60529:1991/A2:2013	
PRODUCENT	
BIURO HANDLOWE KINESIS ul. Penara 23, 38-440 Iwonicz Zdrój	

Dostępne modele wanien:


Wanna **AQUARIUS E/M** – wanna tylko z węzłem ręcznym (bez dysz)

Wanna **AQUARIUS E/A**- wanna tylko z dyszami (bez węża ręcznego)

Wanna **AQUARIUS E**- wanna z dyszami i węzłem ręcznym

WYMIARY WANNY

DŁUGOŚĆ	2050[mm]
SZEROKOŚĆ	830[mm]
WYSOKOŚĆ niecki	575[mm]
WYSOKOŚĆ całkowita	850 [mm]
MASA (bez wody)	90[kg]

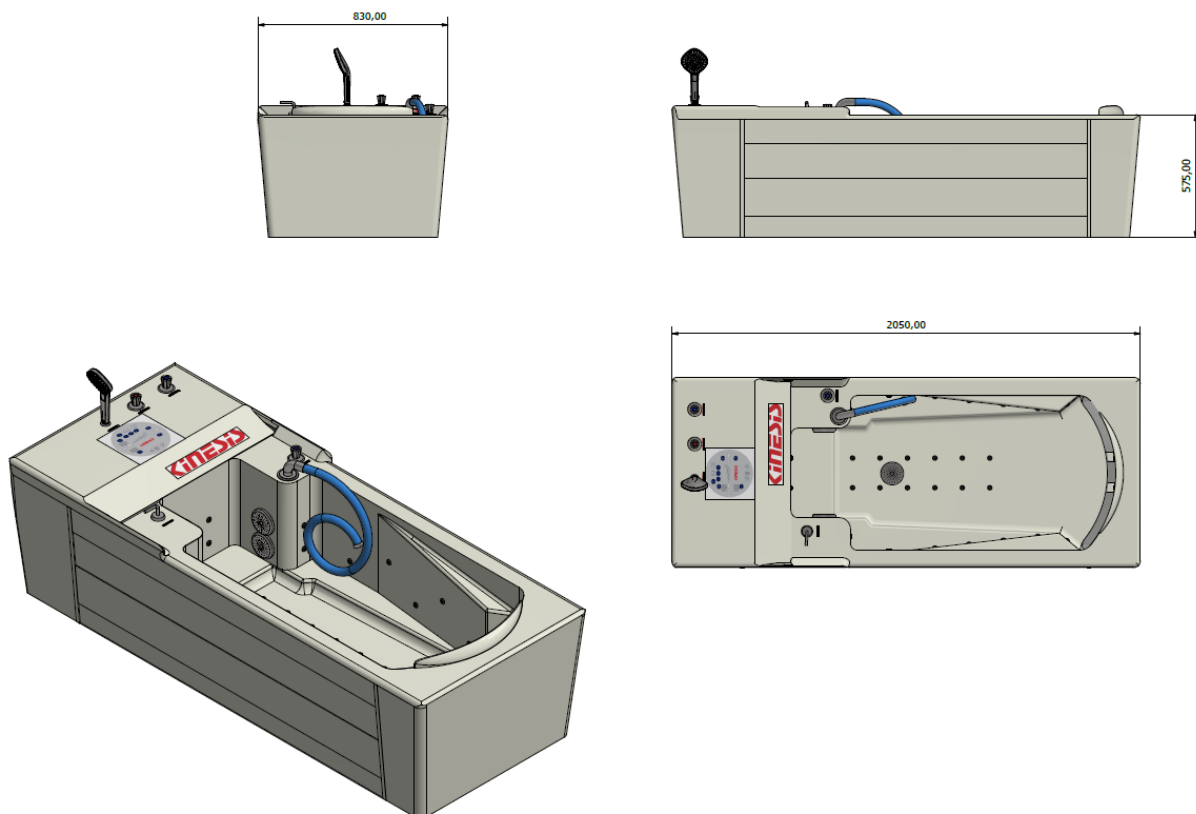

SKŁAD URZĄDZENIA

KOMPLETACJA		
1	Wanna AQUARIUS E	1 szt.
2	Stopień do wanny	1 szt.
3	Wąż zasilający 3/4" o długości 1000 mm	2 szt.
4	Uszczelki 3/4"	4 szt.
5	Natrysk z wężem	1 kpl .
6	Przewód zasilający 220 V, długość 1500 mm	1 szt.
7	Wąż odpływu o śr50mm	1 szt.

Niecka wanny wypełniona wodą stanowi część aplikacyjną wyrobu typu B.

OSTRZEŻENIA



Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, urządzenie musi być przyłączone do sieci zasilającej z uziemieniem ochronnym.



Do przeprowadzenia zabiegu masażu ogólnoustrojowego, wymagane jest zlecenie lekarza prowadzącego pacjenta (oceniającego jego stan pod kątem przydatności zabiegu).

MASAŻ OGÓLNOUSTROJOWY: wywołuje przekrwienie, zmniejsza obrzęki i zastoje krwi żyłnej – jednocześnie – działając przeciwbólowo i rozluźniająco na mięśnie.



Wyrób powinien być obsługiwany przez personel, który zapoznał się z treścią niniejszej instrukcji obsługi.



Używanie, obsługiwanie oraz serwisowanie wyrobu w sposób niezgodny z niniejszą instrukcją jest niedozwolone i może doprowadzić do powstania szkód, które obciążają użytkownika, a za które wytwórca nie ponosi odpowiedzialności.



Jeżeli działanie i parametry wyrobu są niezgodne z opisem zawartym w niniejszej instrukcji obsługi, to nie wolno eksploatować wyrobu. Należy niezwłocznie zgłosić ten fakt wytwórcy lub dostawcy.



Każda naprawa wyrobu musi być wykonana przez fabryczny lub autoryzowany serwis i zarejestrowana w liście napraw dołączonej do karty gwarancyjnej. Nieprzestrzeganie tego wymogu spowoduje utratę gwarancji na wyrób.



Warunki gwarancji nie będą respektowane, jeśli użytkownik będzie wykorzystywał wyrób niezgodnie z przeznaczeniem lub nie będzie przestrzegał zasad użytkowania podanych w niniejszej Instrukcji Obsługi.



Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek naprawy należy odłączyć zasilanie sieciowe 230 V AC / 50 Hz !



Aby uniknąć poparzenia pacjenta gorącą wodą, należy przed wejściem pacjenta do wody, sprawdzić na wyświetlaczu temperaturę .



Aby uniknąć upadku pacjenta, w wyniku poślizgnięcia się na mokrej powierzchni wanny, należy asekurować go podczas wchodzenia i wychodzenia z wanny.



Mechaniczne uszkodzenia głowic zaworów napełniania, wynikające z niewłaściwej ich obsługi (przekręcanie z nadmierną siłą, zbyt wysoka temperatura wody przy napełnianiu, woda z mechanicznymi zanieczyszczeniami - żwir, piasek, zaprawa,) oraz uszczelki jako materiał eksploatacyjny nie podlegają warunkom gwarancji producenta.



Urządzenie AQUANESIS producenta zostało całkowicie opróżnione z wody. Po ponownym napełnieniu urządzenia wodą użytkownik bierze na siebie odpowiedzialność, jeżeli dojdzie do uszkodzeń w urządzeniu w wyniku zamarznięcia wody.

BEZPIECZEŃSTWO

1. Wanna AQUARIUS E powinna być instalowana miejscach, w których spełnione zostały wymagania techniczne przedstawione w dokumencie „Schemat montażowy AQUARIUS E”.
2. Nie należy chwytać, gwałtownie pociągać za rury lub inne elementy wyposażenia doprowadzające wodę do urządzenia, gdyż grozi to ich uszkodzeniem oraz przeciekami wody i zalaniem pomieszczenia, w którym znajduje się urządzenie.
3. Nie można we własnym zakresie dokonywać przeróbek lub napraw układów sterowania.
4. Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony w specjalistycznym zakładzie naprawczym albo przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
5. Wszystkich napraw dotyczących układu zasilania należy dokonywać w specjalistycznym zakładzie naprawczym.
6. Wanna AQUARIUS E jest urządzeniem elektrycznym, które powinno być przyłączone do instalacji elektrycznej przez osobę z odpowiednimi do tego uprawnieniami
7. Samodzielne wykonywanie napraw bądź zmian w urządzeniu, bez wcześniejszego uzgodnienia z producentem może skutkować utratą gwarancji.
8. Nie wolno samodzielnie demontować elementów przewodów wodnych z wyjątkiem przeprowadzania dopuszczalnych w treści instrukcji zabiegów konserwujących. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji
9. Urządzenie powinno być podłączane do gniazda z uziemieniem. Odłączenie wtyczki urządzenia od gniazda zasilającego jest środkiem izolującym od sieci zasilającej
10. Urządzenie może generować pole elektromagnetyczne, które może oddziaływać na inne urządzenia. W celu ograniczenia emisji tego pola należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi.
11. Urządzenie AQUARIUS E powinno być traktowane jak wyrób wielkogabarytowy i utylizowany w sposób niezagrażający środowisku.

Należy przeczytać dokładnie całą instrukcję przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia. Proszę zachować instrukcję, aby móc z niej korzystać w przyszłości.

KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA

Deklaracja dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej zgodnej z normą EN ISO 60601-1-2 jest dostępna na żądanie w siedzibie producenta.

Urządzenia do masażu wirowego/ podwodnego z grupy Hydroterapia zostały sprawdzone pod kątem zgodności z normą EN ISO 60601-1-2. Badanie wykonane przez Laboratorium Urządzeń Elektronicznych Centrum Technologii Radiowych i Kompatybilności Elektromagnetycznej z Instytutu Logistyki i Magazynowania. Urządzenia zostały sklasyfikowane wg. normy EN ISO 60601-1-2 jako Grupa 1, Klasa A

Urządzenia są przeznaczone do użytku wyłącznie w profesjonalnych placówkach opieki zdrowotnej takich jak gabinety rehabilitacyjne, sanatoria.

Urządzenia są przeznaczone do użytku w środowisku elektromagnetycznym opisanym poniżej. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, aby środowisko w którym wykorzystywane jest urządzenie spełniało poniższe wymagania.

OPIS:	UWAGI:
Emisja zaburzeń promieniowanych zgodnie z normą PN-EN 55011:2012	Zakres 30-1000MHz
Emisja zaburzeń przewodzonych – napięcie zaburzeń zgodnie z normą PN-EN 55011:2012	Zakres 0,15–30MHz
Odporność na wyładowania elektrostatyczne zgodnie z normą PN-EN61000-4-2:2011	Powietrzne- 15kV,+15kV Kontaktowe- 8kV,+8kV
Odporność na pola elektromagnetyczne o częstotliwościach radiowych zgodnie z normą PN-EN61000-4-3:2007+A1;2008+A2:2011	Zakres 80–2700MHz
Odporność na szybkie stany przejściowe (BURST) zgodnie z PN-EN 61000-4-4:2013-05	0,5kV, 1kV, 2kV 100Hz
Odporność na udary (SURGE) zgodnie z PN-EN61000-4-5:2014-10	
Odporność na przewodzone zaburzenia indukowane przez pole o częstotliwościach radiowych zgodnie z normą PN-EN61000-4-6:2014-04	0,15–80MHz 3V r.m.s.
Odporność na zapady, krótkie przerwy i zmiany napięcia zgodnie z normą PN-EN61000-4-11:2007	

UWAGA !



Należy unikać użytkowania tego urządzenia w bezpośredniej bliskości innych urządzeń lub ustawiania urządzenia na lub pod innym urządzeniem ponieważ

może to spowodować jego nieprawidłową pracę. Jeżeli takie ustawienie urządzeń jest niezbędne, należy obserwować oba urządzenia czy pracują prawidłowo.

UWAGA !!!



Użycie akcesoriów lub kabli innych niż te wyspecyfikowane w niniejszej instrukcji lub dostarczone z wyrobem może prowadzić do zwiększenia promieniowania elektromagnetycznego generowanego przez urządzenie lub do obniżenia odporności elektromagnetycznej urządzenia, a w efekcie do nieprawidłowej pracy urządzenia.

UWAGA !!!



Przenośne urządzenia wykorzystujące komunikację bezprzewodową (włącznie z antenami zewnętrznymi lub kablami antenowymi) powinny być używane w odległości nie mniejszej niż 30 cm od każdej części urządzenia, włączając w to kable wyspecyfikowane przez producenta. W innym przypadku może dojść do obniżenia wydajności urządzenia.

MONTAŻ URZĄDZENIA

Montażu urządzenia może dokonać tylko autoryzowany serwis BH KINESIS ANDRZEJ BORUTA.

BH KINESIS ANDRZEJ BORUTA dostarcza wanny w formie poszczególnych elementów gotowych do montażu (patrz skład urządzenia).

Wprowadzając wannę do pomieszczenia, w którym ma być zainstalowana, należy pamiętać o następujących czynnikach:


1. wszystkie drogi dostępu muszą być wolne i puste
2. podłoga w miejscu instalacji powinna być równa oraz musi posiadać podłączenia hydrauliczno-elektryczne według dokumentacji ujętej w schemacie montażowym MR

PRZYGOTOWANIE PO STRONIE NABYWCY:


1. Zawory zamykające do zimnej i ciepłej wody.
2. Przygotowanie odpływu (kratka ściekowa) w pobliżu przyłączy wody.
3. Przygotowanie instalacji elektrycznej.





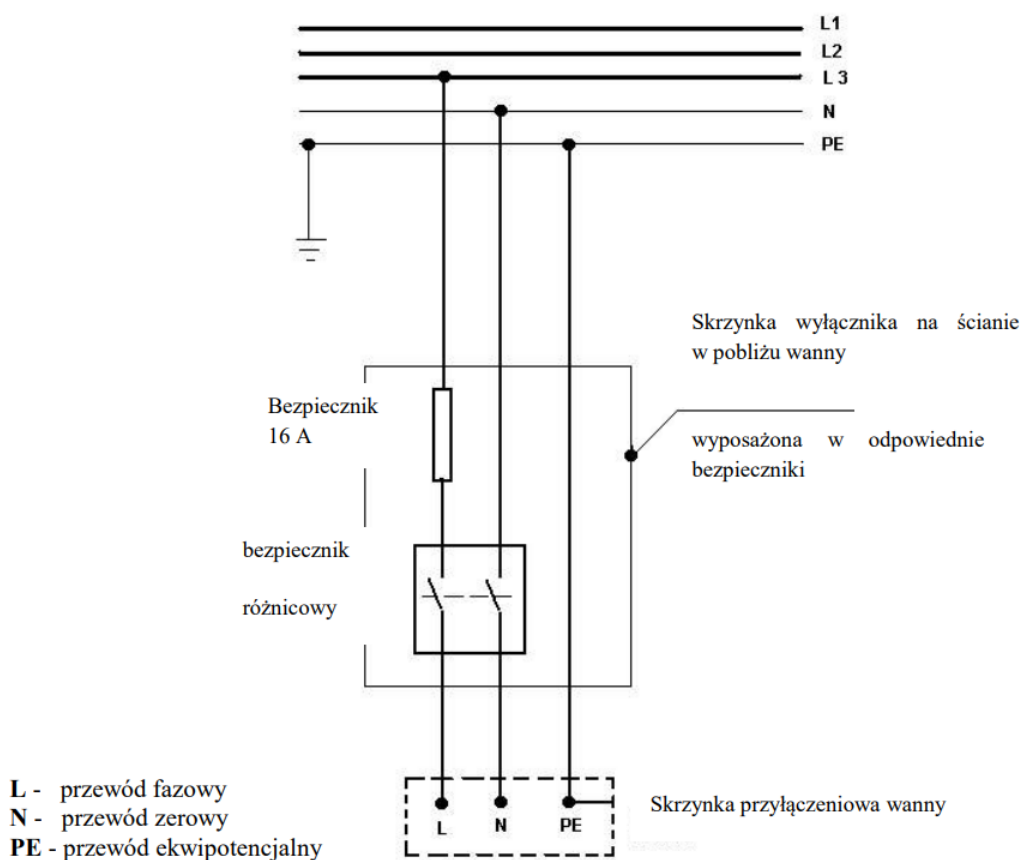



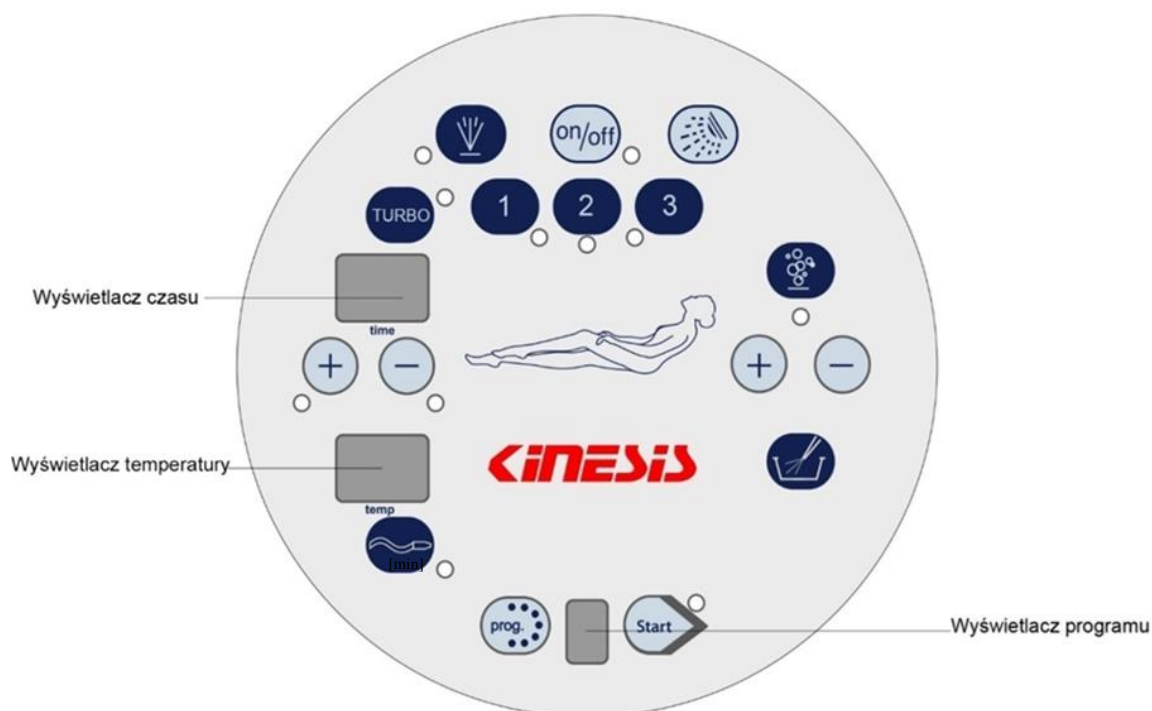




Maksymalne, dopuszczalne ciśnienie w pobliżu przyłączy wody wynosi 6 bar.

Schemat podłączenia wanny do sieci.



OBSŁUGA AQUARIUS E



- [°C]
-  Włącz / Wyłącz system
 -  Jedno naciśnięcie uruchamia system wodny (pompe)
Kolejne naciśnięcie wyłącza pompę
 -  Funkcja wyłączona
 -  Włącz / Wyłącz oświetlenie (opcja)
 -  Włącz / Wyłącz strefę nr. 1 (nogi)
 -  Włącz / Wyłącz strefę nr. 2 (biodra / uda)
 -  Włącz / Wyłącz strefę nr. 3 (plecy)
 -  Jedno naciśnięcie uruchamia system powietrzny / dmuchawę
Kolejne naciśnięcie wyłącza dmuchawę
 -  Zwiększenie / zmniejszenie mocy dmuchawy (opcja)
 -  Włączenie napełniania
 -  Wybór programu
 -  Uruchomienie wybranego programu
 -  Uruchomienie masażu ręcznego

Bezwzględnie wymagane jest, aby osoby obsługujące wannę AQUARIUS E, przed rozpoczęciem pracy zapoznali się dokładnie z całą instrukcją obsługi urządzenia oraz kierowali się zaleceniami lekarzy. Nie wymagane są żadne specjalne umiejętności, doświadczenia bądź wiedza, w celu użytkowania urządzenia AQUARIUS E.

Dane techniczne wyświetlacza:

Temperatura podawana jest w °C, zakres wyświetlany 20°C - 50°C, dokładność 1°C

Czas podawany jest w minutach, zakres wyświetlany 1-59, dokładność 1 min

Pacjent nie może być operatorem urządzenia.

W trakcie wchodzenia pacjenta do wanny należy go asekurować, w celu zapewnienia bezpieczeństwa.





Aby uniknąć upadku pacjenta, w wyniku poślizgnięcia się na mokrej powierzchni wanny, należy asekurować go podczas wchodzenia i wychodzenia z wanny.



Mechaniczne uszkodzenia głowic zaworów napełniania, wynikające z niewłaściwej ich obsługi (przekręcanie z nadmierną siłą, zbyt wysoka temperatura wody przy napełnianiu, woda z mechanicznymi zanieczyszczeniami - żwir, piasek, zaprawa,) oraz uszczelki jako materiał eksploatacyjny nie podlegają warunkom gwarancji producenta.

PIERWSZE URUCHOMIENIE



Przed pierwszym użyciem wannę należy opłukać wodą. System uruchamiamy





przyciskiem . Po naciśnięciu przycisku  następuje automatyczne napełnienie wanny do poziomu górnego czujnika wody. Dioda przy przycisku on/off świeci, wyświetlana jest aktualna temperatura wody na wyświetlaczu temperatury. Regulacja temp. następuje poprzez pokrętkła na wannie.

Przed wprowadzeniem pacjenta do wanny należy sprawdzić temperaturę wody. Zalecana temperatura wody 37-38 °C







Wprowadzenie pacjenta do wanny zbyt wysoką temperaturą wody może grozić poparzeniem.


Przyciskiem  uruchamiamy pompę (system masażu wodnego) (dioda przy tym przycisku świeci), Ponowne naciśnięcie przycisku  wyłącza pompę.


System powietrzny (dmuchawa) uruchamiany jest po naciśnięciu przycisku . System masażu podzielony jest na 3 strefy. Wybór strefy masażu dokonywany jest poprzez naciśnięcie przycisków   . Równocześnie mogą działać wszystkie strefy lub w różnych konfiguracjach ale nie mam możliwości, że wszystkie strefy będą wyłączone jednocześnie. Dioda przy każdym z przycisków informuje, która ze


stref jest aktualnie aktywna. UWAGA: przy uruchamianiu kolejnych stref konieczne jest odczekanie kilku sekund pomiędzy naciśnięciem kolejnych przycisków (czas reakcji zaworów). Wybór strefy masażu powietrznego odbywa się analogicznie do masażu wodnego. Jeśli uruchomiony jest jednocześnie system wodny i powietrzny, to regulacja stref działa na obu systemach jednocześnie.




Czas zabiegu ustawiamy za pomocą przycisków   znajdujących się poniżej wyświetlacza czasu. Zmniejszenie / zwiększenie czasu zabiegu możliwe jest w zakresie 1-60 minut i regulowane co 1 minutę. System automatycznie ustawia czas zabiegu na 15 minut, możliwe jest jego skrócenie w trakcie zabiegu poprzez przyciski  . System zapamiętuje ostatnio zadany czas zabiegu i ten czas ustawia się automatycznie po ponownym uruchomieniu systemu. System powraca do ustawienia fabrycznego po całkowitym odłączeniu zasilania.



Wyświetlacz temperatury wyświetla aktualną temperaturę wody, nie ma możliwości regulowania temperatury z poziomu sterownika.

OPCJA: po podłączeniu do sterownika zaworu możliwe jest uruchomienie masażu ręcznego za pomocą węża poprzez naciśnięcie przycisku , ponowne naciśnięcie zamyka wtedy dopływ wody poprzez wąż (wyłączenie masażu ręcznego). Sterowanie takie jest możliwe przy odkręconym kurka "masaż wodny".


Przepłukiwanie i osuszanie dysz uruchamia się automatycznie (opcja) po każdym spuszczeniu wody z wanny / zbiornika lub może być uruchamiana ręcznie (standard). Uruchomienie dezynfekcji poprzedzone jest wyświetleniem symbolu „d” na wyświetlaczu programów. Dioda przy przycisku  w tym czasie mruga.

Przyciskiem  (przytrzymanie 3 sek) można uruchomić powtórne płukanie. Podczas osuszania (etap dezynfekcji) mruga dioda przy przycisku powietrza.

Powtórne osuszanie można uruchomić poprzez przytrzymanie przycisku  przez 3 sekundy. Podczas płukania mruga dioda przy przycisku , podczas osuszania mruga dioda przy przycisku .

Wyboru jednego z 6 programów dokonujemy za pomocą przycisku , numery programów wyświetlane są na wyświetlaczu, wybór i uruchomienie programu zatwierdzamy przyciskiem .

PROGRAMY I OZNACZENIA WYŚWIETLACZA

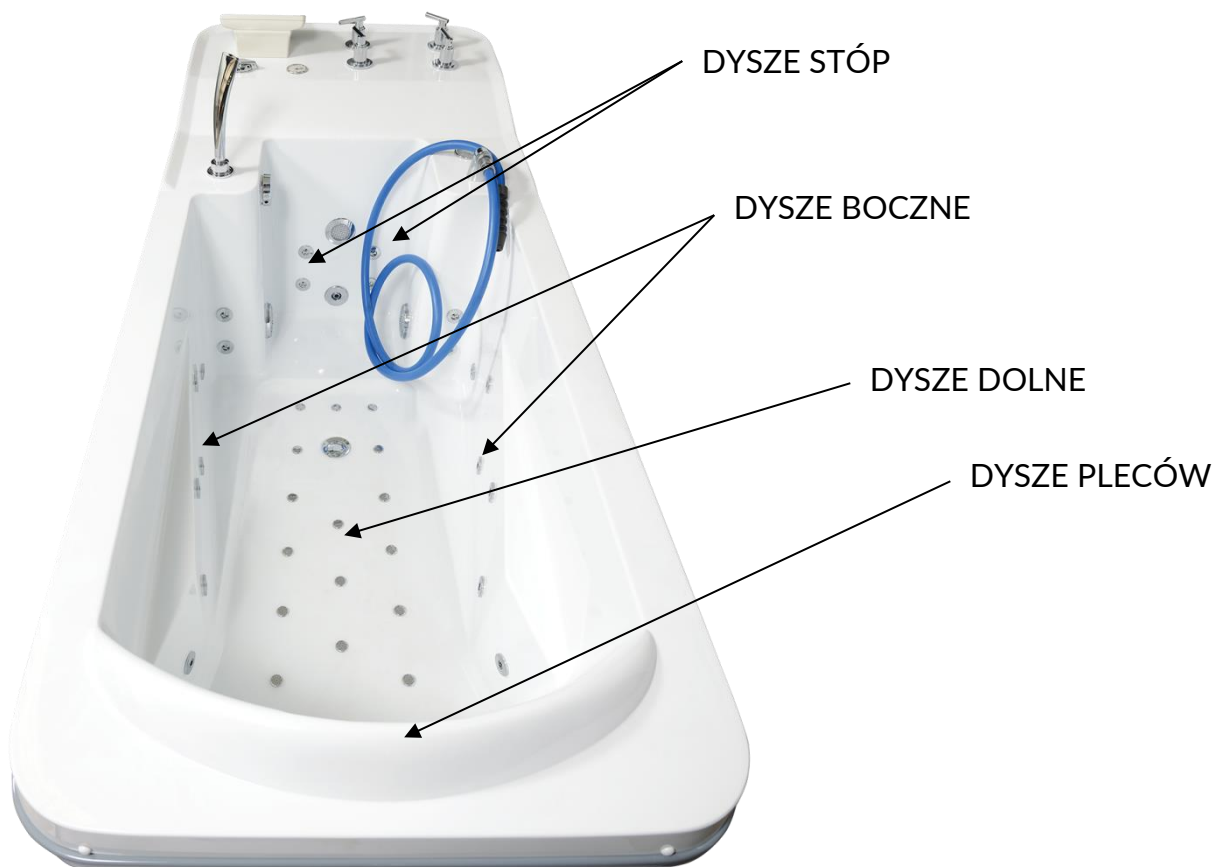

Program 1- czas trwania 5 min

- 5 minuta- dysze pleców, boczne i stóp- masaż wodny
- 4 minuta- dysze pleców, boczne i stóp- masaż powietrzny
- 3 minuta- dysze boczne, pleców oraz stóp- masaż wodny i powietrzny
- 2 minuta- wszystkie dysze- masaż wodny i powietrzny
- 1 minuta- dysze boczne, stóp i pleców- masaż wodny

Program 2- czas trwania 10 min

- 10 minuta- dysze boczne, pleców i stóp- masaż wodny
- 9 minuta- wszystkie dysze- masaż powietrzny
- 8 minuta- wszystkie dysze- masaż wodny i powietrzny
- 7 minuta - dysze boczne, pleców i stóp- masaż powietrzny
- 6 minuta - wszystkie dysze- masaż powietrzny

5 minuta - wszystkie dysze- masaż wodny i powietrzny

4 minuta - wszystkie dysze- masaż powietrzny

3 minuta - dysze boczne, stóp i pleców- masaż wodny

2 minuta - wszystkie dysze- masaż wodny i powietrzny

1 minuta - dysze boczne, stóp i pleców- masaż wodny

Program 3- czas trwania 5 minut

5 minuta- dysze boczne, pleców i stóp- masaż powietrzny

4 minuta- dysze stóp, boczne i dolne- masaż wodny i powietrzny, dysze pleców- masaż powietrzny

3 minuta- dysze boczne i dolne- masaż powietrzny i wodny, dysze pleców i stóp- masaż powietrzny

2 minuty- dysze stóp i dolne- masaż powietrzny

1 minuta- wszystkie dysze- masaż wodny

Program 4- czas trwania 10 minut

10 minuta- dysze boczne, pleców i stóp- masaż powietrzny, dysze dolne wyłączone

9 minuta- dysze stóp, boczne, dolne- masaż wodny i powietrzny, dysze pleców- masaż powietrzny

8 minuta- dysze stóp, boczne, dolne- masaż wodny, dysze pleców- masaż powietrzny

7 minuta- wszystkie dysze- masaż wodny i powietrzny

6 minuta- dysze dolne, boczne i pleców- masaż wodny

5 minuta- dysze stóp i pleców- masaż powietrzny, dysze boczne i dolne- masaż wodny i powietrzny

4 minuta- dysze boczne- masaż wodny, dolne i stóp- masaż wodny i powietrzny,

3 minuta- dysze boczne, dolne i stóp- masaż powietrzny, dysze pleców- masaż powietrzny

2 minuta- dysze pleców- masaż powietrzny, dysze boczne, dolne, stóp- masaż powietrzny i wodny

1 minuta – dysze pleców i stóp- masaż wodny

Program 5- czas trwania 5 minut

5 minuta- wszystkie dysze- masaż powietrzny

4 minuta- dysze stóp- masaż wodny i powietrzny, pozostałe dysze- masaż powietrzny

3 minuta- wszystkie dysze- masaż wodny

2 minuta- dysze stóp, boczne i dolne- masaż wodny i powietrzny, dysze pleców wyłączone

1 minuta- dysze stóp, boczne i dolne- masaż wodny, dysze pleców nie działają

Program 6- czas trwania 10 minut

10 minuta- dysze boczne, pleców i stóp- masaż powietrzny

9 minuta- dysze pleców i stóp- masaż wodny i powietrzny, dysze boczne i dolne- masaż powietrzny

8 minuta- dysze boczne- masaż powietrzny, dysze dolne pleców- masaż wodny i powietrzny

7 minuta- dysze stóp- masaż wodny i powietrzny, dysze boczne dolne- masaż wodny i powietrzny

6 minuta- dysze pleców- masaż wodny, reszta dysz wyłączona




5 minuta- dysze boczne, dolne i stóp- masaż powietrzny, dysze pleców- masaż wodny i powietrzny

4 minuta- dysze stóp- masaż wodny, dysze boczne i dolne- masaż powietrzny

3 minuta- dysze stóp- masaż powietrzny i wodny, pozostałe dysze- masaż powietrzny

2 minuta- dysze pleców- masaż powietrzny i wodny, pozostałe dysze- masaż powietrzny

1 minuta- dysze pleców i stóp- masaż wodny, pozostałe dysze wyłączone

REGULACJA TEMPERATURY	 	<p>Obsługujący napełnia wannę odkręcając zawory z ciepłą i zimną wodą. Zawory ciepłej i zimnej wody ustawiamy w ten sposób, aby termometr wskazywał wymaganą temperaturę wody dla pacjenta /37°-38°C/.</p> <p>Aktualna temperatura wody wyświetlana jest na wyświetlaczu panelu dotykowego - należy ją kontrolować</p> <p> Wprowadzenie pacjenta do wanny zbyt wysoką temperaturą wody może grozić poparzeniem.</p>
------------------------------	---	--

ZAKOŃCZENIE ZABIEGU



SPUST WODY



PRYSZNIC

Po zakończeniu zabiegu (pompa wyłączona), kiedy pacjent opuści wannę, należy przekręcić spust wody, w celu opróżnienia niecki z wody.

Po opuszczeniu wanny przez pacjenta i spuszczeniu z niej wody, należy nieckę wanny umyć środkiem dezynfekującym. Do tego celu polecamy specjalnie stworzony dla wanien detergent SEPTAL 100. Po umyciu wanny spłukać ją za pomocą prysznica. Pysznic uruchomić pokrętkiem PRYSZNIC.

Wanna jest gotowa do ponownego użycia.

URUCHOMIENIE MASAŻU RĘCZNEGO

W celu uruchomienia węża służącego do masażu ręcznego

należy wcisnąć przycisk . Siła strumienia wody regulowana jest kurkiem



Należy pamiętać, że po wciśnięciu przycisku masażu ręcznego, nie należy dopuszczać do sytuacji z której kurek będzie całkowicie zakręcony przez dłuższy czas.

CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA WANNY



Wanny wykonane są z kompozytu szklanego wykończonego tworzywem GFK. Odporne są na działania słabych kwasów oraz zasad. Można używać wszystkich środków myjąco-dezynfekcyjnych posiadające znak CE nieagresywnych dla powłok galwanicznych chromowanych.

Wanna musi być czyszczona po każdym użyciu poprzez uruchomienie programu dezynfekcji. Dodatkowo, do czyszczenia niecki wanny polecamy specjalnie stworzony dla wanien produkt SEPTAL 100.

Odkamienianie powinno być przeprowadzane w zależności od stopnia twardości wody. W tym celu polecamy detergent MAX ECO SANIT, usuwający osad kamienia kotłowego, tłuszcz i brud.

Należy pamiętać, że jest to praca na urządzeniu technicznym, które wymaga szczególnej ostrożności. Obsługujący wanny jest odpowiedzialny za wybór środka dezynfekującego oraz środka do czyszczenia instalacji hydraulicznej wanien wyposażonych w hydromasaż i dlatego należy przestrzegać instrukcji producenta tego środka.

W przypadku nie przestrzegania powyższych reguł, jakakolwiek reklamacja zostanie odrzucona!

DEZYNFEKCJA	<p>Płyn przeznaczony do dezynfekcji (SEPTAL 100) przygotować zgodnie z zaleceniami producenta płynu. Roztwór przelać do spryskiwacza i cienką warstwą nanieść płyn na wewnętrzną część wanny. Przetrzeć gąbką/ścierką.</p> <p>Wypłukać wannę za pomocą prysznica.</p> <p>Wytrzeć nieckę wanny do sucha miękką szmatką.</p> <p> Należy po każdym wykonanym zabiegu przeprowadzić dezynfekcję wanny.</p>
ODKAMIENIANIE	<p>Napełnić wannę tak by wszystkie dysze zostały zalane wodą.</p> <p>Włąć środek MAX ECO SANIT zgodnie z instrukcją na opakowaniu preparatu.</p> <p>Uruchomić zabieg.</p> <p>Proces odkamieniania powinien trwać minimum 15 min</p> <p>Po upływie tego czasu należy opróżnić wannę.</p> <p>Wypłukać wannę za pomocą prysznica.</p> <p>Wytrzeć nieckę wanny do sucha miękką szmatką.</p> <p> Częstotliwość odkamieniania zależy od stopnia twardości wody i jest ustalana przez użytkownika w zależności od potrzeby.</p> <p>Duża ilość narosłych osadów na dyszach i w pompie urządzenia może doprowadzić do uszkodzenia wanny. Pamięć o przeprowadzeniu odkamieniania leży w gestii obsługi urządzenia.</p>



Uszkodzenia wynikające z zastosowania niewłaściwego środka do dezynfekcji lub pielęgnacji niecki nie podlegają warunkom gwarancji producenta.



Zastosowanie do dezynfekcji lub mycia środków pianących się i niedokładne ich wypłukanie, może spowodować powstanie dużej ilości piany po włączeniu masażu wirowego.



Nie można przeprowadzać żadnych napraw serwisowych, czyszczenia lub prac konserwacyjnych, kiedy pacjent korzysta z urządzenia. Naprawa musi być przeprowadzona przez specjalistę lub osobę do tego uprawnioną.

KONSERWACJA, NAPRAWA I SERWIS

Wytwórca udostępni na życzenie schematy obwodów, wykazy części, opisy, instrukcje kalibracji lub inne informacje pomocne personelowi serwisowemu przy naprawach tych części urządzenia me, które są dopuszczone przez wytwórcę do naprawiania przez personel serwisowy.

W celu zachowania gwarancji, należy co roku należy przeprowadzać przegląd serwisowy urządzenia. Podczas takiego przeglądu sprawdzane jest prawidłowe funkcjonowanie zaworów, pompy, dmuchawy oraz szczelność i prawidłowe działanie całego urządzenia.

Proponujemy państwu kontakt z naszą firmą, a co za tym idzie kompleksowy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Ponadto proponujemy wykonanie kompleksowych badań bezpieczeństwa. Oferta zawiera następujące podstawowe testy, jakie będą przeprowadzone w trakcie corocznego serwisu:

- oględziny zewnętrzne
- elektryczne badania bezpieczeństwa przeprowadzone zgodnie z normą EN 60601
- sprawdzenie funkcjonalności

Sitko zasysające musi być sprawdzane i czyszczone przez obsługę po każdym zabiegu. Nie przestrzeganie tego spowoduje zatkanie sitka, ograniczenie ciśnienia a w konsekwencji niewłaściwą pracę urządzenia. Może to poważnie uszkodzić różne części pompy. W takim przypadku reklamacja nie będzie uwzględniona.

WAŻNE INTERWENCJE EKSPLOATACYJNE

WYKONYWANA CZYNNOŚĆ	POWTARZALNOŚĆ
Czyszczenie i dezynfekcja niecki	Każdorazowo po zabiegu
Odkamienianie układu wodnego	Raz na dwa tygodnie
Badanie bezpieczeństwa elektrycznego	Raz do roku i każdorazowo po awarii/naprawie

USUWANIE AWARII

Wszelkie nieprawidłowości występujące w pracy urządzenia należy zgłaszać niezwłocznie do punktu serwisowego. Użytkownik powinien ograniczyć swoje prace do utrzymania należytego stanu urządzenia. Jakakolwiek naprawa urządzenia przez osoby nieupoważnione przez producenta powodują utratę gwarancji. Jedynym odstępstwem od tej reguły są usterki eksploatacyjne związane z usuwaniem nieszczelności słuchawki prysznicowej.

Wezwanie serwisanta do usterki związanej z nieszczelnością spowodowana uszkodzeniem uszczelki słuchawki prysznicowej będzie owocowało obciążeniem wzywającego serwis, opłatą za dojazd i czas pracy serwisanta.

TRANSPORT

Zawartość całej przesyłki opisana jest w dokumentach wysyłkowych. Dostawa musi być sprawdzona co do kompletności wszystkich części i możliwych uszkodzeń związanych z transportem natychmiast po przywiezieniu. Jeśli będzie to konieczne odbierający musi wystosować listę zarejestrowanych usterek w obecności przywoźącego. W przeciwnym razie bezpłatny serwis w ramach usterek ze strony producenta nie jest możliwy.

Wanna dostarczana jest w formie elementów gotowych do montażu.

Przyłączenie węży wodnych w miejscu instalacji, podłączenie do instalacji elektrycznej oraz podłączenie do instalacji ściekowej jest włączone w dostawę pod warunkiem przygotowania przyłączy zgodnie z wytycznymi.

Wanny powinny być przechowywane w suchym pomieszczeniu, gdzie nie ma dużych wahań temperatur. Wannę należy przechowywać w temperaturze powyżej 10°C w pozycji poziomej.



W PRZYPADKU PRZECHOWYWANIA WANNY W TEMPERATURZE PONIŻEJ 10° C POMPĘ NALEŻY BEZWZGLĘDNIEM ZALAĆ PŁYNEM ZABEZPIECZAJĄCYM PRZED ZAMARZNIĘCIEM.

Temperatura	Poddanie wyrobu działaniom zbyt wysokich temperatur	Standardowy zakres temperatur w jakich wyrób jest transportowany i przechowywany to temperatura od +10° C do +40°C. Podsumowanie: Brak szczególnych wymagań w zakresie temperatury transportu.
Wilgotność	Przebywanie wyrobu w warunkach zbyt wysokiej wilgotności – powyżej 80%	Standardowy poziom wilgotności w jakim wyrób jest przechowywany lub transportowany to nie więcej niż 80%. Opakowania nie mogą być wystawiane na działanie opadów atmosferycznych. Podsumowanie: Stosowanie transportu zakrytego – izolowanie od opadów atmosferycznych
Ciężar warstw	Zgniecenie opakowań zbiorczych lub transportowych	Wyrób nie jest piętrowany na palecie – na jednej palecie może znajdować się jeden wyrób, palety nie są piętrowane Podsumowanie: Brak kwestii związanych z piętrowaniem wyrobu w czasie transportu

Wibracje, drgania	Zgniecenie opakowań zbiorczych lub transportowych	Wyrób nie jest podatny na drgania/ wibracje mogące powstać w czasie transportu – brak konieczności dodatkowych zabezpieczeń w opakowaniu wyrobu. Podsumowanie: Brak zagrożeń w transporcie ze strony ewentualnych wibracji/ drgań
Miejsce ustawienia w samochodzie	Przesuwanie się palety, kartonu – uszkodzenie mechaniczne	Wyrób nie posiada ciężaru całkowitego powodującego szczególne zagrożenia w czasie transportu wynikające z jego umiejscowienia w samochodzie. Podsumowanie: Wyrób nie ma szczególnych wymagań co do miejsca umieszczenia w samochodzie .
Załadunek	Uszkodzenie mechaniczne opakowania	W przypadku transportu paletowego załadunek wózkami widłowym lub paletowym. Podsumowanie: Należy zachować ostrożność przy załadunku/ wyładunku wyrobu.

URZĄDZENIE NIE DZIAŁA (OBJAWY, PRZYCZYNY)

OBJAWY AWARII	PRZEWIDYWANA PRZYCZYNA POSTĘPOWANIE
POZOSTAJĄCA WODA W NIECCE – PO SPUŚCIE	Wypoziomować posadowienie urządzenia.
WODA ROZLEWA SIĘ POD WANNĄ – PRZY SPUŚCIE	Kratka ściekowa nie „nadaża” z odbiorem wody. Przeczyścić kratkę. Jeżeli to nie pomoże należy wymienić kratkę na DN 100.
ZAWÓR SPUSTU STAWIA DUŻY OPÓR	Woda o dużej twardości pozostawia osad na powierzchniach zaworu. Należy przeprowadzić odkamienianie. Jeśli nie nastąpi poprawa należy skontaktować się z serwisem.
CIEKĄCA WODA Z PRZYŁĄCZA NATRYSKU	Sprawdzić, dokręcić przyłącze. Jeśli to nie skutkuje wymienić uszczelkę.

BADANIA BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNEGO

Badania okresowe bezpieczeństwa elektrycznego wanny w zakresie:

- a) prąd upływu uziomowy wanny;
- b) prąd upływu pacjenta (w niecce wanny wypełnionej wodą);
- c) rezystancja drogi uziomu (śruba mocująca silnika pompy wody) .



Służby techniczne nabywcy, powinny przeprowadzać albo zlecać wykonywanie okresowych badań bezpieczeństwa elektrycznego (dodatkowo płatne i wykonywane przez autoryzowany serwis producenta) wanny nie rzadziej niż raz w roku i każdorazowo po awarii / napraw i urządzenia.

Badania należy udokumentować protokołem z ich wyników. Niezależnie powinno sprawdzać się poprawność działania wyłącznika różnicowo – prądowego w sposób i w czasie określonym w dokumentacji technicznej danego wyłącznika.

UTYLIZACJA

Urządzenie AQUARIUS E, po całkowitym wyeksploatowaniu, należy traktować jako elektrośmieć i zutylizować je zgodnie z wymaganiami postępowania z tego typu odpadami.

WARUNKI ORAZ WYŁĄCZENIA Z GWARANCJI

BH KINESIS ANDRZEJ BORUTA bierze na siebie odpowiedzialność za ewentualne defekty materiału czy błędy technologiczne wynikiem w procesie produkcji przez określony czas gwarancji licząc od daty sprzedaży.

Rozpoczyna się od daty instalacji urządzenia w miejscu wskazanym przez odbiorcę.

W przypadku, gdy sprzęt nie jest instalowany w dniu dostawy, producent zastrzega dla odbiorcy prawo wydłużenia gwarancji, nie dłużej jednak niż 42 miesiące licząc od daty wystawienia faktury.

Warunki gwarancji będą dochowane, o ile nasze produkty używane będą zgodnie z opisanymi zasadami oraz zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

Samodzielne wykonywanie napraw bądź zmian w urządzeniu, bez wcześniejszego uzgodnienia z producentem może skutkować utratą gwarancji.

Wszelkie roszczenia gwarancyjne należy zgłaszać na piśmie w ciągu 60 dni od chwili ich wystąpienia oraz przed upływem terminu gwarancji. Podstawą roszczeń gwarancyjnych jest faktura VAT lub karta gwarancyjna.



Gwarant ma prawo odmowy uwzględnienia reklamacji w przypadku, gdy klient nie przedłoży faktury VAT bądź karty gwarancyjnej lub gdy dokumenty te będą nieczytelne.

Zgłoszenie naprawy gwarancyjnej powinno zostać zgłoszone telefonicznie lub pisemnie: e-mail, list, fax. Po czym nabywca otrzyma kartę interwencji serwisowej, którą należy uzupełnić o następujące dane:

- nazwę urządzenia
- typ lub model urządzenia
- numer seryjny
- numer NIP płatnika
- dokładny opis usterki
- osobę kontaktową i numer telefonu
- godziny pracy placówki
- podstawa gwarancji

WARUNKI GWARANCJI

1. Biuro Handlowe KINESIS zobowiązuje do nieodpłatnej naprawy zakupionego towaru lub do jego wymiany na nowy – na warunkach zawartych w niniejszy dokumencie gwarancji, jeżeli przyczyną powstania usterek lub uszkodzeń są ukryte wady materiałowe.
2. Kupujący zobowiązany jest do wykonania czynności regulacyjnych zgodnie z instrukcją obsługi. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych w skutek niewłaściwego, lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania, przechowywania, niewłaściwej obsługi i konserwacji oraz wynikłych po sprzedaży zdarzeń losowych.
3. Gwarancją nie są objęte podzespoły podlegające naturalnemu zużyciu podczas eksploatacji, przykładowo: szczotki dmuchaw powietrza (wentylatory komutatorowe), membrany elektrozaworów, łożyska, filtry ssące dmuchaw powietrza.
4. Gwarancja nie obejmuje bieżącej obsługi sprzętu, przewidzianej w instrukcji, tj. w szczególności konserwacji i czyszczeniu podzespołów hydraulicznych wanny zabrudzonych zanieczyszczeniami wytrącającymi się z wody, instalacji wodociągowej oraz zanieczyszczeniami po pacjentach.
5. Reklamacje z tytułu wad towaru należy zgłaszać w punkcie zakupu towaru. Reklamujący powinien dokładnie określić wadę, a także datę i okoliczności jej wystąpienia oraz powinien współdziałać z Gwarantem w celu umożliwienia mu prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z niniejszej gwarancji.
6. Naprawa wadliwego towaru powinna nastąpić w odpowiednim terminie, nie dłuższym niż 21 dni. Jeżeli jednak wskutek wyjątkowych okoliczności nie będzie możliwa naprawa wadliwego towaru, gwarant ma obowiązek poinformować o przyczynach niemożności wykonania obowiązków wynikających z gwarancji i po zawarciu obustronnej umowy wyznaczyć nowy, stosowny do okoliczności, termin dokonania naprawy.
7. Wymiana wadliwego towaru na wolny od wad następuje wyłącznie w przypadku braku możliwości dokonania w odpowiednim terminie naprawy zapewniającej pełną sprawność eksploatacyjną, przewidzianą warunkami technicznymi.
8. Gwarantem jakości towaru jest BH KINESIS ANDRZEJ BORUTA siedzibą przy ul. Penara 23 w Iwoniczu Zdroju.

PRZYKŁADY WYŁĄCZENIA Z GWARANCJI

Producent nie ponosi odpowiedzialności za awarie i uszkodzenia urządzenia będące wynikiem użytkowania w niewłaściwych warunkach, w szczególności:

1. Zanieczyszczona instalacja wodociągowa.
2. Inne uszkodzenia powstałe w wyniku złej jakości wody tzn. posiadającej w swoim składzie zbyt dużą ilość minerałów wytrącających się w następstwie użytkowania w pompie, zmieniaaczach mechanicznych, odpływie, dyszach, elektrozaworach.
3. Uszkodzenia mechaniczne będące wynikiem niewłaściwego składowania, montażu (wykonuje tylko i wyłącznie serwis producenta), transportu, użytkowania i konserwacji.
4. Brak okresowego czyszczenia przewodów hydraulicznych, elektrozaworów oraz pompy przy użyciu dostępnych na rynku preparatów do tego celu przeznaczonych (preparaty służące do czyszczenia wanien z hydromasażem). Za wybór odpowiedniego środka do tego celu przeznaczonego odpowiada właściciel urządzenia.
5. Brak wykonania **corocznych elektrycznych badań bezpieczeństwa** (BH KINESIS ANDRZEJ BORUTA zastrzega sobie prawo do wykonania tych badań. Badania są dodatkowo płatne).
6. Usterki wanny, lub jej komponentów, powstałych w wyniku wypadku, niewłaściwego użytkowania, zastosowania jej do niewłaściwych celów, uszkodzeń powstałych w efekcie przechowywania, niedbałości lub wprowadzonych modyfikacji.
7. Uszkodzenia podzespołów elektrycznych wanny powstałe wskutek źle zabezpieczonej instalacji elektrycznej (np. brak zabezpieczeń przeciwprzepięciowych, zaniku fazy, spadku napięcia).
8. Wykonanie jakichkolwiek napraw lub innych prac przez osoby nieupoważnione do tego.
9. Zastosowania części zamiennych zakupionych poza Firmą BH KINESIS ANDRZEJ BORUTA.

Wszelkie naprawy, modyfikacje oraz coroczne elektryczne badania bezpieczeństwa świadczone na podstawie niniejszej gwarancji muszą być wykonywane przez autoryzowany serwis BH KINESIS ANDRZEJ BORUTA pod rygorem utraty gwarancji.



WSZELKIE SPRAWY ZWIĄZANE Z GWARANCJĄ NA NASZ WYRÓB, PROSIMY KIEROWAĆ DO PUNKTU SERWISU, KTÓREGO ADRES PODANY JEST PONIŻEJ.

Podmiot odpowiedzialny za wykonywanie serwisu oraz dostarczenie części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych:

SERWIS PRODUCENTA:

BH KINESIS ANDRZEJ BORUTA

ul. Dworska 19

38-430 Miejsce Piastowe

E- MAIL: serwiskinesis@kinesis.com.pl; biurokinesis@kinesis.com.pl

KARTA GWARANCYJNA AQUARIUS E

1. Gwarancją niniejszą poręcza się jakość i funkcjonalność wyrobu.
2. Gwarant udziela 24 miesięcznej gwarancji na zakupione urządzenie od daty sprzedaży. Przeglądy może wykonywać tylko autoryzowany serwis firmy BH KINESIS.
3. W momencie przedłużenia czasu naprawy gwarancyjnej – powyżej 3 dni – niezależnie od przyczyn sprawa, że okres gwarancji zostaje przedłużony o cały okres niesprawności sprzętu.
4. W okresie gwarancyjnym dokonywane będzie bezpłatne usuwanie wad powstałych z winy producenta w terminie ustalonym z Użytkownikiem, w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia awarii.
5. Gwarant zobowiązuje się do wymiany wadliwego podzespołu na nowy, kiedy podzespół zostanie dwa razy naprawiony i nadal nie będzie poprawnie sprawował swojej funkcji.
6. Świadczenie z tytułu gwarancji przysługuje nabywcy wyłącznie na skutek wady tkwiącej w sprzedanym artykule w szczególności z powodu użycia nieodpowiednich materiałów lub wadliwego wykonania.
7. Użytkownik wanny powinien przestrzegać zasad - związanych z przygotowaniem pomieszczenia i instalacji sprzętu – zawartych w instrukcji.
8. Jeśli urządzenie zostanie zamontowane niezgodnie z zasadami zawartymi w instrukcji oraz przez osoby do tego nieuprawnione, gwarant nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkownika lub pacjenta.
9. Jeśli urządzenie będzie używane niezgodnie z zasadami zawartymi w instrukcji obsługi gwarant nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkownika lub pacjenta.
10. Gwarant odpowiada za braki ilościowe i jakościowe stwierdzone zaraz po rozpakowaniu produktu u bezpośrednich odbiorców – w ramach udzielonej gwarancji.
11. Gwarancją nie zostaną objęte usterki, które nie będą zgłoszone przez użytkownika sprzętu telefonicznie lub pisemnie: e-mail, list, fax. Po czym nabywca otrzyma kartę interwencji serwisowej.
12. Użytkownik pokrywa koszty jakie powstaną z nieuzasadnionego zgłoszenia usterki.
13. Gwarancji nie podlega sprzęt, w którym:
 - a. powstały uszkodzenia mechaniczne i termiczne,
 - b. nie dokonano właściwej konserwacji,
 - c. zostały wykonane samodzielne naprawy, modyfikacje, zmiany konstrukcyjne,
 - d. usunięte zostały numery i plomby fabryczne,
 - e. uszkodzone zostały numery i plomby fabryczne,
 - f. straty i szkody są efektem pożaru czy wyładowań atmosferycznych,
 - g. wady urządzenia powstały przez pracę na urządzeniu niezgodną z zasadami zawartymi w instrukcji obsługi,
 - h. uszkodzenia powstały na skutek zdarzeń losowych.
14. Użytkownik zobowiązany jest do stałej opieki konserwacyjnej zarówno sprzętu jak i instalacji w innym wypadku traci gwarancję.
15. Nie będą wystawiane kolejne karty gwarancyjne jeśli urządzenie zostanie odsprzedane w czasie, kiedy będzie ono objęte jeszcze gwarancją.
16. Nie wystawia się duplikatu Karty Gwarancyjnej.
17. Gwarancja nie obejmuje zakresu: materiałów i części eksploatacyjnych.
18. Producent określa czas życia wyrobu na 10 lat.
19. Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania-na terenie Polski- URPL.

URZĄDZENIE DO MASAŻU OGÓLNOUSTROJOWEGO AQUARIUS E

NUMER FABRYCZNY

PIECZĘĆ, DATA I PODPIS
GWARANTA

PIECZĘĆ I PODPIS
KUPUJĄCEGO:

ZESTAWIENIA NAPRAW	UWAGI UŻYTKOWNIKA SPRZĘTU

BADANIE ELEKTRYCZNEGO	BEZPIECZEŃSTWA	DATA, PODPIS WYKONUJĄCEGO BADANIE
DATA		
WYNIK BADANIA		
DATA		
WYNIK BADANIA		
DATA		
WYNIK BADANIA		
DATA		
WYNIK BADANIA		
DATA		
WYNIK BADANIA		



KAŻDE KOLEJNE BADANIE BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNEGO
NALEŻY WYKONAĆ PRZED UPŁYWEM 12 MIESIĘCY!

BIURO HANDLOWE KINESIS ANDRZEJ BORUTA

ul. Penara 23, 38-440 Iwonicz Zdrój

NIP: 684-107-94-34 Regon: 370192926

TELEFON: +48 13 - 43 - 506 - 45

FAX: +48 13 - 42 - 500 - 22

E-MAIL: biurokinesis@kinesis.com.pl