

KARTA GWARANCYJNA

1. Producent zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie sprzętu, na który wydana jest niniejsza gwarancja, w okresie: -Konstrukcja metalowa: 2 lata
- Tapicerka: 1 rok
- Akcesoria elektryczne/hydrauliczne: 1 rok
2. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w ciągu 14 dni od daty dostarczenia sprzętu do producenta. Koszt transportu pokrywa nabywca.
3. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy, liczony od dnia dostarczenia sprzętu do producenta, do dnia wyznaczonego terminu wykonania naprawy.
4. Nabywcy przysługuje wymiana sprzętu na nowy lub zwrot gotówki w przypadku, gdy:
a) producent nie dokona naprawy w ciągu 14 dni od dostarczenia sprzętu,
b) w okresie gwarancji nastąpi konieczność dokonania 4 napraw, a sprzęt nadal wykazuje wady uniemożliwiające eksploatację zgodną z przeznaczeniem.
5. Wymiana sprzętu na nowy lub zwrot gotówki następuje na podstawie decyzji producenta, po przedstawieniu karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu.
6. Pojęcie „naprawa” nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie.
7. Sposób i zakres naprawy ustala udzielający gwarancji.
8. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia sprzętu powstałe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania, konserwacji, transportu oraz dodatkowo wszelkie uszkodzenia mechaniczne.
9. Ponadto gwarancją nie jest objęta tapicerka, która ma bezpośredni kontakt z wszelkiego rodzaju oliwkami do masażu oraz kremami.
10. Powyższe przyczyny mogą spowodować utratę gwarancji.
11. Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie wykonywania usług transportowej przez firmę przewoźową lub kurierską - obowiązkiem kupującego jest sprawdzenie stanu technicznego przesyłki.
12. **Czas życia wyrobu producent określa na 10 lat.**
13. Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić do producenta oraz Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

.....
Data sprzedaży

.....
Pieczęć punktu sprzedaży

KINESIS
producent sprzętu do fizjoterapii

INSTRUKCJA OBSŁUGI

STÓŁ REHABILITACYJNY

MODEL: CROSS 2; CROSS 3P; CROSS 3F, CROSS D



Wytwórca:

Biuro Handlowe KINESIS Andrzej Boruta
ul. Penara 23, 38-440 Iwonicz-Zdrój
tel. 13 435 06 45



Wydanie 02/2024 z dnia 6.12.2024r.

INSTRUKCJA OBSŁUGI STOŁY REHABILITACYJNE – modele: CROSS 2, CROSS 3F, CROSS 3P, CROSS D

Oznaczenia i symbole w instrukcji obsługi oraz na etykiecie wyrobu.

Numer seryjny	Wyrób medyczny	Producent	Data produkcji	Zapoznać się z instrukcją obsługi	Oznakowanie CE	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu
Ostrzeżenie	Maksymalne obciążenie 200kg					



Przekroczenie maksymalnego obciążenia podanego przez producenta grozi uszkodzeniem wyrobu i urazem pacjenta!!!

Dane techniczne

Opis wyrobu - stół rehabilitacyjny 2-częściowy lub 3-częściowy z elektryczną zmianą wysokości leżyska za pomocą ramy, pilota ręcznego lub nożnego, wykonany z profili stalowych malowanych proszkowo.

	CROSS 2	CROSS 3P	CROSS 3F	CROSS D
Długość (w cm)	200 (+/- 5%)	200 (+/- 5%)	200 (+/- 5%)	200 (+/- 5%)
Wysokość (w cm)	49-99 (+/- 5%)	49-99 (+/- 5%)	49-99 (+/- 5%)	49-99 (+/- 5%)
Szerokość (w cm)	67 (+/- 5%)	67 (+/- 5%)	67 (+/- 5%)	67 (+/- 5%)
Regulacja zagłówka sprężyną gazową w zakresie:	-45°+ 60°(+/- 5°)	-45°+ 60°(+/- 5°)	-85°+ 20° (+/- 5°)	-45°+ 60°(+/- 5°)
Regulacja kąta części środkowej (Pivot):	-	+20° (+/- 2°)	-	0°+ 15 ° (+/-5%)
Regulowana część tylna do pozycji fotela	-	-	+85° (+/- 5°)	-
Regulacja podłokietników (w cm)	wyp. dodatkowe	wyp. dodatkowe	wyp. dodatkowe	wyp. dodatkowe
Waga (kg)	55 (+/- 3kg)	65 (+/- 3kg)	65 (+/- 3kg)	75 kg (+/- 3kg)
Max obciążenie leżyska (kg)	200	200	200	150 kg
Max obciążenie zagłówka (kg)	30	30	30	30 kg

Dane techniczne siłownika elektrycznego Dewert:

zasilanie 240 V ~ 50 / 60 Hz; obciążenie max 6000 N; moc znamionowa: max 3,15 A; klasa II



Stół rehabilitacyjny CROSS 2



Stół rehabilitacyjny CROSS 3 F



Stół rehabilitacyjny CROSS 3



Stół rehabilitacyjny CROSS D

Zastrzeżenia do gwarancji

Gwarancja nie są objęte:

- o Uszkodzenia wynikające z nieprzestrzegania wyżej wymienionych reguł;
- o Uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania, niewłaściwej i nieregularnej konserwacji;
- o Różnice w kolorystyce tapicerki, wynikające wystawienia stołu na działanie promieni słonecznych;

Zalecenia Wytwórcy

1. Użytkować stół zgodnie z instrukcją obsługi.
2. Należy zapoznać się z warunkami gwarancji i ich przestrzegać.
3. Zalecany jest przegląd wyrobu po dwóch latach.
4. Stół nie jest zalecany przy wykonywaniu defibrylacji pacjentów.
5. **Zabrania się siadania na podgłówek**



Siadanie na zagłówek grozi urwaniem zagłówka i urazem pacjenta!

Zastosowanie

Stoły rehabilitacyjne umożliwiają prawidłowe, bezpieczne i efektywne prowadzenie zabiegów rehabilitacyjnych, fizjoterapii, fizykoterapii, masażu, drenażu, mających na celu leczenie lub łagodzenie przebiegu chorób oraz skutków urazów/ upośledzeń. Stosowane w gabinetach medycznych i lekarskich umożliwiają pacjentom przybranie prawidłowej postawy do przeprowadzenia efektywnego i bezpiecznego zabiegu lub badania. Bezpieczeństwo i efektywność stołów są zapewnione poprzez odpowiednią konstrukcję wyrobu, przeprowadzone testy użytkowe i kliniczne, zastosowanie bezpiecznych materiałów i komponentów zgodnie z wymaganiami europejskich norm dla wyrobów medycznych. Budowa stołów rehabilitacyjnych pozwala fizjoterapeucie na łatwy i pełny dostęp do pacjenta z każdej strony oraz dołączanie wspomagających akcesoriów dzięki czemu wszelkiego rodzaju zabiegi przynoszą zamierzony skutek i zapewniają lekarzom, rehabilitantom odpowiednie warunki do prowadzenia zabiegu/ badania.

Budowa

Błat z płyty wiórowej tapicerowany. Konstrukcja nośna- rama z profili stalowych. Mechanizm elektrycznego podnoszenia wysokości - pilot ręczny lub nożny. Mechanizm regulacji kąta położenia zagłówek. Stopki . Zaślepka krótka tapicerki (zagłówek). Mechanizm jezdy.

Przygotowanie do pracy/ obsługa

Stół jest dostarczany w stanie zmontowanym, gotowy do użycia.

1. Po ustawieniu w miejscu przeznaczenia należy sprawdzić stabilność i wypoziomować stół przy pomocy stopek gumowych.
2. Stoły z siłownikami elektrycznymi należy podłączyć przewodem zasilającym do gniazda sieciowego 240V.
3. Ułożenie pacjenta: Pacjent siada z boku na blat tapicerowany i przyjmuje dogodną pozycję poziomą. Powyższe czynności asekuje opiekun, wyznaczając pacjentowi właściwe ułożenie na stole. Po wykonaniu zabiegu pomaga mu bezpiecznie zejść ze stołu.
4. Zabrania się siadania na podgłówek.

Konserwacja

Konserwacja polega na wycieraniu tapicerki stołu na mokro, przy użyciu ogólnodostępnych środków do czyszczenia materiałów skóropodobnych. Nie należy używać rozpuszczalników. Stół może być dezynfekowany środkami ogólnie stosowanymi na bazie: spirytusu, chloraminy, aldesanu. Środki te powinny mieć odpowiednie atesty dopuszczające do stosowania.

Bezpieczeństwo

1. Przed podłączeniem wtyczki do gniazda upewnij się, że:
 - Gniazdko jest odpowiednio uziemione i odpowiada obowiązującym przepisom;
 - Napięcie w sieci jest zgodne z danymi podanymi w tabeli „Dane techniczne”;
 - Gniazdko odpowiada wtyczce;
2. Kabel zasilania może być wymieniany i naprawiany, jedynie przez uprawnionego specjalistę.
3. Nie należy samodzielnie dokonywać żadnych napraw siłowników i kabli elektrycznych.
4. Kabel zasilacza nie powinien być zaginany, może to skutkować jego uszkodzeniem.
5. Unikać bezpośredniego wystawiania stołu na warunki pogodowe, tj. nasłonecznienie, opady, promieniowanie UV, wilgoć.
6. Należy przestrzegać dopuszczalnego, maksymalnego obciążenia.



Przekroczenie wartości maksymalnego obciążenia grozi uszkodzeniem stołu i może spowodować uraz pacjenta.

7. Zabrania się siadania na podgłówek.



Siadanie w miejscach niedozwolonych grozi uszkodzeniem stołu i może spowodować uraz pacjenta.

Producent uchylił się od odpowiedzialności w przypadku nie przestrzegania powyższych zasad.

Warunki przechowywania

Urządzenie powinno być przechowywane w warunkach pokojowych, w zamkniętych pomieszczeniach. Unikać narażania stołu na warunki pogodowe. Podłoże powinno być równe i stabilne.



Umieszczenie stołu na nierównej powierzchni może skutkować jego przewróceniem się.

Przygotowanie do pracy/ obsługa

Stół jest dostarczany w stanie zmontowanym, gotowy do użycia.

1. Po ustawieniu w miejscu przeznaczenia należy sprawdzić stabilność i wypoziomować stół przy pomocy stopek gumowych.
2. Stoły z siłownikami elektrycznymi należy podłączyć przewodem zasilającym do gniazda sieciowego 240V.
3. Ułożenie pacjenta: Pacjent siada z boku na blat tapicerowany i przyjmuje dogodną pozycję poziomą. Powyższe czynności asekuje opiekun, wyznaczając pacjentowi właściwe ułożenie na stole. Po wykonaniu zabiegu pomaga mu bezpiecznie zejść ze stołu.
4. Zabrania się siadania na podgłówek.

Tapicerka

Tapicerka stołu CROSS wykonana jest z materiału skóropodobnego. W celu odpowiedniego użytkowania należy przestrzegać następujących reguł:

- Tapicerkę należy czyścić regularnie, środkami przeznaczonymi do tego typu powierzchni;
- Należy unikać kontaktu tapicerki z tłustymi substancjami; W tym celu należy stosować okrycia olejoodporne lub nieprzemakalne prześcieradła.
- Zabrudzenia powstałe w wyniku kontaktu tapicerki z substancjami tłustymi, tj. olejkami czy kremami, należy natychmiast usunąć za pomocą łagodnego detergentu (np. mydło i ciepła woda) i miękkiej gąbki lub szmatki;
- Tapicerka powinna być przechowywana i użytkowana z daleka od źródeł ognia, ciepła i nie powinna być narażana na działanie warunków pogodowych;
- Bezwzględnie zabrania się przebijania tapicerki ostrymi przedmiotami, prasowania, chlorowania czy prania.

W razie potrzeby, tapicerkę można dezynfekować środkami do tego przeznaczonymi, nie powodującymi uszkodzenia materiału.

W przypadku nie stosowania wyżej wymienionych punktów producent zastrzega sobie prawo do nie respektowania gwarancji.

Uwagi eksploatacyjne

1. Elektryczna regulacja wysokości stołu za pomocą ramy wokół stołu/ pilota ręcznego.
2. Stół przeznaczony jest do zabiegów tylko dla jednej osoby jednocześnie.
3. Nie dopuszcza się przenoszenia stołu wraz z pacjentem.
4. Zabrania się gwałtownego siadania na stół (wskakiwania).
5. Jeżeli pacjent uклада się na stole bez ubrania, rehabilitant powinien zastosować podkłady jednorazowe lub zdezynfekować stół.
6. Regulacja kąta łamania podgłówka przy pomocy sprężyny gazowej oraz w przypadku posiadania podłokietników przy pomocy pokręteł.
7. Zabrania się siadania na podgłówek.
8. **W przypadku użycia oliwki, talku, kremu do masażu itp. obowiązkowo należy stosować podkłady jednorazowe.**