

## INSTRUKCJA OBSŁUGI FOTEŁA DO POBIERANIA KRWI

Model: KF1

Oznaczenia i symbole na instrukcji obsługi oraz etykiecie wyrobu

Numer seryjny	Wyrób medyczny	Producent	Data produkcji	Zapoznać się z instrukcją obsługi	Oznakowanie CE	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu
Ostrzeżenie	Maksymalne obciążenie 120kg					

### I. Dane techniczne

Fotel do pobierania krwi to wyrób, który przeznaczony jest do ułatwienia przeprowadzenia zabiegu pobierania krwi oraz iniekcji na prawym lub lewym przedramieniu osoby poddawanej zabiegowi.

DANE TECHNICZNE:	
Całkowita szerokość:	81,5 cm
Całkowita wysokość:	125 cm
Szerokość podstawy:	50 cm
Szerokość siedziska:	54,5 cm
Głębokość siedziska:	40 cm
Wysokość oparcia:	78 cm
Regulacja oparcia w zakresie	5° - 85°
Maksymalne obciążenie:	150 kg
Waga:	14 kg

### II. Zastosowanie

Fotel do pobierania krwi to wyrób, który przeznaczony jest do ułatwienia przeprowadzenia bezpiecznego i sprawnego zabiegu pobierania krwi oraz iniekcji na prawym lub lewym przedramieniu osoby poddawanej zabiegowi. Fotel wyposażony jest w podłokietniki, które służą do podparcia przedramienia pacjenta. Istnieje możliwość dostosowania wysokości podłokietników do wzrostu pacjenta. Podstawa fotela do pobierania krwi wykonana jest z rur stalowych malowanych proszkowo. Siedzisko i podłokietniki obite są skóropodobnym materiałem co sprawia, że jest łatwe do utrzymania w czystości. Pochył oparcia regulowany za pomocą sprężyny gazowej. Wyposażony jest on w gumowe stopki, które umożliwiają wypoziomowanie fotela. Fotel dodatkowo posiada stolik z tworzywa sztucznego.

Fotel do pobierania krwi stanowi doskonałe wyposażenie gabinetów lekarskich, placówek medycznych, przychodni oraz szpitali.

### III. Budowa

- |                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| 1. Siedzisko                          | 1 szt. |
| 2. Oparcie                            | 1 szt. |
| 3. Podłokietniki regulowane           | 2 szt. |
| 4. Konstrukcja (rama z rur stalowych) | 1 szt. |
| 5. Stopki                             | 4 szt. |
| 6. Stolik z tworzywa sztucznego       | 1szt   |
- Opcja: stelaż ze stali kwasoodpornej

### IV. Przygotowanie do pracy/ obsługa

Fotel jest dostarczany w stanie zmontowanym, gotowy do użycia.

- Po ustawieniu fotela w miejscu przeznaczenia sprawdzić czy stoi stabilnie na podłożu poprzez wypoziomowanie stolika przy pomocy gumowych stoppek.
- Należy dostosować wysokość podłokietnika do wzrostu pacjenta
- Ułożenie pacjenta: Pacjent siada na siedzisko i przyjmuje dogodną pozycję. Powyższe czynności asekuje opiekun, wyznaczając pacjentowi właściwe ułożenie ręki na podłokietniku.

### V. Konserwacja

Konserwacja polega na wycieraniu tapicerki fotela na mokro, przy użyciu ogólnodostępnych środków do czyszczenia materiałów skóropodobnych. Nie należy używać rozpuszczalników. Stolik może być dezynfekowany środkami ogólnie stosowanymi na bazie: spirytusu, chloraminy, aldesanu. Środki te powinny mieć odpowiednie atesty dopuszczające do stosowania. Wykaz przykładowych środków dezynfekujących: „Bechtozoid” spray, „Chlorizol”, „Mikrozid” spray.

### VI. Uwagi eksploatacyjne

- Fotel przeznaczony jest do zabiegów tylko dla jednego pacjenta jednocześnie.
- Nie dopuszcza się przenoszenia fotela wraz z pacjentem.
- Zabrania się gwałtownego siadania na fotel (wskakiwania).



**Niestosowanie się do wyżej wymienionych wskazówek może grozić uszkodzeniem urządzenia oraz pacjenta!**

### VII. Zalecenia Wytwórcy

- Użytkować fotel zgodnie z instrukcją obsługi
- Należy zapoznać się z warunkami gwarancji i ich przestrzegać
- Zalecany jest przegląd wyrobu po dwóch latach



**Siadanie na podłokietniki grozi ich złamaniem i uszkodzeniem pacjenta!**

## KARTA GWARANCYJNA

1. Producent zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie sprzętu, na który wydana jest niniejsza gwarancja, w okresie 24 miesięcy od daty zakupu.
2. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w ciągu 14 dni od daty dostarczenia sprzętu do producenta. Koszt transportu pokrywa nabywca.
3. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy, liczony od dnia dostarczenia sprzętu do producenta, do dnia wyznaczonego terminu wykonania naprawy.
4. Nabywcy przysługuje wymiana sprzętu na nowy lub zwrot gotówki w wypadku, gdy:
  - a) producent nie dokona naprawy w ciągu 14 dni od dostarczenia sprzętu,
  - b) w okresie gwarancji nastąpi konieczność dokonania 4 napraw, a sprzęt nadal wykazuje wady uniemożliwiające eksploatację zgodną z przeznaczeniem.
5. Wymiana sprzętu na nowy lub zwrot gotówki następuje na podstawie decyzji producenta po przedstawieniu karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu.
6. Pojęcie „naprawa” nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania, których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie.
7. Sposób i zakres naprawy ustala udzielający gwarancji.
8. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia sprzętu powstałe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania, konserwacji, transportu oraz dodatkowo wszelkie uszkodzenia mechaniczne.
9. Ponadto gwarancją nie jest objęta tapicerka, która ma bezpośredni kontakt z wszelkiego rodzaju oliwkami do masażu oraz kremami.
10. Powyższe przyczyny mogą spowodować utratę gwarancji.
11. Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie wykonywania usługi transportowej przez firmę przewozową lub kurierską, obowiązkiem kupującego jest sprawdzenie stanu technicznego przesyłki.
12. Czas życia wyrobu producent określa na 10 lat.
13. Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić do producenta, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Podpis i data

Pieczętka

# KINESIS

producent sprzętu do fizjoterapii

## INSTRUKCJA OBSŁUGI FOTEL DO POBIERANIA KRWI MODEL: KF1



Wytwórca:  
Biuro Handlowe KINESIS Andrzej Boruta  
ul. Penara 23, 38-440 Iwonicz-Zdrój  
tel. 13 435 06 45



Wydanie 02/2024, z dnia 4.12.2024