







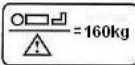


INSTRUKCJA OBSŁUGI
Fotel zabiegowy FZ-K

Oznaczenia i symbole na instrukcji obsługi oraz etykiecie wyrobu

						
Numer seryjny	Wyrób medyczny	Producent	Data produkcji	Zapoznać się z instrukcją obsługi	Oznakowanie CE	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu
	 = 160kg					
Ostrzeżenie	Maksymalne obciążenie 150kg					

I. Dane techniczne

Opis wyrobu – fotel

DANE TECHNICZNE:	
Długość:	202cm
Szerokość:	57cm
Wysokość:	50-90cm
Zakres regulacji oparcia:	85°-180°
Zakres regulacji podpór pod kończynę dolne	0° - 90°
Waga:	120kg
Maksymalne obciążenie:	160kg

II. Zastosowanie

Fotel zabiegowy FZ-K to najnowszy produkt firmy Kinesis. Stosowany jest do przeprowadzania badań oraz zabiegów m.in: dializ, pobierania krwi, badań okulistycznych, laryngologicznych. Zagłówek oraz podnóżek regulowane są za pomocą siłowników elektrycznych, a wysokość poprzez kolumnę elektryczną. Wszystkie elementy sterowane są pilotem ręcznym. Podłokietniki są regulowane i blokowane za pomocą docisku. Konstrukcja wykonana jest z elementów stalowych malowanych proszkowo. W skład urządzenia wchodzi wygodny podgłówek w formie półwałka.

III. Budowa

Blat z płyty wiórowej tapicerowany. Konstrukcja nośna (rama z profili stalowych). Wysokość fotela regulowana kolumną na pomocą pilota ręcznego. Pochylenie leżyska oraz podnóżka regulowane za pomocą siłowników elektrycznych.

Fotel jako opcja może posiadać uchwyt na kropłówkę.

IV. Przygotowanie do pracy/ obsługa

Fotel jest dostarczany w stanie zmontowanym, gotowy do użycia.

- Po ustawieniu w miejscu przeznaczenia należy sprawdzić stabilność i wypoziomować fotel za pomocą stopek gumowych.
- Ułożenie pacjenta: Pacjent siada z boku na blat tapicerowany i przyjmuje dogodną pozycję. Powyższe czynności asekuje opiekun, wyznaczając pacjentowi właściwe ułożenie na fotelu. Po wykonaniu zabiegu pomaga mu bezpiecznie zejść z fotela.
- Zabrania się siadania na oparcie fotela.

V. Konserwacja

Konserwacja polega na wycieraniu tapicerki fotela na mokro, przy użyciu ogólnodostępnych środków do czyszczenia materiałów skóropodobnych. Nie należy używać rozpuszczalników. Fotel może być dezynfekowany środkami ogólnie stosowanymi na bazie: spirytusu, chloraminy, aldesanu. Środki te powinny mieć odpowiednie atesty dopuszczające do stosowania.

VI. Uwagi eksploatacyjne

- Fotel przeznaczony jest do zabiegów tylko dla jednej osoby jednocześnie.
- Nie dopuszcza się przenoszenia fotela wraz z pacjentem.
- Zabrania się gwałtownego siadania na fotel (wskakiwania).
- Regulacja kąta łamania oparcia i podnóżka przy pomocy siłownika elektrycznego.
- W przypadku użycia oliwki, talku, kremu do masażu itp. obowiązkowo należy stosować podkłady jednorazowe.**
- Zabrania się siadania na oparcie i podnóżek fotela.
- Podczas użytkowania zwróć uwagę aby kable nie zostały przytrzaśnięte lub zagięte.

VI. Zalecenia Wytwórcy

- Użytkować fotel zgodnie z instrukcją obsługi
- Należy zapoznać się z warunkami gwarancji i ich przestrzegać
- Zalecany jest przegląd wyrobu po dwóch latach
- Zabrania się siadania na oparciu i podnóżku.**
- Wszystkich napraw dotyczących układu zasilania należy dokonywać u producenta lub w autoryzowanym zakładzie."



Siadanie na oparciu grozi urwaniem zagłówek, upadkiem i uszkodzeniem pacjenta!



KARTA GWARANCYJNA

1. Producent zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie sprzętu, na który wydana jest niniejsza gwarancja w okresie:
 - konstrukcja metalowa: 2 lata
 - tapicerka: 1 rok od daty zakupu.
2. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w ciągu 14 dni od daty dostarczenia sprzętu do producenta. Koszt transportu pokrywa nabywca.
3. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy, liczony od dnia dostarczenia sprzętu do producenta, do dnia wyznaczonego terminu wykonania naprawy.
4. Nabywcy przysługuje wymiana sprzętu na nowy lub zwrot gotówki w przypadku, gdy:
 - a) producent nie dokona naprawy w ciągu 14 dni od dostarczenia sprzętu,
 - b) w okresie gwarancji nastąpi konieczność dokonania 4 napraw, a sprzęt nadal wykazuje wady uniemożliwiające eksploatację zgodną z przeznaczeniem.
5. Wymiana sprzętu na nowy lub zwrot gotówki następuje na podstawie decyzji producenta po przedstawieniu karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu.
6. Pojęcie „naprawa” nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania, których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie.
7. Sposób i zakres naprawy ustala udzielający gwarancji.
8. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia sprzętu powstałe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania, konserwacji, transportu oraz dodatkowo wszelkie uszkodzenia mechaniczne.
9. Ponadto gwarancją nie jest objęta tapicerka, która ma bezpośredni kontakt z wszelkiego rodzaju oliwkami do masażu oraz kremami.
10. Powyższe przyczyny mogą spowodować utratę gwarancji.
11. Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie wykonywania usługi transportowej przez firmę przewozową lub kurierską - obowiązkiem kupującego jest sprawdzenie stanu technicznego przesyłki.
12. Czas życia wyrobu producent określa na 10 lat.
13. Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić do producenta, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

.....
Data sprzedaży

.....
Pieczęćka punktu sprzedaży

KiNESiS

producent sprzętu do fizjoterapii

INSTRUKCJA OBSŁUGI Fotel zabiegowy FZ-K



Wytwórca:

KINESIS Spółka z o.o.
Ul. Dworska 19, 38-430 Miejsce Piastowe
tel. 13 435 06 45



Wydanie 04/2024 z dnia 4.12.2024

