

INSTRUKCJA OBSŁUGI
FOTEL GINEKOLOGICZNY – model PERFECT G

Oznaczenia i symbole w instrukcji obsługi oraz na etykiecie wyrobu

Numer seryjny	Wyrób medyczny	Producent	Data produkcji	Zapoznać się z instrukcją obsługi	Oznakowanie CE	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu
Ostrzeżenie	Maksymalne obciążenie 150kg					

I. Dane techniczne

Fotel ginekologiczny z elektryczną zmianą wysokości leżyska za pomocą ramy wokół stołu, wykonany z profili stalowych malowanych proszkowo.

DANE TECHNICZNE:	
Długość:	203cm
Wysokość (regulowana elektrycznie za pomocą ramy wokół fotela) w zakresie:	64-104cm
Szerokość:	70cm
Pozycja Trendelenburga:	0° - 25°
Pozycja anty-Trendelenburga:	0° - 25°
Regulowany kąt oparcia plecówka pomocą sprężyny gazowej w zakresie:	0° - 75°
Waga:	125kg
Maksymalne obciążenie:	150kg



Przekroczenie maksymalnego obciążenia opisanego przez producenta grozi uszkodzeniem urządzenia oraz urazem pacjenta!

Dane techniczne siłownika elektrycznego Dewert:

zasilanie 240 V ~ 50 / 60 Hz; obciążenie max 6000 N; moc znamionowa: max 3,15 A;

II. Zastosowanie

Fotel ginekologiczny znajduje zastosowanie w szpitalach oraz gabinetach ginekologicznych. Konstrukcja fotela ginekologicznego jest bardzo stabilna i wytrzymała, co zapewnia bezpieczeństwo i komfort zarówno dla lekarza, jak i pacjenta. Posiada regulowane oparcie z wygodnym podgłówkiem, demontowany podnóżek oraz regulowane we wszystkich płaszczyznach podkolanniki. W fotelu istnieje możliwość uzyskania pozycji leżącej, Trendelenburga i anty-Trendelenburga. W standardzie znajduje się pojemnik ze stali nierdzewnej. Fotel ten może być wykorzystywany do każdego rodzaju zabiegów ginekologicznych.

III. Budowa

Błat z płyty wiórowej tapicerowany. Konstrukcja nośna - rama z profili stalowych. Mechanizm elektrycznego podnoszenia wysokości - rama wokół fotela. Mechanizm elektrycznego pochylenia stołu - pilot ręczny. Mechanizm regulacji kąta położenia oparcia za pomocą sprężyny gazowej. Uchwyt do pasów stabilizacyjnych - 2 szt. Mechanizm jezdny - 4 kółka. Stopki - 4 szt., Pojemnik ze stali nierdzewnej - 1szt. Podkolanniki regulowane - 2szt, opcja - schodek 1szt

IV. Przygotowanie do pracy/ obsługa

Fotel jest dostarczany w stanie zmontowanym, gotowy do użycia.

- Po ustawieniu w miejscu przeznaczenia należy sprawdzić stabilność i wypoziomować fotel za pomocą stopek gumowych.
- Fotel z siłownikami elektrycznymi należy podłączyć przewodem zasilającym do gniazda sieciowego 240V.
- Ułożenie pacjenta: Pacjent siada z boku na blat tapicerowany i przyjmuje dogodną pozycję. Powyższe czynności asekuje lekarz, wyznaczając pacjentowi właściwe ułożenie na fotelu. Po wykonaniu zabiegu pomaga mu bezpiecznie zejść z fotela.
- Zabrania się siadania na oparcie fotela.

V. Konserwacja

Konserwacja polega na wycieraniu tapicerki fotela na mokro, przy użyciu ogólnodostępnych środków do czyszczenia materiałów skóropodobnych. Nie należy używać rozpuszczalników. Fotel może być dezynfekowany środkami ogólnie stosowanymi na bazie: spirytusu, chloraminy, aldesanu. Środki te powinny mieć odpowiednie atesty dopuszczające do stosowania.

VI. Uwagi eksploatacyjne

- Elektryczna regulacja wysokości fotela za pomocą ramy wokół stołu.
- Elektryczna regulacja pochylenia fotela za pomocą pilota ręcznego.
- Regulacja kąta łamania oparcia przy pomocy sprężyny gazowej.
- Regulacja podkolanników przy pomocy pokręteł.
- Fotel przeznaczony jest tylko dla jednej osoby jednocześnie.
- Nie dopuszcza się przenoszenia fotela wraz z pacjentem.
- Zabrania się gwałtownego siadania na fotel (wskakiwania).
- Jeżeli pacjent układa się na fotelu bez ubrania, lekarz powinien zastosować podkłady jednorazowe lub zdezynfekować fotel.
- Zabrania się siadania na oparcie fotela.
- Zabrania się przenoszenia/podnoszenia fotelu za blat. Fotel można przenieść podnosząc go za dolną konstrukcję (przy gumowych stopkach).
- Kabel zasilania może być wymieniany i naprawiany, jedynie przez uprawnionego specjalistę
- Nie należy samodzielnie dokonywać żadnych napraw siłowników i kabli elektrycznych

VII. Zalecenia Wytwórcy

- Użytkować fotel zgodnie z instrukcją obsługi
- Należy zapoznać się z warunkami gwarancji i ich przestrzegać
- Zalecany jest przegląd wyrobu po dwóch latach
- Zabrania się siadania na oparcu



Siadanie na oparciu może skutkować jego urwaniem i uszkodzeniem pacjenta!

KARTA GWARANCYJNA

1. Producent zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie sprzętu, na który wydana jest niniejsza gwarancja, w okresie:
 - konstrukcja metalowa: 2 lata
 - tapicerka: 1 rok
 - akcesoria elektryczne: 1 rok
2. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w ciągu 14 dni od daty dostarczenia sprzętu do producenta. Koszt transportu pokrywa nabywca.
3. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy, liczony od dnia dostarczenia sprzętu do producenta, do dnia wyznaczonego terminu wykonania naprawy.
4. Nabywcy przysługuje wymiana sprzętu na nowy lub zwrot gotówki w przypadku, gdy:
 - a) producent nie dokona naprawy w ciągu 14 dni od dostarczenia sprzętu,
 - b) w okresie gwarancji nastąpi konieczność dokonania 4 napraw, a sprzęt nadal wykazuje wady uniemożliwiające eksploatację zgodną z przeznaczeniem.
5. Wymiana sprzętu na nowy lub zwrot gotówki następuje na podstawie decyzji producenta po przedstawieniu karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu.
6. Pojęcie „naprawa” nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie.
7. Sposób i zakres naprawy ustala udzielający gwarancji.
8. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia sprzętu powstałe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją: użytkowania, przechowywania, konserwacji, transportu oraz dodatkowo wszelkie uszkodzenia mechaniczne.
9. Ponadto gwarancją nie jest objęta tapicerka, która ma bezpośredni kontakt z wszelkiego rodzaju oliwkami do masażu oraz kremami.
10. Powyższe przyczyny mogą spowodować utratę gwarancji.
11. Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie wykonywania usługi transportowej przez firmę przewozową lub kurierską - obowiązkiem kupującego jest sprawdzenie stanu technicznego przesyłki.
12. Czas życia wyrobu producent określa na 10 lat.
13. Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić do producenta, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

.....
Data sprzedaży

.....
Pieczęćka punktu sprzedaży

KINESIS

producent sprzętu do fizjoterapii

INSTRUKCJA OBSŁUGI

FOTEL GINEKOLOGICZNY MODEL: PERFECT G



Wytwórca:

Biuro Handlowe KINESIS Andrzej Boruta
ul. Penara 23, 38-440 Iwonicz-Zdrój
tel. 13 435 06 45



Wydanie 02/2024 z dnia 4.12.2024