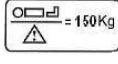


INSTRUKCJA OBSŁUGI
STOŁY REHABILITACYJNE, modele: SR-R2, SR-RŁ3, SM-R7

Oznaczenia i symbole na instrukcji obsługi oraz etykiecie wyrobu

						
Numer seryjny	Wyrób medyczny	Producent	Data produkcji	Zapoznać się z instrukcją obsługi	Oznakowanie CE	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu
						
Ostrzeżenie	Maksymalne obciążenie 150kg					

I. Dane techniczne:

Opis wyrobu: stół rehabilitacyjny z ręczną zmianą wysokości leżyska, wykonany z profili stalowych malowanych proszkowo. Leżysko łamane.

	Długość (w cm)	Wysokość (w cm)	Szerokość (w cm)	Zakres regulacji zagłówka	Regulacja kąta łamania leżyska	Waga
Model SR-R2	203 +/- 5%	60 – 92* +/- 5%	70 +/- 5%	-60° + 45° +/- 5°	-	62 kg +/- 3 kg
Model SR-RŁ3	203 +/- 5%	60 – 92* +/- 5%	70 +/- 5%	-60° + 45° +/- 5°	0° - 25° +/- 5°	64 kg +/- 3 kg
Model SM-R7	203 +/- 5%	60 – 92* +/- 5%	70 +/- 5%	-60° + 45° +/- 5°	0° - 45° +/- 5°	0 – 20 +/- 5%

* Opcja dodatkowa: wysokość 50 – 100 cm (dla stołów z elektryczną zmianą wysokości – SR-EŁ3)

Stoły SR-R2 są to stoły dwuczęściowe, stoły SR-RŁ3/ to stoły trzyczęściowe regulowaną częścią leżyska., stoły SM-R7 to stoły 7 częściowe

Maksymalne obciążenie stołów 150kg, maksymalne obciążenie zagłówka 30kg.



Przekroczenie maksymalnego obciążenia podanego przez producenta grozi uszkodzeniem wyrobu i urazem pacjenta!!!

II. Zastosowanie

Stoły rehabilitacyjne umożliwiają prawidłowe, bezpieczne i efektywne prowadzenie zabiegów rehabilitacyjnych, fizjoterapii, fizykoterapii, masażu, mających na celu leczenie lub łagodzenie przebiegu chorób oraz skutków urazów/ upośledzeń.

Stosowane w gabinetach medycznych i lekarskich umożliwiają pacjentom przybranie prawidłowej postawy do przeprowadzenia efektywnego i bezpiecznego zabiegu lub badania. Bezpieczeństwo i efektywność stołów są zapewnione poprzez odpowiednią konstrukcję wyrobu, przeprowadzone testy użytkowe i kliniczne, zastosowanie bezpiecznych materiałów i komponentów zgodnie z wymaganiami europejskich norm dla wyrobów medycznych.

Budowa stołów rehabilitacyjnych pozwala fizjoterapeucie na łatwy i pełny dostęp do pacjenta z każdej strony oraz dołączanie wspomagających akcesoriów, dzięki czemu wszelkiego rodzaju zabiegi przynoszą zamierzony skutek i zapewniają lekarzom, rehabilitantom odpowiednie warunki do prowadzenia zabiegu/ badania.

III. Budowa

Stabilna konstrukcja stalowa malowana proszkowo – rama na stopkach (opcja dodatkowa: system jezdny - 4 skrętne koła). Błat z płyty wiórowej, tapicerowany: otwór w podgłówku z zaślepką. Mechanizm do ręcznej (korba). Regulacja zagłówka (sprężyna gazowa). Regulacja kąta łamania leżyska (korba).

IV. Przygotowanie do pracy/ obsługi

Stół dostarczany jest w stanie zmontowanym, gotowy do użycia.

- Po ustawieniu w miejscu przeznaczenia należy sprawdzić stabilność stołu i wypoziomować go przy pomocy stopek gumowych.
- Ułożenie pacjenta:
Pacjent siada z boku na blat tapicerowany i przyjmuje dogodną pozycję poziomą. Powyższe czynności asekuje opiekun, wyznaczając pacjentowi właściwe ułożenie na stole - po wykonaniu zabiegu pomaga mu bezpiecznie zejść ze stołu.

V. Konserwacja

Konserwacja polega na myciu lub wycieraniu tapicerki stołu na mokro, przy użyciu ogólnodostępnych środków do czyszczenia materiałów skóropodobnych. Nie należy używać rozpuszczalników. Stół może być dezynfekowany środkami ogólnie stosowanymi na bazie: spirytusu, chloraminy, aldesanu. Środki te powinny mieć odpowiednie atesty dopuszczające do stosowania.

VI. Uwagi eksploatacyjne

- Stół przeznaczony jest do zabiegów tylko dla jednej osoby jednocześnie.
- Nie dopuszcza się przenoszenia stołu wraz z pacjentem.
- Zabrania się gwałtownego siadania na stół (wskakiwania).
- Jeżeli pacjent układa się na stole bez ubrania, rehabilitant powinien zastosować podkłady jednorazowe lub zdezynfekować stół.
- Nie należy narażać tapicerki stołu na bezpośredni kontakt z oliwką do masażu lub kremem. W przypadku wykonywania masażu pacjenta na stole, należy używać podkładow jednorazowych, prześcieradeł, okryć higienicznych, itp.**
- Regulacja kąta łamania leżyska przy pomocy korby umieszczonej pod leżyskiem. Podczas opuszczania części środkowej leżyska za pomocą korbki należy zwrócić uwagę na ustawianie korby, aby nie stykała się z poprzeczką stołu.
- Regulacja kąta łamania podgłówka przy pomocy sprężyny gazowej.
- Zabrania się siadania na podgłówki oraz na uniesioną część środkową oraz tylną leżyska!

VII. Zalecenia Wytwórcy

- Użytkować stół zgodnie z instrukcją obsługi.
- Należy zapoznać się z warunkami gwarancji i ich przestrzegać.
- Zalecany jest przegląd wyrobu po dwóch latach.
- Stół nie jest zalecany przy wykonywaniu defibrylacji pacjentów.
- Zabrania się siadania na podgłówki**



Siadanie na zagłówek grozi urwaniem zagłówka i urazem pacjenta!

KARTA GWARANCYJNA

1. Producent zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie sprzętu, na który wydana jest niniejsza gwarancja, w okresie:
 - Konstrukcja metalowa: 2 lata
 - Tapicerka: 1 rok
 - Akcesoria elektryczne/hydrauliczne: 1 rok
2. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w ciągu 14 dni od daty dostarczenia sprzętu do producenta. Koszt transportu pokrywa nabywca.
3. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy, liczony od dnia dostarczenia sprzętu do producenta, do dnia wyznaczonego terminu wykonania naprawy.
4. Nabywcy przysługuje wymiana sprzętu na nowy lub zwrot gotówki w przypadku, gdy:
 - a) producent nie dokona naprawy w ciągu 14 dni od dostarczenia sprzętu
 - b) w okresie gwarancji nastąpi konieczność dokonania 4 napraw, a sprzęt nadal wykazuje wady uniemożliwiające eksploatację zgodną z przeznaczeniem.
5. Wymiana sprzętu na nowy lub zwrot gotówki następuje na podstawie decyzji producenta, po przedstawieniu karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu.
6. Pojęcie „naprawa” nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie.
7. Sposób i zakres naprawy ustala udzielający gwarancji.
8. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia sprzętu powstałe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania, konserwacji, transportu oraz dodatkowo wszelkie uszkodzenia mechaniczne.
9. Ponadto gwarancją nie jest objęta tapicerka, która ma bezpośredni kontakt z wszelkiego rodzaju oliwkami do masażu oraz kremami.
10. Powyższe przyczyny mogą spowodować utratę gwarancji.
11. Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie wykonywania usługi transportowej przez firmę przewozową lub kurierską - obowiązkiem kupującego jest sprawdzenie stanu technicznego przesyłki.
12. Czas życia wyrobu producent określa na 10 lat.
13. Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić do producenta oraz Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

.....
Data sprzedaży

.....
Pieczęć punktu sprzedaży

INSTRUKCJA OBSŁUGI

STÓŁ REHABILITACYJNY MODEL SR-R2,; SR-RŁ3, SM-R7



Wytwórca:
KINESIS Sp. z o.o.
ul. Dworska 19, 38-430 Miejsce Piastowe
tel. 13 435 06 45



Wydanie 03/2024, z dnia 6.12.2024r.