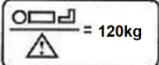


INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przyrządy do ćwiczeń stawu skokowego: Wycinek kuli z sandałami – WK-S; Wycinek walca z sandałami – WW-S; Krzyżak – PS-K

						
Numer seryjny	Wyrób medyczny	Producent	Data produkcji	Zapoznać się z instrukcją obsługi	Oznakowanie CE	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu
						
Ostrzeżenie	Maksymalne obciążenie 120kg					

1. Przeznaczenie

Przyrządy przeznaczone są do wykonywania ćwiczeń stawu skokowego oraz ćwiczeń równowagi u pacjentów po stanach urazowych kończyn dolnych, po stanach reumatologicznych i w stanach neurologicznych. Stosowane są w warunkach szpitalnych: w salach rehabilitacyjnych, oddziałach chirurgicznych, neurologicznych jak również w przychodniach rehabilitacyjnych, ośrodkach zdrowia. Celem ich stosowania jest leczenie lub łagodzenie przebiegu chorób oraz łagodzenie skutków urazów i upośledzeń.

2. Budowa

Wycinek kuli z sandałami – WK-S

Wycinek walca z sandałami – WW-S

Wycinek kuli; walca z sandałami wykonany jest z litego drewna, a blat ze sklejk – całość pokryta lakierem bezbarwnym. Sandały wykonane ze sklejki ze skórzanym zapiętkiem i paskami z rzepami, przykręcone na stałe do blatu.

Przyrządy do ćwiczeń stawu skokowego – PS-K

Krzyżak wykonany jest ze stali ST3S. Wspornik i sandał pokryte są lakierem proszkowym, a pozostałe elementy posiadają galwaniczną powłokę cynkową. Całość wspiera się na czterech regulowanych stopkach gumowych.

Wymiar:

Przyrządy do ćwiczeń stawu skokowego PS-K długość 60cm, wysokość 35cm, szerokość 40cm, waga 8kg, obciążenie 4x0,5kg W

Wycinek kuli z sandałami – WK-S: średnica 49,5 cm, wysokość 16cm, waga 2,5kg

Wycinek walca z sandałami – WW-S: długość 30cm, szerokość 30cm, wysokość 15cm, waga 1,8kg

3. Dezynfekcja i Konserwacja

Konserwacja polega na myciu i wycieraniu miękką zwilżoną szmatką z dodatkiem detergentów. Nie należy dopuszczać do zawilgocenia elementów przyrządów.

Elementy pokryte powłokami galwanicznymi pokryć cienką warstwą wazeliny aptecznej i wytrzeć do sucha.

Nie używać środków konserwujących i zmiękczejących skórę do konserwacji pasków skórzanych. Elementy wyrobów mogą być dezynfekowane środkami ogólnie stosowanymi na bazie spirytusu, chloraminy, aldesanu. Środki te powinny posiadać odpowiednie atesty dopuszczające do stosowania.

Wykaz przykładowych środków dezynfekujących:

„Bechtozoid” spray

„Surfasept” producent Iodex S.A. Polska,

„Chlorizol” producent Septoma Polska.

Środki należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta.

4. Stosowanie

Wycinek kuli z sandałami – WK-S ; Wycinek walca z sandałami – WW-S

- ustawić przyrząd w pobliżu drabinki rehabilitacyjnej lub poręczy zamontowanej np. do ściany na odległość wyciągniętych rąk,
- ustawić w pobliżu przyrządu krzesło lub taboret, który umożliwi prawidłowe ustawienie stóp na przyrządzie i ewentualne zapięcie ich w sandałach
- w początkowym okresie rehabilitacji ćwiczenia można wykonywać w pozycji siedzącej, następnie w pozycji stojącej – wskazane jest wtedy, aby pacjent trzymał się drabinki lub poręczy

Krzyżak – PS-K

Ćwiczenia są wykonywane na siedząco.

Niezbędne jest dla pacjenta wysokie krzesło z podparciem.

Krzyżak należy wypoziomować i ustabilizować przy pomocy stopek regulacyjnych – przyrząd nie może się kołysać.

Obrócenie blokady pod belką ruchomą w lewo do oporu powoduje zablokowanie obrotu belki ruchomej wokół osi kostki pacjenta – obrót w przeciwnym kierunku spowoduje zwolnienie blokady. Śruba wkręcona w belkę pod sandałem blokuje jego obrót wokół osi wzdłużnej stopy. Aby zwolnić tę blokadę należy pokręcić tą śrubą w lewo o ok. 5 obrotów.

Wykonywanie ćwiczeń stawu skokowego można zintensyfikować poprzez dawkowanie obciążenia w wybranych kierunkach nakładając na sworznie krzyżaka ciężarki o wadze 1 kg.

5. Zalecenia

- Użytkować wyrób zgodnie z instrukcją obsługi,
- Zapoznać się z warunkami gwarancji i ich przestrzegać

KARTA GWARANCYJNA

1. Producent zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie sprzętu, na który wydana jest niniejsza gwarancja, w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
2. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w ciągu 14 dni od daty dostarczenia sprzętu do producenta. Koszt transportu pokrywa nabywca.
3. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy, liczony od dnia dostarczenia sprzętu do producenta, do dnia wyznaczonego terminu wykonania naprawy.
4. Nabywcy przysługuje wymiana sprzętu na nowy lub zwrot gotówki w wypadku, gdy:
 - a) producent nie dokona naprawy w ciągu 14 dni od dostarczenia sprzętu,
 - b) w okresie gwarancji nastąpi konieczność dokonania 3 napraw, a sprzęt nadal wykazuje wady uniemożliwiające eksploatację zgodną z przeznaczeniem.
5. Wymiana sprzętu na nowy lub zwrot gotówki następuje na podstawie decyzji producenta po przedstawieniu karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu.
6. Pojęcie „naprawa” nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania, których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie.
7. Sposób i zakres naprawy ustala udzielający gwarancji.
8. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia sprzętu powstałe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania, konserwacji, transportu oraz dodatkowo wszelkie uszkodzenia mechaniczne.
9. Powyższe przyczyny mogą spowodować utratę gwarancji.
10. Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie wykonywania usługi transportowej przez firmę przewozową lub kurierską, obowiązkiem kupującego jest sprawdzenie stanu technicznego przesyłki.
11. **Czas życia wyrobu producent określa na 10 lat.**
12. Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić do producenta, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

.....
Data sprzedaży

.....
Pieczęć punktu sprzedaży

KINESIS

producent sprzętu do fizjoterapii

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przyrządy do ćwiczeń stawu skokowego:

Wycinek kuli z sandałami – WK-S

Wycinek walca z sandałami – WW-S

Przyrządy do ćwiczeń stawu skokowego – PS-K



Wytwórca:

Biuro Handlowe KINESIS Andrzej Boruta
ul. Penara 23, 38-440 Iwonicz-Zdrój
tel. 13 435 06 45



Wydanie 02/2024, z dnia 4.12.2024