

KARTA GWARANCYJNA

1. Producent zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie sprzętu, na który wydana jest niniejsza gwarancja, w okresie:
 - konstrukcja metalowa: 2 lata
 - tapicerka: 1 rok
2. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w ciągu 14 dni od daty dostarczenia sprzętu do producenta. Koszt transportu pokrywa nabywca.
3. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy, liczony od dnia dostarczenia sprzętu do producenta, do dnia wyznaczonego terminu wykonania naprawy.
4. Nabywcy przysługuje wymiana sprzętu na nowy lub zwrot gotówki w przypadku, gdy:
 - a) producent nie dokona naprawy w ciągu 14 dni od dostarczenia sprzętu,
 - b) w okresie gwarancji nastąpi konieczność dokonania 4 napraw, a sprzęt nadal wykazuje wady uniemożliwiające eksploatację zgodną z przeznaczeniem.
5. Wymiana sprzętu na nowy lub zwrot gotówki następuje na podstawie decyzji producenta, po przedstawieniu karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu.
6. Pojęcie „naprawa” nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie.
7. Sposób i zakres naprawy ustala udzielający gwarancji.
8. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia sprzętu powstałe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania, konserwacji, transportu oraz dodatkowo wszelkie uszkodzenia mechaniczne.
9. Ponadto gwarancją nie jest objęta tapicerka, która ma bezpośredni kontakt z wszelkiego rodzaju oliwkami do masażu oraz kremami.
10. Powyższe przyczyny mogą spowodować utratę gwarancji.
11. Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie wykonywania usługi transportowej przez firmę przewozową lub kurierską obowiązkiem kupującego jest sprawdzenie stanu technicznego przesyłki.
12. Czas życia wyrobu producent określa na 10 lat.
13. Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić do producenta oraz Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

.....
Data sprzedaży

.....
Pieczęć punktu sprzedaży

KINESIS

producent sprzętu do fizjoterapii

INSTRUKCJA OBSŁUGI STOŁY DO PIONIZACJI MODEL: SP-R, SP-E1, SP-E2



Wytwórca:

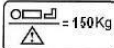


Biuro Handlowe KINESIS Andrzej Boruta
ul. Penara 23, 38-440 Iwonicz-Zdrój
tel. 13 435 06 45

INSTRUKCJA OBSŁUGI

STÓŁ DO PIONIZACJI, model: SP-R, SP-E1, SP-E2

Oznaczenia i symbole na instrukcji obsługi oraz etykiecie wyrobu

						
Numer seryjny	Wyrób medyczny	Producent	Data produkcji	Zapoznać się z instrukcją obsługi	Oznakowanie CE	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu
						
Ostrzeżenie	Maksymalne obciążenie 150kg					

Dane techniczne

Opis wyrobu - stół do pionizacji 1-częściowy z ręczną lub elektryczną zmianą kąta nachylenia leżyska, wykonany z profili stalowych malowanych proszkowo. W zestawie 3 pasy stabilizacyjne.

	SP-R	SP-E1	SP-E2
Wymiary całkowite (dł. x szer.):	201x68cm	201x68cm	201x68cm
Wymiary leżyska (dł. x szer.):	196x60cm	196x60cm	196x60cm
Wysokość:	85cm	85cm	50-90cm
Wysokość leżyska w pozycji pionowej:	204cm	204cm	204cm
Regulacja kąta nachylenia leżyska	od 0 do +90°	od 0 do +90°	od 0 do +90°
Sposób regulacji	Ręczna za pomocą korby	Elektryczna za pomocą pilota	Elektryczna za pomocą pilota
Waga:	63kg	65kg	95kg
Maksymalne obciążenie:	150kg	150kg	150kg

Dane techniczne siłownika elektrycznego Dewert: zasilanie 240 V ~ 50 / 60 Hz; obciążenie max 6000 N; moc znamionowa: max 3,15 A;



Przekroczenie maksymalnego obciążenia podanego przez producenta grozi uszkodzeniem wyrobu i urazem pacjenta!!!



Stół pionizacyjny model:
SP-R



Stół pionizacyjny model:
SP-E1



Stół pionizacyjny model:
SP-E2

Uwagi eksploatacyjne

1. Stół przeznaczony jest do zabiegów tylko dla jednej osoby jednocześnie.
2. Nie dopuszcza się przenoszenia stołu wraz z pacjentem.
3. Zabrania się gwałtownego siadania na stół (wskakiwania).
4. Siadanie na górnej części stołu podczas pionizowania jest zabronione.
5. Jeżeli pacjent układa się na stole bez ubrania, rehabilitant powinien zastosować podkłady jednorazowe lub zdezynfekować stół.

Zalecenia Wytwórcy

1. Użytkować stół zgodnie z instrukcją obsługi.
2. Należy zapoznać się z warunkami gwarancji i ich przestrzegać.
3. Zalecany jest przegląd wyrobu po dwóch latach.
4. Stół nie jest zalecany przy wykonywaniu defibrylacji pacjentów.

Zastrzeżenia do gwarancji

Gwarancja nie są objęte:

- o Uszkodzenia wynikające z nieprzestrzegania wyżej wymienionych reguł;
- o Uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania, niewłaściwej i nieregularnej konserwacji;
- o Różnice w kolorystyce tapicerki, wynikające z wystawienia stołu na działanie promieni słonecznych;

Zastosowanie

Stoły z grupy SP wykorzystywane są do pionizacji pacjentów po długotrwałym unieruchomieniu, z porażeniami, licznymi przypadkami pooperacyjnymi oraz do leczenia ciężkich stanów urazowych rdzenia kręgowego. Stoły mogą być również wykorzystywane do leczenia dzieci z wadami postawy oraz porażeniem mózgowym.

Przeznaczone są dla pacjentów leżących w szpitalu, zakładzie opieki, do stopniowego przemieszczania chorego z pozycji leżącej do pionizowanej. Pacjent może wesprzeć się na regulowanych uchwytach.

Bezpieczeństwo i efektywność stołów zapewnione są poprzez odpowiednią konstrukcję wyrobu, przeprowadzone testy użytkowe, zastosowanie bezpiecznych materiałów i komponentów, zgodnie z wymaganiami europejskich norm dla wyrobów medycznych.

Budowa stołów pozwala fizjoterapeucie na łatwy i pełny dostęp do pacjenta z każdej strony oraz dołączanie wspomagających akcesoriów, dzięki czemu

wszelkiego rodzaju zabiegi przynoszą zamierzony skutek i zapewniają lekarzom, rehabilitantom odpowiednie warunki do prowadzenia zabiegu/ badania.

Budowa

1. Błat z płyty wiórowej tapicerowany
2. Konstrukcja nośna (rama z profili stalowych)
3. Stopki
4. Pasy stabilizacyjne – 3 szt.

Wypożyczenie dodatkowe:

1. Mechanizm jezdny – 4 kółka
2. Stabilizacja stóp - sandały

Bezpieczeństwo

1. Przed podłączeniem wtyczki do gniazda upewnij się, że:
 - Gniazdko jest odpowiednio uziemione i odpowiada obowiązującym przepisom;
 - Napięcie w sieci jest zgodne z danymi podanymi w tabeli „Dane techniczne”;
 - Gniazdko odpowiada wtyczce;
2. Kabel zasilania może być wymieniany i naprawiany, jedynie przez uprawnionego specjalistę.
3. Nie należy samodzielnie dokonywać żadnych napraw siłowników i kabli elektrycznych.
4. Kabel zasilacza nie powinien być zaginany, może to skutkować jego uszkodzeniem.
5. Unikać bezpośredniego wystawiania stołu na warunki pogodowe, tj. nasłonecznienie, opady, promieniowanie UV, wilgoć.
6. Należy przestrzegać dopuszczalnego, maksymalnego obciążenia.
7. Przed przystąpieniem do zabiegów pionizacji należy dokładnie przymocować pacjenta do leżyska za pomocą pasów stabilizujących.
8. Podczas pionizacji zabrania się siadania na blacie stołu.
9. Przed zabiegiem pionizacji należy podnieść leżysko stołu, aby uniknąć uszkodzenia podnóżka oraz leżyska.



Przekroczenie wartości maksymalnego obciążenia grozi uszkodzeniem stołu i może spowodować uraz pacjenta.

10. Zabrania się siadania na podgłówek.



Siadanie w miejscach niedozwolonych grozi uszkodzeniem stołu i może spowodować uraz pacjenta.

Producent uchyla się od odpowiedzialności w przypadku nie przestrzegania powyższych zasad.

Warunki przechowywania

Urządzenie powinno być przechowywane w warunkach pokojowych, w zamkniętych pomieszczeniach. Unikać narażania stołu na warunki pogodowe. Podłoże powinno być równe i stabilne.



Umieszczenie stołu na nierównej powierzchni może skutkować jego przewróceniem się.

Przygotowanie do pracy/ obsługa

Stół jest dostarczany w stanie zmontowanym, gotowy do użycia.

1. Po ustawieniu w miejscu przeznaczenia należy sprawdzić stabilność stołu oraz wypoziomować go przy pomocy stopek gumowych. W przypadku stołu z systemem jednym, należy ustawić stół w miejscu przeznaczenia oraz zablokować kółka.
2. Po wykonaniu w/w czynności stół jest przygotowany do pracy. Zmiana kąta leżyska odbywa się przy pomocy korby.

UWAGA: PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PIONIZACJI PACJENTA, NALEŻY GO DOKŁADNIE PRZYMOCOWAĆ DO LEŻYSKA PRZY POMOCY PASÓW STABILIZACYJNYCH BĘDĄCYCH WYPOSAŻENIEM STOŁU! SIADANIE NA GÓRNEJ CZĘŚCI STOŁU PODCZAS PIONIZOWANIA JEST ZABRONIONE!

Tapicerka

Tapicerka stołu SP wykonana jest z materiału skóropodobnego. W celu odpowiedniego użytkowania należy przestrzegać następujących reguł:

- Tapicerkę należy czyścić regularnie, środkami przeznaczonymi do tego typu powierzchni;
- Należy unikać kontaktu tapicerki z tłustymi substancjami; W tym celu należy stosować okrycia olejoodporne lub nieprzemakalne prześcieradła.
- Zabrudzenia powstałe w wyniku kontaktu tapicerki z substancjami tłustymi, tj. olejkami czy kremami, należy natychmiast usunąć za pomocą łagodnego detergentu (np. mydło i ciepła woda) i miękkiej gąbki lub szmatki;
- Tapicerka powinna być przechowywana i użytkowana z daleka od źródeł ognia, ciepła i nie powinna być narażana na działanie warunków pogodowych;
- Bezwzględnie zabrania się przebijania tapicerki ostrymi przedmiotami, prasowania, chlorowania czy prania.

W razie potrzeby, tapicerkę można dezynfekować środkami do tego przeznaczonymi, nie powodującymi uszkodzenia materiału.

W przypadku nie stosowania wyżej wymienionych punktów producent zastrzega sobie prawo do nie respektowania gwarancji.