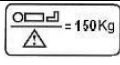


INSTRUKCJA OBSŁUGI KOZETKI LEKARSKIE - modele: KZ, KZ 2

Oznaczenia i symbole na instrukcji obsługi oraz etykiecie wyrobu

						
Numer seryjny	Wyrób medyczny	Producent	Data produkcji	Zapoznać się z instrukcją obsługi	Oznakowanie CE	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu
						
Ostrzeżenie	Maksymalne obciążenie 150kg					

I. Dane techniczne:

	Długość (w cm)	Szerokość (w cm)	Wysokość (w cm)	Regulacja zagłówka (w °)	Waga	Max obciążenie leżyska	Max obciążenie zagłówka
Kozetka KZ z profili	180 +/- 5%	61 +/- 5%	61 +/- 5%	-60° + 50° +/- 5°	30kg +/- 3kg	150kg	30kg
Kozetka KZ 2 z rur stalowych	180 +/- 5%	61 +/- 5%	51 +/- 5%	-60° + 50° +/- 5°	30kg +/- 3kg	150kg	30kg



Przekroczenie maksymalnego obciążenia podanego przez producenta grozi uszkodzeniem wyrobu i urazem pacjenta!!!

II. Zastosowanie

Kozetka lekarska umożliwia prawidłowe, bezpieczne i efektywne prowadzenie diagnostyki pacjenta jak również zabiegów rehabilitacyjnych, fizjoterapii, fizykoterapii, masażu mających na celu leczenie/ łagodzenie przebiegu chorób oraz skutków urazów i upośledzeń.

Stosowane w gabinetach medycznych i lekarskich umożliwiają pacjentom przybranie prawidłowej postawy do przeprowadzenia efektywnego i bezpiecznego procesu badania i diagnostyki. Bezpieczeństwo kozetki jest zapewnione poprzez odpowiednią konstrukcję wyrobu, zastosowanie bezpiecznych materiałów i komponentów zgodnie z wymaganiami europejskich norm dla wyrobów medycznych.

III. Budowa

Błat z płyty wiórowej, tapicerowany (skaj). Konstrukcja metalowa. Zagłówek regulowany.

IV. Przygotowanie do pracy/ obsługa

- Po ustawieniu kozetki w miejscu przeznaczenia należy sprawdzić, czy stoi stabilnie na podłożu.
- Ułożenie pacjenta: pacjent siada z boku na blat tapicerowany i przyjmuje dogodną pozycję poziomą. Powyższe czynności asekuje opiekun, wyznaczając pacjentowi właściwe ułożenie na kozetce - po wykonaniu zabiegu pomaga mu bezpiecznie zejść z kozetki.

V. Konserwacja

Konserwacja polega na myciu lub wycieraniu tapicerki kozetki na mokro, przy użyciu ogólnodostępnych środków do czyszczenia materiałów skóropodobnych. Nie należy używać rozpuszczalników. Leżanka może być dezynfekowana środkami ogólnie stosowanymi na bazie: spirytusu, chloraminy, aldesanu. Środki te powinny mieć odpowiednie atesty dopuszczające do stosowania.

VI. Uwagi eksploatacyjne

- Kozetka przeznaczona jest do zabiegów tylko dla jednej osoby jednocześnie.
- Nie dopuszcza się przenoszenia kozetki wraz z pacjentem.
- Zabrania się gwałtownego siadania na kozetkę (wskakiwania).
- Jeżeli pacjent układa się na kozetkę bez ubrania, rehabilitant powinien zastosować podkłady jednorazowe lub zdezynfekować kozetkę.
- Nie należy narażać tapicerki kozetki na bezpośredni kontakt z oliwką do masażu lub kremem. W przypadku wykonywania masażu pacjenta na kozetce należy używać podkładów jednorazowych, prześcieradeł, okryć higienicznych itp.**
- Zabrania się siadania na podgłówek

VII. Zalecenia Wytwórcy

- Użytkować kozetkę zgodnie z instrukcją obsługi.
- Należy zapoznać się z warunkami gwarancji i ich przestrzegać.
- Zalecany jest przegląd wyrobu po dwóch latach.
- Zabrania się siadania na podgłówek**



Siadanie na zagłówek grozi urwaniem zagłówka i urazem pacjenta!

KARTA GWARANCYJNA

1. Producent zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie sprzętu, na który wydana jest niniejsza gwarancja, w okresie:
 - Konstrukcja metalowa: 2 lata
 - Tapicerka: 1 rok
2. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w ciągu 14 dni od daty dostarczenia sprzętu do producenta. Koszt transportu pokrywa nabywca.
3. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy, liczony od dnia dostarczenia sprzętu do producenta, do dnia wyznaczonego terminu wykonania naprawy.
4. Nabywcy przysługuje wymiana sprzętu na nowy lub zwrot gotówki w przypadku, gdy:
 - a) producent nie dokona naprawy w ciągu 14 dni od dostarczenia sprzętu
 - b) w okresie gwarancji nastąpi konieczność dokonania 4 napraw, a sprzęt nadal wykazuje wady uniemożliwiające eksploatację zgodną z przeznaczeniem.
5. Wymiana sprzętu na nowy lub zwrot gotówki następuje na podstawie decyzji producenta po przedstawieniu karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu.
6. Pojęcie „naprawa” nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie.
7. Sposób i zakres naprawy ustala udzielający gwarancji.
8. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia sprzętu powstałe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania, konserwacji, transportu oraz dodatkowo wszelkie uszkodzenia mechaniczne.
9. Ponadto gwarancją nie jest objęta tapicerka, która ma bezpośredni kontakt z wszelkiego rodzaju oliwkami do masażu oraz kremami.
10. Powyższe przyczyny mogą spowodować utratę gwarancji.
11. Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie wykonywania usługi transportowej przez firmę przewozową lub kurierską - obowiązkiem kupującego jest sprawdzenie stanu technicznego przesyłki.
12. Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić do producenta, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

.....
Data sprzedaży

.....
Pieczęć punktu sprzedaży

INSTRUKCJA OBSŁUGI KOZETKA LEKARSKA

modele: KZ, KZ 2



Wytwórca:
KINESIS Sp z o.o
Ul. Dworska 19
38-430 Miejsce Piastowe
Tel. 13 43 506 45



Wydanie 03/2024, z dnia 6.12.2024