

## KARTA GWARANCYJNA

1. Producent zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie sprzętu, na który wydana jest niniejsza gwarancja, w okresie:
  - Konstrukcja drewniana: 2 lata
  - Tapicerka: 1 rok
2. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w ciągu 14 dni od daty dostarczenia sprzętu do producenta. Koszt transportu pokrywa nabywca.
3. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy, liczony od dnia dostarczenia sprzętu do producenta, do dnia wyznaczonego terminu wykonania naprawy.
4. Nabywcy przysługuje wymiana sprzętu na nowy lub zwrot gotówki w przypadku, gdy:
  - a) producent nie dokona naprawy w ciągu 14 dni od dostarczenia sprzętu,
  - b) w okresie gwarancji nastąpi konieczność dokonania 4 napraw, a sprzęt nadal wykazuje wady uniemożliwiające eksploatację zgodną z przeznaczeniem.
5. Wymiana sprzętu na nowy lub zwrot gotówki następuje na podstawie decyzji producenta po przedstawieniu karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu.
6. Pojęcie „naprawa” nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania, których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie.
7. Sposób i zakres naprawy ustala udzielający gwarancji.
8. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia sprzętu powstałe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania, konserwacji, transportu oraz dodatkowo wszelkie uszkodzenia mechaniczne.
9. Ponadto gwarancją nie jest objęta tapicerka, która ma bezpośredni kontakt z wszelkiego rodzaju oliwkami do masażu oraz kremami.
10. Powyższe przyczyny mogą spowodować utratę gwarancji.
11. Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie wykonywania usługi transportowej przez firmę przewozową lub kurierską obowiązkiem kupującego jest sprawdzenie stanu technicznego przesyłki.
12. Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
13. Czas życia wyrobu wynosi 10 lat.

.....  
Data sprzedaży

.....  
Pieczęć punktu sprzedaży

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

### LEŻANKI DO FIZYKOTERAPII MODELE: KLD1, KLD2, KLD3

KLD1



KLD2



KLD3



**Wytwórca:**  
KINESIS Sp. z o.o.  
Ul. Dworska 19; 38-430 Miejsce Piastowe



Wydanie 03/2024, z dnia 6.12.2024

## INSTRUKCJA OBSŁUGI LEŻANKI DREWNIANE - modele: KLD1, KLD2, KLD3

*Oznaczenia i symbole na instrukcji obsługi oraz etykiecie wyrobu*

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |
| Numer seryjny                                                                     | Wyrób medyczny                                                                    | Producent                                                                         | Data produkcji                                                                    | Zapoznać się z instrukcją obsługi                                                 | Oznakowanie CE                                                                    | Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu                                          |
|  |  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Ostrzeżenie                                                                       | Maksymalne obciążenie 200kg                                                       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |

### I. Dane techniczne:

| DANE TECHNICZNE:                        | KLD1       | KLD2       | KLD3              |
|-----------------------------------------|------------|------------|-------------------|
| Długość:                                | 180 cm     | 195 cm     | 195 cm            |
| Wysokość:                               | 65 cm      | 67 cm      | 67 cm             |
| Szerokość:                              | 61 cm      | 66 cm      | 66 cm             |
| Wysokość tapicerki:                     | 5 cm       | 7 cm       | 7 cm              |
| Ręcznie regulowany zagłówek w zakresie: | 0° lub 35° | 0° lub 35° | 0° +35° (skokowo) |
| Waga:                                   | 30 kg      | 32 kg      | 32 kg             |
| Maksymalne obciążenie:                  | 200 kg     | 200 kg     | 200 kg            |
| WYPOSAŻENIE:                            |            |            |                   |
| Otwór na twarz:                         | opcja      | ✓          | ✓                 |
| Uchwyt na papier:                       | opcja      | opcja      | opcja             |



Przekroczenie maksymalnego obciążenia podanego przez producenta grozi uszkodzeniem wyrobu i urazem pacjenta!!!

### II. Zastosowanie

Leżanki KLD przeznaczone są do zabiegów rehabilitacyjnych, inhalacji, masażu, fizykoterapii.

### III. Budowa

Konstrukcja z drewna bukowego. Elementy konstrukcyjne łączone przy pomocy śrub cynkowanych M6 x 70. Materac tapicerowany - pianka poliuretanowa, skaj. Regulowany zagłówek. Otwór na twarz w modelach KLD2 i KLD3.

Wypożyczenie dodatkowe: mocowany z tyłu wieszak na ręcznik papierowy i wycięcie na twarz w zagłówku (KLD1).

### IV. Przygotowanie leżanki do użytkowania

1. Leżanki dostarczane są zmontowane. Po rozpakowaniu są gotowe do użytku. Po ustawieniu leżanki w miejscu przeznaczenia należy sprawdzić, czy stoi stabilnie na podłożu.
2. Leżanki powinny być używane zgodnie z opisanym przeznaczeniem. W szczególności zabrania się wskakiwania na leżankę, chodzenia po leżance.

### 3. Ułożenie pacjenta:

Pacjent siada z boku na blat tapicerowany i przyjmuje dogodną pozycję poziomą. Powyższe czynności asekuruje opiekun, wyznaczając pacjentowi właściwe ułożenie na leżance – po wykonaniu zabiegu pomaga mu bezpiecznie zejść z leżanki.

### V. Konserwacja

Konserwacja polega na myciu lub wycieraniu tapicerki stołu na mokro, przy użyciu ogólnodostępnych środków do czyszczenia materiałów skóropodobnych. Nie należy używać rozpuszczalników. Stół może być dezynfekowany środkami ogólnie stosowanymi na bazie: spirytusu, chloraminy, aldesanu. Środki te powinny mieć odpowiednie atesty dopuszczające do stosowania.

### VI. Uwagi eksploatacyjne

1. Leżanka przeznaczona jest do zabiegów tylko dla jednej osoby jednocześnie
2. Nie dopuszcza się przenoszenia leżanki wraz z pacjentem
3. Zabrania się gwałtownego siadania na leżankę (wskakiwania)
4. Jeżeli pacjent uklada się na leżance bez ubrania, rehabilitant powinien zastosować podkłady jednorazowe lub zdezynfekować leżankę
5. **Nie należy narażać tapicerki leżanki na bezpośredni kontakt z oliwką do masażu lub kremem. W przypadku wykonywania masażu pacjenta na leżance należy używać podkładów jednorazowych, prześcieradeł, okryć higienicznych itp.**
6. Zabrania się siadania na podgłówki

### VII. Zalecenia Wytwórcy

1. Należy użytkować leżankę zgodnie z instrukcją obsługi.
2. Należy zapoznać się z warunkami gwarancji i ich przestrzegać.
3. Zalecany jest przegląd wyrobu po dwóch latach.
4. **Zabrania się siadania na podgłówki**

Siadanie na zagłówek grozi urwaniem zagłówka i urazem pacjenta!

