

KARTA GWARANCYJNA

1. Producent zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie sprzętu, na który wydana jest niniejsza gwarancja, w okresie:
 - Konstrukcja drewniana: 2 lata
 - Tapicerka: 1 rok
2. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w ciągu 14 dni od daty dostarczenia sprzętu do producenta. Koszt transportu pokrywa nabywca.
3. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy, liczony od dnia dostarczenia sprzętu do producenta, do dnia wyznaczonego terminu wykonania naprawy.
4. Nabywcy przysługuje wymiana sprzętu na nowy lub zwrot gotówki w przypadku, gdy:
 - a) producent nie dokona naprawy w ciągu 14 dni od dostarczenia sprzętu
 - b) w okresie gwarancji nastąpi konieczność dokonania 4 napraw, a sprzęt nadal wykazuje wady uniemożliwiające eksploatację zgodną z przeznaczeniem.
5. Wymiana sprzętu na nowy lub zwrot gotówki następuje na podstawie decyzji producenta po przedstawieniu karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu.
6. Pojęcie „naprawa” nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie.
7. Sposób i zakres naprawy ustala udzielający gwarancji.
8. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia sprzętu powstałe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania, konserwacji, transportu oraz dodatkowo wszelkie uszkodzenia mechaniczne.
9. Ponadto gwarancją nie jest objęta tapicerka, która ma bezpośredni kontakt z wszelkiego rodzaju oliwkami do masażu oraz kremami.
10. Powyższe przyczyny mogą spowodować utratę gwarancji.
11. Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie wykonywania usługi transportowej przez firmę przewozową lub kurierską - obowiązkiem kupującego jest sprawdzenie stanu technicznego przesyłki.
12. Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić do producenta oraz Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
13. Czas życia wyrobu wynosi 10 lat.

.....
Data sprzedaży

.....
Pieczęć punktu sprzedaży

INSTRUKCJA OBSŁUGI

LEŻANKA DREWNIANA DO FIZYKOTERAPII

modele: ROMA O, ROMA B, ROMA 1-O, ROMA 1-B,
ROMA 2-O, ROMA 2-B, ROMA 3-O, ROMA 3-B



Wytwórca:
KINESIS Sp. z o.o.
ul. Dworska 19, 38-430 Miejsce Piastowe
tel. 13 435 06 45



Wydanie 03/2024, z dnia 6.12.2024

INSTRUKCJA OBSŁUGI - LEŻANKI DREWNIANE

modele: ROMA 1-O, ROMA 1-B, ROMA 2-O, ROMA 2-B, ROMA 3-O, ROMA 3-B

Oznaczenia i symbole na instrukcji obsługi oraz etykiecie wyrobu

Numer seryjny	Wyrób medyczny	Producent	Data produkcji	Zapoznać się z instrukcją obsługi	Oznakowanie CE	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu
Ostrzeżenie	Maksymalne obciążenie 200kg					



Przekroczenie maksymalnego obciążenia podanego przez producenta grozi uszkodzeniem wyrobu i urazem pacjenta!!!

I. Dane techniczne:

model	ROMA O/ ROMA B	ROMA 1-O/ ROMA 1-B	ROMA 2-O/ ROMA 2-B	ROMA 3-O/ ROMA 3-B
Długość	180 cm	189 cm	189 cm	189 cm
Szerokość	65 cm	67 cm	77 cm	67 cm
Wysokość regulowana skokowo	57-77cm	63-73 cm	63-73 cm	63-73 cm
Regulowany zagłówek	-	-	0°+50°	0°+50°
Regulacja kąta łamania leżyska	-	-	-	0°+25°
Waga	25 kg	34 kg	34 kg	34 kg
Maksymalne obciążenia	200 kg	200 kg	200 kg	200 kg

Roma B – kolor drewna: buk

Roma O – kolor drewna: orzech laskowy

Roma 1 – leżanka 1-częściowa

Roma 2 – leżanka 2-częściowa

Roma 3 – leżanka 3-częściowa

Wyposażenie dodatkowe: półwałek 50 x 20 x 12 cm pod głowę w kolorze wybranej tapicerki.

II. Zastosowanie

Leżanki drewniane do fizykoterapii umożliwiają prawidłowe, bezpieczne i efektywne prowadzenie zabiegów rehabilitacyjnych, fizjoterapii, fizykoterapii, masażu, mających na celu leczenie/ łagodzenie przebiegu chorób oraz skutków urazów/ upośledzeń. Ze względu na brak elementów metalowych zaleca się stosowanie leżanki w badaniu EKG.

Stosowane w gabinetach medycznych i lekarskich, umożliwiają pacjentom przybranie prawidłowej postawy do przeprowadzenia efektywnego i bezpiecznego zabiegu lub badania. Bezpieczeństwo i efektywność leżanek są zapewnione poprzez odpowiednią konstrukcję

wyrobu, przeprowadzone testy użytkowe i kliniczne, zastosowanie bezpiecznych materiałów i komponentów zgodnie z wymaganiami europejskich norm dla wyrobów medycznych. Budowa stołów rehabilitacyjnych pozwala fizjoterapeucie na łatwy i pełny dostęp do pacjenta z każdej strony oraz dołączanie wspomagających akcesoriów, dzięki czemu wszelkiego rodzaju zabiegi przynoszą zamierzony skutek i zapewniają lekarzom, rehabilitantom odpowiednie warunki do prowadzenia zabiegu/ badania.

III. Budowa

Błat z płyty wiórowej, tapicerowany. Stelaż drewniany. Mechanizm zmiany kąta nachylenia blatu (ROMA 2-B, ROMA 2-O, ROMA 3-B, ROMA 3-O)

IV. Przygotowanie do pracy/ obsługa

- Po ustawieniu leżanki w miejscu przeznaczenia sprawdzić, czy stoi stabilnie na podłożu.
- Ułożenie pacjenta:
Pacjent siada z boku na blat tapicerowany i przyjmuje dogodną pozycję poziomą. Powyższe czynności asekuje opiekun, wyznaczając pacjentowi właściwe ułożenie na leżance - po wykonaniu zabiegu pomaga mu bezpiecznie zejść z leżanki.

V. Konserwacja

Konserwacja polega na myciu lub wycieraniu tapicerki leżanki na mokro, przy użyciu ogólnodostępnych środków do czyszczenia materiałów skóropodobnych. Nie należy używać rozpuszczalników. Leżanka może być dezynfekowana środkami ogólnie stosowanymi na bazie: spirytusu, chloraminu, aldesanu. Środki te powinny mieć odpowiednie atesty dopuszczające do stosowania.

VI. Uwagi eksploatacyjne

- Leżanka przeznaczona jest do zabiegów tylko dla jednej osoby jednocześnie.
- Nie dopuszcza się przenoszenia leżanki wraz z pacjentem.
- Zabrania się gwałtownego siadania na leżankę (wskakiwania).
- Jeżeli pacjent uклада się na stole bez ubrania, rehabilitant powinien zastosować podkłady jednorazowe lub zdezynfekować stół.
- Nie należy narażać tapicerki leżanki na bezpośredni kontakt z oliwką do masażu lub kremem. W przypadku wykonywania masażu pacjenta na leżance należy używać podkładów jednorazowych, prześcieradeł, okryć higienicznych itp.**
- Zabrania się siadania na podgłówek!

VII. Zalecenia Wytwórcy

- Użytkować leżankę zgodnie z instrukcją obsługi.
- Należy zapoznać się z warunkami gwarancji i ich przestrzegać.
- Zalecany jest przegląd wyrobu po dwóch latach.
- Zabrania się siadania na podgłówek**



Siadanie na zagłówek grozi urwaniem zagłówka i urazem pacjenta!