



INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU

Wydanie VIII z 20.05.2021

**Przyrządy do ćwiczeń stawu skokowego – wycinek kuli
Typ PS-K, PS-K2, PS-K-T**



TECH-MED Roman Paślawski s.j.
ul .Oleska 117
45-233 OPOLE
tel. 77 4551178

Opole 2025 r.

2

Spis treści

	Strona
1. Przeznaczenie i zastosowanie-----	2
2. Opis techniczny-----	2
3. Przygotowanie przyrządu do pracy -----	2
4. Konserwacja-----	2
5. Dezynfekcja-----	2

1. Przeznaczenie i zastosowanie.

Przyrządy te przeznaczone są do ćwiczeń stawu skokowego oraz ćwiczeń równowagi u pacjentów po stanach urazowych kończyn dolnych, po stanach reumatologicznych i w stanach neurologicznych. Znajduje zastosowanie w salach rehabilitacyjnych, oddziałach chirurgicznych, neurologicznych a także przychodniach rehabilitacyjnych.

2. Opis techniczny.

Przyrząd do ćwiczeń stawu skokowego - kula -wykonany jest z litego drewna, blat ze sklejki. Całość pokryta jest lakierem bezbarwnym:

- a/ PS-K – sandały ze sklejki z paskami skórzanymi przykręcone na stałe do przyrządu,
- b/ PS-K2 - kula bez sandałów
- c/ PS-KT – kula z blatem tapicerowanym pokryty jest pianką poliuretanową C i skajem.

3. Przygotowanie przyrządu do pracy.

PS-K - ustawić przyrząd w pobliżu drabinki rehabilitacyjnej lub poręczy zamontowanej np. do ściany na odległość wyciągniętych rąk.

- ustawić w pobliżu przyrządu krzesło lub taboret, który umożliwi prawidłowe ustawienie stóp na przyrządzie i ewentualne zapięcie ich w sandałach.

- w początkowym okresie rehabilitacji ćwiczenia można wykonywać w pozycji siedzącej, następnie w pozycji stojącej – wskazane jest wtedy, aby pacjent trzymał się drabinki lub poręczy.

- wycinek kuli może być wyposażony w sandały rehabilitacyjne o długości 230, 255, 290

lub 320 mm ± 5mm – należy przed rozpoczęciem ćwiczeń sprawdzić czy paski sandałów zostały dokładnie zapięte.

4. Konserwacja.

Przecierać miękką zwilżoną szmatką z dodatkiem detergentów nie dopuszczając do zawilgocenia elementów przyrządu. Elementy pokryte powłokami galwanicznymi pokryć cienką warstwą wazeliny aptecznej i wytrzeć do sucha. **Nie używać środków konserwujących i zmiękczejących skórę do konserwacji tapicerki i pasków skórzanych.**

5. Dezynfekcja.

Zabrudzenia olejkami, kremami, muszą być natychmiast usunięte za pomocą łagodnego detergentu (roztwór ciepłej wody z szarym mydłem) oraz miękkiej szmatki lub gąbki.

Dezynfekować w razie potrzeby i sporadycznie środkami do dezynfekcji takimi jak: Mediline Velox Foam Prim. Dezynfekować zgodnie z zaleceniami producenta używanego środka. Po zdezynfekowaniu tapicerki stołu za pomocą środka do dezynfekcji, należy dokładnie osuszyć tapicerkę, doprowadzając ją do całkowitego wyschnięcia. W przeciwnym wypadku może dojść do trwałego zabarwienia tapicerki.

Uwaga: Przed użyciem środka innego niż łagodny detergent trzeba sprawdzić efekt w niewidocznym miejscu, a samo czyszczenie wykonać bardzo ostrożnie



PS-K (wycinek kuli z sandałami)



PS-K2 (wycinek kuli bez sandałów)



PS-K-T (wycinek kuli tapicerowany)

	Producent		Zapoznaj się z instrukcją użytkowania
	Numer seryjny		Uwaga
	Wyrób medyczny		Zgodność wyrobu z rozporządzeniem 2017/745



Do opisanego w instrukcji użytkowania, że ta informacja jest zawarta w numerze seryjnym