



INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU

Wydanie IX z 02.05.2025

Stoły rehabilitacyjne sterowane elektrycznie

SR-3E, SR-3E-Ł, SR-3E-B,

SR-1E, SR-1E-Ł, SR-1E-B

SR-I, SR-II



TECH-MED Roman Paślawski Spółka Jawna

ul. Oleska 117

45-233 OPOLE

tel. 77 455 11 78

www.tech-med.com.pl

biuro@tech-med.com.pl

Opole 2025 r.

SPIS TREŚCI

1. Informacje o wyrobie – str. 1
2. Przeznaczenie wyrobu – str. 1
3. Opis wyrobu – str. 2
4. Środki bezpieczeństwa – str. 5
5. Modele, parametry poszczególnych modeli oraz przykładowe zdjęcia – str. 5
6. Przygotowanie do użytkowania – str. 9
7. Przegląd i konserwacja – str. 12
8. Oznaczenia symboli umieszczonych na etykiecie wyrobu - str. 13

1. INFORMACJE O WYROBIE

NAZWA: Stoły rehabilitacyjne sterowane elektrycznie

MODEL: SR-3E, SR-3E-Ł, SR-3E-B, SR-1E, SR-1E-Ł, SR-1E-B, SR-I, SR-II

KOD BASIC UDI-DI: 5904422575-SRE-UW

KLASA WYROBU: wyrób medyczny klasy I wg reguły 1

Producent oświadcza, że wyrób jest zgodny ze stosowanymi wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylecia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG i stosowanymi normami międzynarodowymi.

Producent oświadcza, że postępuje zgodnie z procedurą oceny zgodności określoną w art. 52 akapit 7, Rozporządzenia 2017/745, po sporządzeniu dokumentacji technicznej określonej w załącznikach II i III Rozporządzenia 2017/745.

NUMER SRN PRODUCENTA: PL-MF-000047868

2. PRZEZNACZENIE WYROBU

Stoły rehabilitacyjne są niezbędnym elementem wyposażenia placówek fizjoterapeutycznych i szpitalnych oddziałów rehabilitacyjnych, ale mogą być również wykorzystywane indywidualnie w warunkach domowych. Stanowią nieodzowną podstawę do wykonywania szeroko rozumianych zabiegów fizjoterapeutycznych w celu poprawy sprawności po przebytych urazach i operacjach. Mogą być użytkowane zarówno samodzielnie jako narzędzie wykorzystywane przez rehabilitanta do wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych, jak i w kabinie do ćwiczeń i zawieszzeń, gdzie z pomocą specjalistycznego osprzętu możliwe jest wykonywanie różnego rodzaju ćwiczeń z zakresu kinezyterapii.


Stoły rehabilitacyjne sterowane elektrycznie produkowane są w wielu różnych konfiguracjach – różnią się rodzajem konstrukcji, ilością elementów tapicerki, posiadanymi funkcjami oraz opcjami dodatkowymi, co sprawia, że są to wyroby, które można dostosować indywidualnie do potrzeb pacjentów czy danej placówki. Szczególnie zaawansowane są modele SR-I i SR-II, które dzięki regulowanym sekcjom oraz bananom stabilizującym umożliwiają przeprowadzenie wyjątkowo wymagających zabiegów.

3. OPIS WYROBU


Stół rehabilitacyjny sterowany elektrycznie składa się z metalowej konstrukcji malowanej proszkowo oraz tapicerowanych elementów, których ilość różni się w zależności od wybranego modelu. W konstrukcji stołu umieszczony został siłownik elektryczny (w komplecie z zasilaczem) umożliwiający regulację wysokości. Standardowo regulacja wysokości odbywa się za pomocą pilota ręcznego dołączonego do zestawu. Jako opcję zamienną można zastosować pilot nożny lub ramę sterującą umieszczoną w dolnej części konstrukcji, umożliwiającą sterowanie z każdego miejsca wokół stołu. Regulacja wysokości przy użyciu siłownika elektrycznego jest płynna i nie wymaga siły osoby obsługującej.

Modele SR-3 zostały wykonane na lekkiej, ale bardzo stabilnej i ergonomicznej konstrukcji zapewniającej komfortowe użytkowanie podczas zabiegów. Modele SR-1 oraz SR-I i SR-II posiadają wzmocnioną konstrukcję, przeznaczoną dla pacjentów o większej wadze.

Każdy model posiada uchwyty na pasy stabilizujące umieszczone po bokach górnej konstrukcji.

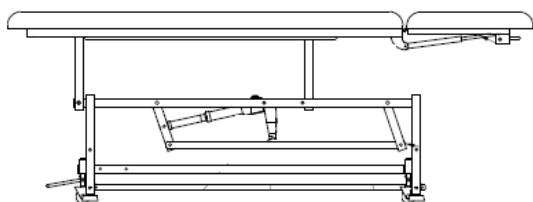

lekka konstrukcja sterowana elektrycznie

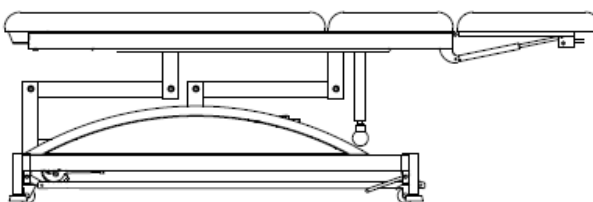

ciężka konstrukcja sterowana elektrycznie

MODEL	ILOŚĆ SEKCJI (ELEMENTÓ W TAPICERKI)	OPIS I FUNKCJE
SR-3E	2	Regulowany zagłówek (za pomocą sprężyny gazowej) oraz stałe leżysko; lekka konstrukcja
SR-3E h	4	Regulowany zagłówek (za pomocą sprężyny gazowej) z podłokietnikami oraz stałe leżysko; lekka konstrukcja
SR-3E L	8	Regulowany zagłówek (za pomocą sprężyny gazowej) z podłokietnikami oraz leżysko podzielone na 5 sekcji, z których środkowa jest stała, a 4 pozostałe regulowane (do góry za pomocą sprężyn gazowych); lekka konstrukcja
SR-3E rp	3	Regulowany zagłówek (za pomocą sprężyny gazowej), stała część środkowa oraz regulowany podnózek (podnoszony do góry za pomocą sprężyny gazowej); lekka konstrukcja
SR-3E-ł	3	Regulowany zagłówek (za pomocą sprężyny gazowej) oraz ruchoma część środkowa i podnózek (łamane do pozycji Pivota za pomocą mechanizmu korbowego); lekka konstrukcja
SR-3E-ł rp	3	Regulowany zagłówek (za pomocą sprężyny gazowej), ruchoma część środkowa i podnózek (łamane do pozycji Pivota za pomocą

		mechanizmu korbowego) oraz regulowany podnózek (podnoszony do góry za pomocą sprężyny gazowej); lekka konstrukcja
SR-3E-B	1	Jednoczęściowe, stałe leżysko; lekka konstrukcja
SR-1E	2	Regulowany zagłówek (za pomocą sprężyny gazowej) oraz stałe leżysko; ciężka konstrukcja
SR-1E h	4	Regulowany zagłówek (za pomocą sprężyny gazowej) z podłokietnikami oraz stałe leżysko; ciężka konstrukcja
SR-1E rp	3	Regulowany zagłówek (za pomocą sprężyny gazowej), stała część środkowa oraz regulowany podnózek (podnoszony do góry za pomocą sprężyny gazowej); ciężka konstrukcja
SR-1E-ł	3	Regulowany zagłówek (za pomocą sprężyny gazowej) oraz ruchoma część środkowa i podnózek (łamane do pozycji Pivota za pomocą mechanizmu korbowego); ciężka konstrukcja
SR-1E-ł rp	3	Regulowany zagłówek (za pomocą sprężyny gazowej), ruchoma część środkowa i podnózek (łamane do pozycji Pivota za pomocą mechanizmu korbowego) oraz regulowany podnózek (podnoszony do góry za pomocą sprężyny gazowej); ciężka konstrukcja
SR-1E-B	1	jednoczęściowe, stałe leżysko; ciężka konstrukcja
SR-I	5	Regulowany zagłówek (za pomocą sprężyny gazowej) z podłokietnikami, część środkowa podnoszona do pozycji Pivota (za pomocą sprężyny gazowej) oraz część nożna regulowana w płaszczyźnie poziomej i pionowej (za pomocą sprężyn gazowych); 5 bananów; ciężka konstrukcja
SR-I 3D	5	Regulowany zagłówek (za pomocą sprężyny gazowej) z podłokietnikami, stała część środkowa oraz część nożna regulowana w płaszczyźnie poziomej, pionowej i posiadająca funkcję rotacji (za pomocą sprężyn gazowych); ciężka konstrukcja
SR-II	8	Regulowany zagłówek (za pomocą sprężyny gazowej) z podłokietnikami, część środkowa podnoszona do pozycji Pivota (za pomocą sprężyny gazowej) oraz część nożna regulowana w płaszczyźnie poziomej i pionowej, a także podzielona dodatkowo na 4 regulowane sekcje (za pomocą sprężyn gazowych); 5 bananów; ciężka konstrukcja
SR-II PRIM	8	Regulowany zagłówek (za pomocą sprężyny gazowej) z podłokietnikami, część środkowa podnoszona do pozycji Pivota (za pomocą sprężyny gazowej) oraz część nożna regulowana w płaszczyźnie pionowej (góra-dół), a także podzielona dodatkowo na 4 regulowane sekcje (za pomocą sprężyn gazowych); 4 banany; ciężka konstrukcja
SR-II PRIM+	8	Regulowany zagłówek (za pomocą sprężyny gazowej) z podłokietnikami, część środkowa podnoszona do pozycji Pivota (za pomocą sprężyny gazowej) oraz część nożna regulowana w płaszczyźnie poziomej i pionowej, a także podzielona dodatkowo na 4 regulowane sekcje (za pomocą sprężyn gazowych), z których każda ma możliwość niezależnej regulacji w danej płaszczyźnie; 4 banany; ciężka konstrukcja

Oznaczenia dodatkowe:

h - hybryda (zagłówek z podłokietnikami)

rp - regulowany podnózek

L – stół przeznaczony do drenażu limfatycznego z podłokietnikami bocznymi w sekcji środkowej oraz dzielonym podnóżkiem podnoszonym do góry

Stoły, które posiadają zagłówek, standardowo wykonane są z otworem w kształcie gruszki. W leżysku oraz pozostałych elementach tapicerki standardowo nie wykonujemy otworów.

Każdy model został wyposażony w cztery gumowe stopki, umożliwiające odpowiednie wypoziomowanie stołu i dostosowanie go do podłoża.

Wyposażenie dodatkowe do stołów rehabilitacyjnych sterowanych elektrycznie:

- a. Układ jezdny z centralnie sterowanym hamulcem
- b. Wieszak na ręczniki papierowe
- c. Komplet kształtek do masażu (kliny 20x25x10, 40x50x20, 30x20x16, wałek 10x30, półwałek 60x18x12)
- d. Zatyčka otworu w zagłówku (do stołów, które posiadają zagłówek)
- e. Otwór w leżysku oraz zatyčka leżyska
- f. Zagłówek z okrągłą zatycką i poduszką (zamiast standardowego otworu w kształcie gruszki)
- g. Pas stabilizacyjny
- h. Pilot nożny zamiast pilota ręcznego (lub jednocześnie obie opcje)
- i. Rama sterująca zamiast pilota ręcznego (lub jednocześnie obie opcje)
- j. Akumulator umożliwiający pracę bez podłączenia do źródła zasilania sieciowego
- k. System zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu
- l. Łamanie do pozycji Pivota za pomocą siłownika elektrycznego – dotyczy modeli SR-3E-Ł, SR-3E-Ł rp, SR-1E-Ł, SR-1E-Ł rp
- m. Zagłówek regulowany za pomocą siłownika elektrycznego – dotyczy modeli z zagłówkiem
- n. Banan barkowy lub banan w leżysku
- o. Opuszczane barierki boczne
- p. Szuflada kardiologiczna umieszczona w środkowej części stołu
- q. Funkcja podnoszenia leżyska do pozycji Trendelenburga (do góry za pomocą sprężyn gazowych w zakresie 0-15°), umożliwiająca wykonanie zabiegu drenażu ułożeniowego – dotyczy modeli SR-3E, SR-3E h, SR-1E, SR-1E h
- r. Regulowany zagłówek do stołów jednoczęściowych (za pomocą sprężyn gazowych w zakresie 0-45°) – dotyczy modeli SR-3E-B, SR-1E-B.

Elementy tapicerowane zostały wykonane z wysokiej jakości sklejk drewnianej, dwuwarstwowej pianki poliuretanowej oraz atestowanego skaju, dostępnego w wielu wersjach kolorystycznych:



4. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA



Wyrób powinien być używany zgodnie z przewidzianym zastosowaniem. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Instrukcja powinna być w pełni zrozumiana i dokładnie przestrzegana. W razie jakichkolwiek niejasności nie należy korzystać z urządzenia do celów terapeutycznych.



Należy upewnić się, że wszystkie osoby używające urządzenia zapoznały się z instrukcją obsługi.



Ćwiczenia z użyciem urządzenia powinny być przeprowadzone pod nadzorem wykwalifikowanego pracownika medycznego.



Przed rozpoczęciem każdego zabiegu należy upewnić się, że urządzenie jest w pełni sprawne i wszystkie jego elementy znajdują się na swoim miejscu.



W przypadku wystąpienia uszkodzenia urządzenia lub przesłanek świadczących o nieprawidłowym działaniu, należy przerwać ćwiczenia rehabilitacyjne i skontaktować się z producentem w celu ustalenia dalszego postępowania.



Urządzenie jest profesjonalnym sprzętem do ćwiczeń rehabilitacyjnych i nie służy do zabawy. Należy trzymać z dala od dzieci.



Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.

5. MODELE, PARAMETRY POSZCZEGÓLNYCH MODELI ORAZ PRZYKŁADOWE ZDJĘCIA

MODEL	SR-3E	SR-3E h	SR-3E L	SR-3E rp	SR-3E-Ł	SR-3E-Ł rp	SR-3E-B
DŁUGOŚĆ	195 cm	195 cm	195 cm	195 cm	195 cm	195 cm	200 cm
SZEROKOŚĆ	68 cm	68 cm	68 cm	68 cm	68 cm	68 cm	120, 110 lub 100 cm
WYSOKOŚĆ	45-95 cm	45-95 cm	45-95 cm	45-95 cm	45-95 cm	45-95 cm	45-95 cm
REGULACJA ZAGŁÓWKA	-80 do +45°	-80 do +45°	-80 do +45°	-80 do +45°	-80 do +45°	-80 do +45°	Opcja dodatkowa 0-50°
REGULACJA PODNÓŻKA	-	-	-	0-85°	-	0-85°	-
REGULACJA PODŁOKIETNIKÓW	-	18 cm w dół	18 cm w dół	-	-	-	-
POZYCJA PIVOTA (ŁAMANIE)	-	-	-	-	0-25°	0-25°	-
REGULACJA PODŁOKIETNIKÓW BOCZNYCH I DZIELONEGO PODNÓŻKA – PŁETW	-	-	0-45°	-	-	-	-
WAGA (bez dodatków)	55 kg	55 kg	55 kg	55 kg	55 kg	55 kg	60 kg
MAX OBCIĄŻENIE	200 kg	200 kg	200 kg	200 kg	200 kg	200 kg	200 kg



SR-3E z szufladą kardiologiczną



SR-3E L do drenażu limfatycznego



SR-3E z funkcją Trendelenburga



SR-3E h



SR-3E-Ł, SR-3E-Ł rp



SR-3E rp, SR-3E-Ł rp



SR-3E z barierkami



SR-3E-B z regulowanym zagłówkiem

MODEL	SR-1E	SR-1E h	SR-1E rp	SR-1E-Ł	SR-1E-Ł rp	SR-1E-B
DŁUGOŚĆ	195 cm	195 cm	195 cm	195 cm	195 cm	200 cm
SZEROKOŚĆ	68 cm	68 cm	68 cm	68 cm	68 cm	120, 110 lub 100 cm
WYSOKOŚĆ	48-95 cm	48-95 cm	48-95 cm	48-95 cm	48-95 cm	50-90 cm
REGULACJA ZAGŁÓWKA	-80 do +45°	-80 do +45°	-80 do +45°	-80 do +45°	-80 do +45°	Opcja dodatkowa 0-50°
REGULACJA PODNÓŻKA	-	-	0-85°	-	0-85°	-
REGULACJA PODŁOKIETNIKÓW	-	18 cm w dół	-	-	-	-
POZYCJA PIVOTA (ŁAMANIE)	-	-	-	0-25°	0-25°	-
WAGA (bez dodatków)	75 kg	75 kg	75 kg	75 kg	75 kg	90 kg
MAX OBCIĄŻENIE	250 kg	250 kg	250 kg	250 kg	250 kg	250 kg



SR-1E-B



SR-1E



SR-1E-ł, SR-1E-ł rp

MODEL	SR-I	SR-I 3D	SR-II	SR-II PRIM	SR-II PRIM+
DŁUGOŚĆ	210 cm	200 cm	210 cm	200 cm	203 cm
SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA	76 cm	76 cm	76 cm	76 cm	76 cm
SZEROKOŚĆ TAPICERKI	63 cm	63 cm	63 cm	63 cm	63 cm
WYSOKOŚĆ	60-100 cm	55-95 cm	60-100 cm	60-100 cm	60-100 cm
REGULACJA ZAGŁÓWKA	-80 do +45°	-80 do +45°	-80 do +45°	-80 do +45°	-80 do +45°
REGULACJA PODNÓŻKA W PŁASZCZYŹNIE PIONOWEJ	-45 do +85°	-45 do +85°	-45 do +45°	-45 do +45° (każda noga oddzielnie lub razem)	-35 do +55° (każda noga oddzielnie lub razem)
REGULACJA PODÓŻKA W ZGIĘCIU KOLANOWYM W PŁASZCZYŹNIE PIONOWEJ	-	-	-	-45 do +50° (każda noga oddzielnie)	-70 do +45° (każda noga oddzielnie)
REGULACJA PODNÓŻKA W PŁASZCZYŹNIE POZIOMEJ	0-35°	0-35°	0-35° (obie nogi razem)	-	0-30° (obie nogi razem lub każda oddzielnie)
ROTACJA PODNÓŻKA	-	17°	-	-	-
REGULACJA PODŁOKIETNIKÓW	22 cm w dół	18 cm w dół	22 cm w dół	22 cm w dół	22 cm w dół
UNIESIENIE CZĘŚCI ŚRODKOWEJ (PIVOT)	0-15 cm	-	0-15 cm	0-15 cm	0-15 cm
WAGA (bez dodatków)	95 kg	95 kg	95 kg	98 kg	98 kg
MAX OBCIĄŻENIE	250 kg	250 kg	250 kg	250 kg	250 kg
ILOŚĆ BANANÓW	5	-	5	4	4



SR-I



SR-II



SR-I 3D



SR-II PRIM



SR-II PRIM+

6. PRZYGOTOWANIE DO UŻYTKOWANIA

Stół rehabilitacyjny sterowany elektrycznie jest gotowy do użytku. Aby umożliwić sterowanie stołem należy podłączyć wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda zasilania sieciowego. Po ułożeniu pacjenta na stole należy dostosować funkcje stołu do specyfiki wykonywanego zabiegu oraz do budowy ciała pacjenta.

Regulacja wysokości standardowo odbywa się za pomocą pilota ręcznego. W zależności od tego czy chcemy stół opuścić czy podnieść należy nacisnąć odpowiedni przycisk na pilocie. Przyciski oznaczone są strzałkami oraz ikonkami obrazującymi poszczególne funkcje. Gdy stół wyposażony został w większą ilość siłowników elektrycznych (np. do regulacji zagłówek lub łamania do pozycji Pivota), wówczas na pilocie znajduje się więcej przycisków umożliwiających sterowanie odpowiednimi funkcjami.



Pilot pojedynczy



Pilot podwójny



Pilot potrójny

W modelach wyposażonych zamiennie w pilot nożny sterowanie wysokością możliwe jest nożnie za pomocą pedałów oznaczonych strzałkami.

W modelach wyposażonych zamiennie w ramę sterującą sterowanie wysokością możliwe jest z każdego miejsca wokół stołu. Regulacja następuje wówczas poprzez naciśnięcie stopą na ramę lub włożenie stopy pod ramę i uniesienie jej.



rama sterująca



pilot nożny

Regulacja kąta nachylenia zagłówek odbywa się przy pomocy sprężyny gazowej, która wyposażona jest w dźwignię zwalniającą znajdującą się pod zagłówkiem. Analogicznie regulowane są pozostałe sekcje stołu, które wyposażone zostały w sprężyny gazowe.

W modelach SR-I, SR-II podnózek lub poszczególne jego sekcje również sterowane są za pomocą sprężyn gazowych. Przed zmianą położenia danej sekcji należy zwolnić dźwignię powiązaną z daną sprężyną, a następnie unieść/opuścić sekcję w wybrane położenie. W momencie gdy dźwignia zostanie uwolniona, dana sekcja zablokuje się automatycznie w danym położeniu.

Modele SR-3E-Ł, SR-1E-Ł, posiadające funkcję ułożenia do pozycji Pivota, wyposażone zostały w korbkę podnośnika śrubowego umieszczoną pod leżyskiem, której pokręcenie powoduje regulację kąta łamania stołu. Zamiast mechanizmu śrubowego można stół wyposażyć w dodatkowy siłownik, który umożliwi elektryczną regulację łamania do pozycji Pivota. Wówczas na pilocie będą również przyciski do sterowania tą funkcją (chyba że stół został wyposażony w ramę sterującą, wówczas zamiast pilota do sterowania łamaniem stół wyposażony jest w przyciski po obu stronach górnej konstrukcji stołu).

Należy pamiętać, że przed rozpoczęciem regulacji poszczególnych sekcji stołu (elementów tapicerowanych) należy zdemontować wszystkie banany, jeśli występują.

Regulacja podłokietników (modele oznaczone „h” oraz „L” oraz modele SR-I i SR-II) odbywa się poprzez odblokowanie pokręteł na relingach umiejscowionych pod zagłówkiem po obu jego stronach, przesunięcie podłokietników na odpowiedni poziom, a następnie zablokowanie pokręteł. W modelach SR-I i SR-II podłokietniki posiadają dodatkowo funkcję obrotową w zakresie 180° w płaszczyźnie poziomej, co umożliwia ich przesunięcie nawet w okolice części środkowej.



Przed rozpoczęciem regulacji wysokości oraz poszczególnych sekcji stołu należy upewnić się czy pacjent znajduje się w bezpiecznej pozycji.



Jeśli stół posiada układ jezdny przed rozpoczęciem zabiegu należy upewnić się czy został on uniesiony. Podczas pracy stół powinien znajdować się na stopkach.



Przemieszczanie stołu rehabilitacyjnego na kółkach jezdnych wraz z pacjentem jest zabronione. Kółka służą jedynie do transportu samego stołu. Transport powinien się odbywać tylko i wyłącznie w momencie kiedy wszystkie elementy tapicerowane znajdują się w pozycji poziomej.



Siadanie na krawędziach stołu, a w szczególności na zagłówku, jest bezwzględnie zabronione.



Podczas regulacji poszczególnych sekcji stołu nie należy umieszczać palców pomiędzy szczelinami elementów tapicerowanych, ponieważ grozi to ich przytrzaśnięciem lub zmiżdżeniem.



W celu natychmiastowego odłączenia układu zasilania stołu, należy wyciągnąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda zasilania sieciowego.



Podczas regulacji wysokości oraz poszczególnych funkcji za pomocą siłowników elektrycznych należy zawsze zachować bezpieczną odległość na wypadek niekontrolowanych odchyłeń elementów regulowanych.



Należy upewnić się, że pod leżyskiem nie znajdują się żadne przedmioty, które mogłyby przeszkodzić w regulacji wysokości stołu. Natrafienie na opór jakiegokolwiek przedmiotu podczas regulacji spowoduje uszkodzenie siłownika.



Jeśli stół wyposażony został w akumulator, należy codziennie po zakończonej pracy z użyciem akumulatora, podłączyć stół do źródła zasilania sieciowego (najlepiej na całą noc). W przeciwnym razie, gdy akumulator będzie pozostawał nienaładowany przez dłuższy czas - ulegnie nieodwracalnemu uszkodzeniu.

System zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień pozwala na zablokowanie stołu w wymaganym położeniu. W modelach, które posiadają 2 siłowniki elektryczne (lub więcej), blokowane są wszystkie funkcje jednocześnie. Blokada następuje poprzez naciśnięcie czerwonego przycisku na zasilaczu. Aby odblokować stół należy w prawą stronę przekręcić kluczyk, który znajduje się w środku przycisku.

7. PRZEGLĄD I KONSERWACJA

Konserwacja polega na utrzymaniu wyrobu w czystości. Elementy stalowe oraz tapicerowane można czyścić wilgotną ściereczką z dodatkiem łagodnego detergentu. Pasy z elanobawełny można prać w pralce z dodatkiem łagodnego środka piorącego.



Nie należy stosować środków chemicznych zawierających wolny tlen oraz chlor, gdyż może to skutkować uszkodzeniem powierzchni lakierowanej.



Zaleca się dodatkowe zabezpieczenie elementów tapicerowanych stołu, np. poprzez używanie ręczników lub pokrowców.

Co 6 miesięcy lub po każdym intensywnym użytkowaniu wyrobu należy sprawdzać mocowania śrub.










Szacowany okres użyteczności wyrobu wynosi 7 lat. Po upływie tego czasu, licząc od daty produkcji urządzenia oraz jego wyposażenia, producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ani związane z nimi konsekwencje.

Okres gwarancji urządzenia wynosi 24 miesiące. Po upływie tego czasu należy raz do roku dokonywać przeglądów sprzętu w celu przedłużenia jego użyteczności do 7 lat.

W przypadku zaistnienia nieprawidłowości w użytkowaniu wyrobu lub jego uszkodzenia, należy skontaktować się z producentem w celu ustalenia dalszego postępowania.

Wszelkie naprawy oraz przeglądy sprzętu powinny być dokonywane przez producenta lub autoryzowany serwis producenta.

8. OZNACZENIA SYMBOLI UMIESZCZONYCH NA ETYKIECIE WYROBU

	Numer seryjny
	Wyrób medyczny
	Numer katalogowy (model wyrobu)
	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu
	Zapoznaj się z instrukcją użytkowania
	Ostrzeżenie
	Zgodność wyrobu z rozporządzeniem MDR 2017/745
	Producent
	Data produkcji (zawarta w numerze seryjnym wyrobu)