

WKS

15 644,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: H-UH-00005



Wirówka kończyn dolnych WKS (pojemność 65 l, 38 powietrznych dysz do masażu) przeznaczona jest do masażu wirowego okolic stopy, stawów skokowych i podudzi.

Opis produktu:

Masaż wirowy kończyn dolnych, w wirówce WKS obejmuje stopy i podudzia. Wybraną partię ciała umieszcza się w urządzeniu do hydroterapii, którym jest **wirówka kończyn dolnych**, w którym jest masowana. Jeśli do dyspozycji jest wanna do masażu wirowego wówczas masaż może obejmować całe kończyny. Taki masaż zmniejsza ból, poprawia ukrwienie, ale przede wszystkim relaksuje.

Jak działa wirówka kończyn dolnych?

- przeciwobrzękowe
- zmniejszają zastój krwi żyłnej
- zwiększenie przepływu krwi i chłonki
- rozluźnienie mięśni
- zwiększenie zakresu ruchu
- przeciwbólowe

Kończyna dolna która jest poddawana masażowi, opiera się wirom wody jednocześnie napina mięśnie co sprzyja większemu przepływowi krwi i chłonki w części ciała poddanej masażowi. Wszystkie te działania korzystnie wpływają na zwiększenie zakresu ruchu w masowanej kończynie.

Cechy charakterystyczne:

- 38 powietrznych dysz do masażu,
- Pojemność 65 l,
- Pompa posiada zabezpieczenie przed pracą na sucho,
- Sterowany elektronicznie system odkamieniania wody i urządzenia,
- Czujnik temperatury wody,
- Pysznik ciepły,
- Hydromasaż za pomocą strumienia wody o uregulowanej sile (przez napowietrzenie – bierny masaż perełkowy),
- Obrotowe krzeselko w zestawie.

Co to jest masaż wirowy?

Terapia przy użyciu wirówki jest rodzajem hydroterapeutycznego zabiegu, wykonywanego na poszczególne partie ciała

tj. kończyny górne lub dolne jak również kręgosłup. Masaż wirowy jest jednym z rodzajów hydromasażu. Masaż za pomocą wiru wodnego ma działanie przeciwbólowe, działa rozkurczowo i odprężająco jednocześnie poprawiając ukrwienie partii ciała poddanej masażowi. Masaż wirowy niejednokrotnie jest zalecany po urazach złamań kończyn dolnych lub górnych, gdzie jego zadaniem jest zmniejszenie obrzęków. Ten typ hydromasażu najczęściej przeprowadzany jest za pomocą urządzeń takich jak wirówka kończyn dolnych lub górnych. Masaż wirowy inaczej zwany po prostu wirówką zalecany jest w leczeniu zmian zwyrodnieniowych stawów, reumatyzmu, blizn, zaniku mięśni a także przy porażeniach mięśniowych.

W urządzeniach do hydroterapii, takich jak **wirówka kończyn dolnych** (WKS), są zamontowane dysze, które po napełnieniu urządzenia wodą i jego uruchomieniu sprawiają, że woda wprawiana jest w ruch tworząc wir. Program wirowania dobierany jest indywidualnie do schorzeń i stanu pacjenta.

Sprzęty, jak **wirówka kończyn dolnych** czy pozostałe wanny wirowe, stanowią wyposażenie sanatoriów, gabinetów i specjalistycznych ośrodków rehabilitacyjnych. Masaż wirowy może być również wykonywany w domu jednak nie za sprawą profesjonalnego urządzenia do hydroterapii a hydromasażera, którym najczęściej jest urządzenie przypominające miskę, posiadające ograniczone programy zabiegowe.

Masaż wirowy - hydromasaż trwa zazwyczaj 10-30minut a by był skuteczny pacjent musi mieć minimum 10 zabiegów. Aby zabieg był jeszcze bardziej przyjemny temperatura wody wynosi od 32 - 38°C.

Jakie są wskazania do masażu wirowego?

- Choroby reumatyczne
- Zwyrodnienie stawów
- Choroba Reynauda
- Rehabilitacja zwichnięć, skręceń
- Obrzęki limfatyczne
- Niedowłady porażeniowe, wzmożone napięcie mięśniowe
- Rehabilitacja po porażeniu mózgowym dziecięcym
- Po zabiegu chirurgicznym żyłaków

Hydromasaż - przeciwwskazania:

- Zaburzenia rytmu serca
- Niewydolność krążenia
- Nadciśnienie tętnicze
- Stan zapalny i zakrzepowy żył
- Stopa cukrzycowa

Cechy produktu:

Pojemność (l.): 65
Ilość dysz: 38
Długość (mm): 980
Szerokość (mm): 900
Wysokość (mm): 620

Specyfikacja techniczna

Pojemność zabiegowa 45-65 l Pobór mocy 0,9 kW Liczba dysz 38 szt. Zasilanie 230 V/ 50 Hz Wymiary długość 98 cm szerokość 90 cm wysokość 62 cm Masa 45 kg Bezpieczeństwo elektryczne klasa I, typ B

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

- Hydroterapia - informacje ogólne
- Masaż wirowy - zastosowanie i rodzaje urządzeń
- Masaż wirowy - wskazania i przeciwwskazania

Przed dostawą sprzętu konieczne jest przygotowanie przez użytkownika pomieszczenia do montażu, poprzez zapewnienie przyłącza prądu, odpływu wody oraz zaworów zgodnie z wymaganiami zawartymi w schemacie montażowym danego urządzenia.

Widok 360

GPSR

Producent: Meden-Inmed sp. z o.o.

Adres: ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin, Polska

Email: meden@meden.com.pl

Telefon: +48 94 347 10 40

Informacje o bezpieczeństwie

Galeria produktów:

