

Kabel pacjenta do elektroterapii - kanał A+B

237,50 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -



Opis produktu:

Przewód pacjenta do elektroterapii - kanał A+B

Przewód pacjenta do elektroterapii jest przeznaczony do użycia w następujących aparatach:

- Aries,
- Duoter,
- Duoter LT,
- Etius,
- Etius U,
- Rodzina Physiogo

- Przewód pacjenta ma długość 2 m. Należy mieć na uwadze, że przewód do elektroterapii jest podłączany z tyłu urządzenia i jego długość użyteczna wynosi około 1,5 m.
- Przewód pacjenta jest dedykowany do określonego kanału zabiegowego A lub B z tego względu, że jest on opisany Kanał A lub Kanał B. Elektrycznie te przewody są dokładnie takie same, a oznaczniki są potrzebne aby identyfikować, do kabla którego kanału podłączamy elektrody.
- W związku z tym możemy mieć w aparacie 2 kable kanału A lub 2 kable kanału B, ale wtedy w celu identyfikacji będziemy musieli sprawdzać, do którego gniazda jest włączony kabel.
- Aparat nie sprawdza czy kabel pacjenta jest podłączony do gniazdka - nie identyfikuje obecności kabla. Przewody użyte w kablu pacjenta mają część przewodzącą wykonaną z dużej liczby, cienkich drucików, a część izolacyjną z dwóch warstw PVC. Dzięki temu są one bardzo giętkie i trwałe.
- Przewód jest zakończony wtykiem bananowym 4 mm.
- Cena dotyczy zestawu kabli (1x kabel A + 1x kabel B)

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Widok 360

Galeria produktów:

