

Głowica bezobsługowa SnG (17,3 cm²)

3 000,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: A-AS-AST-SNG

głowica typ SnG; 1/ 3 MHz; 17,3 cm² z uchwytem



Opis produktu:

Głowica bezobsługowa SnG; 1/ 3 MHz; 17,3 cm² z uchwytem

- **Przy zakupie samej głowicy konieczna jest kalibracja sterownika. W tym celu prosimy o kontakt!**
- SnG, to bezobsługowe akcesorium o dużej powierzchni czoła (17,3 cm² lub 34,5 cm² w zależności od wybranego trybu działania), które stosowane jest w klasycznej terapii ultradźwiękami, fonoferezie, terapii LIPUS i zabiegach skojarzonych (w połączeniu z elektroterapią).
- **Głowica typ SnG; 1/ 3 MHz; 17,3 cm² z uchwytem współpracuje ze sterownikami PhysioGo.Lite SONO oraz PhysioGo.Lite COMBO**
- Głowica przeznaczona jest przede wszystkim do prowadzenia terapii techniką stacjonarną, a dzięki uchwytem możliwe jest jej zamocowanie na ciele pacjenta za pomocą pasów rzepowych.

Cechy głowicy SNG

- głowica bezobsługowa
- 2 przetworniki ultradźwiękowe w jednej głowicy – posiada możliwość pracy w trybie jednoprzetwornikowym i dwuprzetwornikowym
- możliwość działania w trybie jednosekcyjnym (A/B) lub dwusekcyjnym (A+B)
- całkowita powierzchnia czoła głowicy w trybie jednosekcyjnym – 17,3 cm², w trybie dwusekcyjnym 34,6 cm²
- powierzchnia efektywnego promieniowania – 3 cm²
- wbudowany czujnik temperatury

Aparat PhysioGo.Lite SONO oraz PhysioGo.Lite COMBO jest wyposażony w układ monitorujący jakość kontaktu głowicy z ciałem pacjenta w trakcie zabiegu, który wspiera operatora w prawidłowym wykonywaniu zabiegu. W przypadku wykrycia stanu słabego kontaktu (np. zbyt mało żelu sprzęgającego, bliskość kości), moc wyjściowa głowicy jest zredukowana do minimalnego poziomu zapewniającego ciągłość działania generatora.

Głowice ultradźwiękowe wyposażone są w czujniki temperatury. Za ich pomocą sterownik cyklicznie kontroluje temperaturę czoła głowicy. Mechanizm ten zapobiega wzrostowi temperatury powyżej limitu określonego w normie IEC 60601-2-5. Moment pomiaru temperatury czoła sygnalizowany jest wygaszaniem wskaźnika LED głowicy.

Więcej informacji na temat ultradźwięków

- Wszystko co musisz wiedzieć o bezobsługowej głowicy do ultradźwięków – SnG
- Terapia ultradźwiękowa – 3 przykładowe programy wbudowane urządzenia PhysioGo
- Aparat do sonoterapii – przegląd urządzeń

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

częstotliwość pracy 1 MHz i 3 MHz częstotliwość pracy w trybie zmiennym 1/3 MHz (przełączanie co 8 sek.)
częstotliwość pracy w trybie LIPUS 1 MHz powierzchnia efektywnego promieniowania głowicy 2 x 3 cm² całkowita
powierzchnia czoła głowicy w trybie jednosekcyjnym 17,3 cm² całkowita powierzchnia czoła głowicy w trybie
dwusekcyjnym 2 x 17,3 cm² masa maks. 0,5 kg wymiary akcesorium bez kabla przyłączeniowego 6,8 x 2,8 x 13,0 cm

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Widok 360

GPSR

Producent: ASTAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres: ul. Świt 33, 43-382 Bielsko-Biała, Polska

Email: astarmed@astar.eu

Telefon: 33 829 24 40

Informacje o bezpieczeństwie: Głowica stanowi opcjonalną część odłączalną aparatu realizującego funkcję ultradźwięków. Obowiązują dla niej ostrzeżenia i informacje na temat bezpieczeństwa jak dla odpowiedniego sterownika.

Galeria produktów:

