

Saunders Cervical Home

3 273,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 23%



Odniesienie: -

Przenośne, pneumatyczne urządzenie służące rehabilitacji przez trakcję szyjnego odcinka kręgosłupa. Siła aplikowana jest na kość potyliczną poprzez ruchome kliny.

Opis produktu:

Urządzenie do trakcji Saunders Cervical Home Traction

Urządzenie pozwala na terapię między innymi:

- przepukliny kręgów szyjnych,
- zmniejsza napięcie mięśni szyi i usuwa związane z nimi bóle głowy.

Saunders to innowacyjne urządzenie zaprojektowane przez renomowanego fizjoterapeutę Duane Saunders. Dzięki wieloletniej praktyce w terapii bólu pleców zawarł w urządzeniu funkcje pozwalające skutecznie odciążyć terapeutę a także stosować urządzenie w warunkach domowych.

Urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby nacisk powstawał wyłącznie w miejscach bezpiecznych dla pacjenta, tj. z tyłu głowy a nie pod brodą. (Urządzenia wywierające nacisk na okolice brody mogą zaszkodzić pacjentowi i należy ich bezwzględnie unikać.) Maksymalna wartość ciśnienia trakcji jest założona z góry, dzięki czemu pacjent nie ma możliwości użycia urządzenia w sposób szkodliwy.

Sposób użycia Saunders Cervical Home Traction:

- Pacjent kładzie się na plecach na płaskiej powierzchni z głową pomiędzy boczkami urządzenia. Wałek pod głowę delikatnie odciąga głowę od reszty ciała, siła ciągu jest regulowana za pomocą ręcznej pompki ze wskaźnikiem siły trakcji.
- Zalecany czas użycia urządzenia do trakcji to 10-20 minut. Jeżeli jest to pierwsze użycie, czas należy skrócić do sesji 5-10 minut, a sesję można powtórzyć po 24 godzinach.
- Praktyką podnoszącą skuteczność oddziaływania trakcji jest zmiana wartości ciśnienia podczas zabiegu, łatwo kontrolowana przez ręczną pompkę ze wskaźnikiem siły

Możliwości urządzenia Saunders Cervical Traction:

- bezpośrednie skierowanie siły rozciągającej przez potylicę, zapobiegając obciążeniom stawów skroniowo-żuchwowych,
- komfortowe aplikowanie siły trakcyjnej nawet do 20 kg,
- wygodne i w pełni stabilne ułożenie pacjenta w trakcie zabiegu w pozycji leżenia tyłem.

Zestaw do trakcji Saunders Cervical Home Traction:

- łatwa w montażu stopka umożliwia wykonanie zabiegu pod kątem 15°, 20°, lub 25°,
- obsługa aparatu jest prosta i nie wymaga pomocy osób trzecich,
- zestaw jest w pełni przenośny i łatwy w transporcie,
- komfortowe aplikowanie siły trakcyjnej nawet do 20 kg,
- komfortowe kliny posiadają regulację szerokości, obracają się i łatwo je dopasować do kształtu głowy pacjenta, są łatwe w demontażu,
- aparat posiada możliwość wykonania trakcji symetrycznej jak i asymetrycznej,
- prosty pneumatyczny mechanizm płynnego generowania siły, który daje możliwość prowadzenia trakcji zarówno w sposób statyczny jak i przerywany,
- ciężar: 5,5 kg

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne

siła trakcji 1 - 20 kg aplikacja trakcji pneumatyczna rodzaj trakcji statyczna, przerywana, symetryczna i asymetryczna (jednostronna) wymiary (dł. x szer. x wys.) 56 x 16 x 15 cm waga 5,5 kg ustawienia kąta zabiegu 15°, 20° lub 25°

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Widok 360

Galeria produktów:

