

Kabel pacjenta do elektroterapii - kanał B - PhysioGo.Lite

100,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 23%

Odniesienie: A-AE-AST-KPPL2M_B

Kabel pacjenta do elektroterapii - kanał B - Przewody do
aparatu **PhysioGo.Lite** Oferta z dnia: 09-05-2024



Opis produktu:

Przewód pacjenta do elektroterapii

Przewód pacjenta do elektroterapii – kanał A jest przeznaczony do użycia w aparacie **PhysioGo.Lite**

- **Przewód pacjenta** ma długość 2 m. Należy mieć na uwadze, że **przewód do elektroterapii** jest podłączany z tyłu urządzenia i jego długość użyteczna wynosi około 1,5 m.
- **Przewód pacjenta** jest dedykowany do określonego kanału zabiegowego A lub B z tego względu, że jest on opisany Kanał A lub Kanał B. Elektrycznie te przewody są dokładnie takie same, a oznaczniki są potrzebne aby identyfikować, do kabla którego kanału podłączamy elektrody.
- W związku z tym możemy mieć w aparacie 2 kable kanału A lub 2 kable kanału B, ale wtedy w celu identyfikacji będziemy musieli sprawdzać, do którego gniazda jest włączony kabel.
- Aparat nie sprawdza czy kabel pacjenta jest podłączony do gniazodka - nie identyfikuje obecności kabla. Przewody użyte w kablu pacjenta mają część przewodzącą wykonaną z dużej liczby, cienkich drucików, a część izolacyjną z dwóch warstw PVC. Dzięki temu są one bardzo giętkie i trwałe.
- **Przewód** jest zakończony wtykiem bananowym 4 mm.

Cechy produktu:

Cechy produktu:

Galeria produktów:



Specyfikacja techniczna

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Widok 360