

Inhalator pneumatyczny AMSA

11 500,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -



Opis produktu:

- Inhalator **AMSA** to inhalator laryngologiczny. Stosuje się go głównie do leczenia chorób ucha środkowego, trąbki Eustachiusza, zatok przynosowych czy upośledzonej drożności trąbki słuchowej.
- Inhalator **AMSA** zapewnia kompletną terapię laryngologiczną. Umożliwia rozpylanie wszystkich leków wziewnych. Bardzo dobrze rozpyla nawet małe ilości leku.
- Inhalator pneumatyczny **AMSA** ma możliwość wytwarzania wibroaerozolu, czyli aerozolu wzbogaconego o dodatkową energię pochodzącą z nałożenia nań fali akustycznej i podawania go pod krótkotrwałym nadciśnieniem. Dzięki temu nadciśnieniu aerozol penetruje do ucha środkowego poprzez trąbkę słuchową Eustachiusza i do zatok nawet poprzez otwory o upośledzonej drożności.
- W inhalatorze AMSA nadciśnienie regulowane jest automatycznie poprzez przełykanie. Czynność przełykania powoduje otwarcie ujścia trąbki słuchowej z jednoczesnym zamknięciem jamy nosowej poprzez uniesienie podniebienia miękkiego. Przez odpowiednią końcówkę nosową inhalatora nadciśnienie włącza wibroaerozol do trąbki słuchowej i ucha środkowego. Powtarzanie tego procesu powoduje naturalną fizjoterapię trąbki.

24 miesiące gwarancji i serwis

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne

średnia średnica cząstek dla głowicy MS1 3,4 μ m wydajność aerozolu 0,29 ml / min zasilanie AC 230 V, 50 Hz pojemność nebulizatora 3 ÷ max. 12 ml wymiary 380 x 250 x 200 mm ciężar 9 kg tryb pracy praca ciągła

Wyposażenie

Wyposażenie standardowe

- nebulizator MS1 x1
- końcówka nosowa (duża) x2

- końcówka nosowa (średnia) x2
- końcówka nosowa (mała) x1
- przewód powietrza x1
- przewód wibracji: x1

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

- Inhalatory – rodzaje i zastosowanie
- Terapia inhalacyjna – wszystko co musisz wiedzieć

Widok 360

GPSR

Galeria produktów:

