

MultiReha® – multifunkcyjne oprogramowanie diagnostyczno – terapeutyczne

449,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 23%

Odniesienie: -



Opis produktu:

MultiReha® - nowoczesne oprogramowanie do diagnostyki i rehabilitacji pacjentów

MultiReha® to zaawansowane, innowacyjne oprogramowanie diagnostyczno-terapeutyczne, stworzone z myślą o profesjonalistach w dziedzinie rehabilitacji. MultiReha® jest stale rozwijane, aby zapewnić maksymalną funkcjonalność i komfort użytkowania w codziennej pracy terapeuty.

Kompleksowa baza pacjentów

MultiReha® umożliwia tworzenie i zarządzanie bazą danych pacjentów.

Dostępna jest również funkcja importu i eksportu wyników badań oraz tworzenia statystyk, ułatwiających monitorowanie postępów terapii. W trosce o bezpieczeństwo danych system oferuje funkcję tworzenia kopii zapasowych.

Precyzyjna diagnostyka z wykorzystaniem podoskoku

Oprogramowanie MultiReha® zostało wyposażone w moduł do wykonywania precyzyjnych pomiarów na obrazach stóp i pięt, uzyskanych z podoskoku. Użytkownik ma możliwość przeprowadzania zarówno pomiarów manualnych, jak i półautomatycznych, w tym:

- Długość stopy
- Szerokość stopy
- Kąt Clarka
- Współczynnik KY
- Współczynnik Wejsfloga
- Kąt Alfa
- Kąt Beta
- Kąt Gamma

System umożliwia również definiowanie własnych pomiarów oraz nagrywanie filmów z testów funkcjonalnych, takich jak

przysiady czy ocena chodu.

Diagnostyka i terapia z wykorzystaniem dwóch kamer

MultiReha® obsługuje jednocześnie dwie kamery, co pozwala na równoczesne pomiary stóp i pięt. To rozwiązanie umożliwia dokładną analizę koślawości oraz szpotawości tyłostopia.

Moduł Balans

Moduł Balans w MultiReha® mierzy wychylenia platformy w dwóch osiach:

- Strzałkowej (przednio-tylnej)
- Poprzecznej (bocznej)

Wyniki przedstawiane są w formie wykresu kąta wychylenia względem czasu trwania badania. Terapeuta ma możliwość ustawienia czasu badania, a system prezentuje średnie i maksymalne wartości odchyleń w każdej płaszczyźnie.

Moduł Gry - angażująca rehabilitacja

MultiReha® oferuje interaktywne gry terapeutyczne, które zwiększają zaangażowanie pacjentów podczas ćwiczeń. Użytkownik może dostosować czas trwania gier. Dodatkowo dostępna jest opcja pracy na jednej lub obu stopach, a na koniec sesji prezentowane są wyniki i współczynniki efektywności treningu.

Moduł Postęp - monitorowanie efektów terapii

W zakładce „Postęp” terapeuta może porównywać wyniki kilku badań, analizując średnie i maksymalne wartości wychyleń w różnych kierunkach. System umożliwia wydrukowanie raportów porównawczych, ułatwiając ocenę skuteczności prowadzonych terapii.

MultiReha® dostępne jest w wersji jednostanowiskowej.

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Widok 360

Galeria produktów:

