

Kabel pacjenta do elektroterapii - kanał B - 2 metry

125,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: A-AE-AST-KPWP2MV2_B



Opis produktu:

Przewód pacjenta do elektroterapii

Przewód pacjenta do elektroterapii – kanał B jest przeznaczony do użycia w następujących aparatach:

- Aries,
 - Duoter Plus
 - Duoter LT,
 - Etius,
 - Etius U,
 - Etius ULM
 - Rodzina Physiogo
-
- Przewód pacjenta ma długość 2 m. Należy mieć na uwadze, że przewód do elektroterapii jest podłączany z tyłu urządzenia i jego długość użyteczna wynosi około 1,5 m.
 - Przewód pacjenta jest dedykowany do określonego kanału zabiegowego A lub B z tego względu, że jest on opisany Kanał A lub Kanał B. Elektrycznie te przewody są dokładnie takie same, a oznaczniki są potrzebne aby identyfikować, do kabla którego kanału podłączamy elektrody.
 - W związku z tym możemy mieć w aparacie 2 kable kanału A lub 2 kable kanału B, ale wtedy w celu identyfikacji będziemy musieli sprawdzać, do którego gniazda jest włączony kabel.
 - Aparat nie sprawdza czy kabel pacjenta jest podłączony do gniazda - nie identyfikuje obecności kabla. Przewody użyte w kablu pacjenta mają część przewodzącą wykonaną z dużej liczby, cienkich drucików, a część izolacyjną z dwóch warstw PVC. Dzięki temu są one bardzo giętkie i trwałe.
 - Przewód jest zakończony wtykiem bananowym 4 mm.

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Widok 360

Galeria produktów:

