

Złącze typu DOOR

11,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 23%

Odniesienie: A-AL-AST-ZLDOOR

Złącze jest stosowane w aparatach do laseroterapii



Opis produktu:

Złącze typu DOOR

Złącze jest stosowane w aparatach do laseroterapii. Jest ono podłączane do właściwego gniazda znajdującego się na tylnej lub bocznej ścianie aparatu do laseroterapii. Element tego typu jest dwustykowym złączem o właściwych wymiarach mechanicznych.

Złącze typu DOOR dostarczane jest ze zwartymi stykami. Jest ono w ten sposób przygotowane do użycia wg sposobu 1 opisanego poniżej.

Firma Astar dysponuje trzema kształtami **wtyku DOOR** i to od nas zależne jest który zostanie wysłany do klienta.

Dwa sposoby użycia złącza typu door

1. Jako klucz do lasera - po zakończeniu użytkowania urządzenia, fizjoterapeuta wyjmuje złącze typu door z aparatu nie da się używać.
2. Jako część instalacji będącej fizycznym zabezpieczeniem przed wejściem do pomieszczenia gdzie odbywają się zabiegi laseroterapii. W celu podłączenia wyłącznika drzwiowego należy rozlutować połączenie w środku złącza i w to miejsce przylutować dwa przewody prowadzące do wyłącznika drzwiowego.

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Widok 360

Galeria produktów:

