

## Elektrody samoprzylepne (50x100mm) do elektrostymulatora Tens - 4 sztuki

36,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: H-AE-EVM-ELKF5x10



### Opis produktu:

- **Elektrody do elektrostymulatora Tens** o wymiarach 5 x 10 cm - 4 sztuki
- Są wykonane z wysokiej jakości żelu stymulującego, który poprzez właściwości nawilżające lepiej przewodzi oraz przekazuje prądy w głąb tkanek
- Cechują się długą żywotnością
- Po odklejeniu elektrody nie pozostaje żel na skórze

### Cechy produktu:

### Specyfikacja techniczna

### Wyposażenie

### Informacje dodatkowe

#### Informacje dodatkowe

Elektrody do elektrostymulatora należy delikatnie wyjąć z woreczka w którym zostały oryginalnie umieszczone, po czym podpiąć do nich odpowiednie przewody, następnie trzeba delikatnie zdjąć elektrodę z podkładki zabezpieczającej, na której się znajduje. Elektrody samoprzylepne odczepiamy nie ciągnąc za przewody, może wtedy dojść do uszkodzenia elektrod. Odczepione elektrody umieszczamy na oczyszczonej i suchej skórze, niepokrytej olejkami, kremami itp. zagwarantuje nam to dłuższą żywotność naszej elektrody oraz dobre przewodzenie w czasie zabiegu.

Elektrod nie należy stosować na ranach, czy podrażnieniach skórnych, może to spowodować komplikacje w gojeniu i zablokowaniu się rany. Pomiędzy zabiegami elektrody należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

#### Jak dbać o elektrody?

O elektrody należy dbać przede wszystkim stosując się do zasad postępowania z nimi, muszą być one odpowiednio aplikowane, oraz przechowywane. Suche, chłodne i ciemne miejsce to najlepsze warunki do utrzymania trwałości elektrod. Należy dodatkowo pamiętać, że po zastosowaniu elektrody przebywają na niej już bakterie i grzyby, dlatego też przechowywanie elektrod w oryginalnym opakowaniu jest jednym z bardziej skutecznych sposobów na zachowanie

ich trwałości.

## **Widok 360**

## **Galeria produktów:**

