



Lampa Bioptron MedAll z filtrem fulerenowym

6 257,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: H-UI-00006

Lampa do naświetleń Bioptron MedAll - najnowsza generacja - ma szeroki zakres zastosowań w leczeniu światłem, gwarantująca wygodną terapię.

Opis produktu:

Terapia światłem - Lampa Bioptron MedAll

Lampa Bioptron MedAll to skuteczne urządzenie stosowane w fizjoterapii. Nowoczesna technologia umożliwia generowanie strumienia światła polichromatycznego, które ma podobne właściwości do światła słonecznego. Naświetlanie lampą Bioptron MedAll jest jednak całkowicie bezpieczne, ponieważ emitowane światło nie posiada szkodliwych cech promieniowania ultrafioletowego. Dzięki prostej obsłudze i szerokiemu zastosowaniu znalazła swoje miejsce w dermatologii, kosmetologii czy reumatologii.

Jakie zalety ma Lampa Bioptron MedAll?

- Ergonomiczny kształt
- Niewielki rozmiar i niska waga
- Całkowicie bezpieczna w użyciu

Wskazania medyczne:

1. Reumatologia

- zapalenie kości i stawów,
- reumatoidalne zapalenie stawów,
- choroba zwyrodnieniowa stawów,

2. Fizjoterapia

- bóle krzyża, ramion i szyi,
- zespół cieśni nadgarstka,
- urazy układu mięśniowo-szkieletowego

3. Medycyna sportowa

- uszkodzenie tkanki miękkiej mięśni, ścięgien i więzadeł

4. Leczenie bólu i gojenie ran

5. Dermatologia

- atopowe zapalenia skóry,
- łuszczyca,
- opryszczka prosta i półpasiec,
- powierzchowne infekcje bakteryjne,
- trądzik młodzieńczy ,
- uszkodzenia błon śluzowych
- blizny

6.Sezonowe Zaburzenia Afektywne(SAD)

Lampe Bioptron MedAll można stosować z zestawem do koloroterapii. W zależności od rodzaju wykonywanego zabiegu do wykorzystania jest 7 kolorów o różnym działaniu. Dodatkowo w celu poprawy funkcjonalności użytkowania, warto rozważyć zakup statywu podłogowego umożliwiającego wygodne ustawienie lampy.

Terapia kolorami – zestaw do koloroterapii

- Zestaw do koloroterapii to dodatkowe wyposażenie **lampy Bioptron MedAll**. Wykorzystanie w światłolecznictwie kolorów prowadzi do stymulowania organizmu za pomocą barw.
- Koloroterapia czyli inaczej chromoterapia to metoda, która opiera się na koncepcji bioinformacji dla punktów uciskowych oraz stymulacji czakr. Dedykowany do lampy Bioptron MedAll zestaw zawiera 6 kolorowych filtrów oraz dodatkowy 1 filtr w kolorze indygo.
- **Lampa Bioptron MedAll** jest bezpieczna w użyciu a terapia z jej pomocą bardzo skuteczna, a jej celem jest uzyskanie równowagi w organizmie.
- Stosowanie zestawu do koloroterapii nie generuje kosztów użytkowania. Łatwość obsługi oraz przenośność sprawia, że urządzenie można bez problemu stosować zarówno w domu jak w gabinetach lekarskich.

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Masa własna 2,5 kg Średnica filtra ok. 5 cm Zasilanie 100-240 V~, 50/60 Hz Pobór prądu 0,29-0,12 A Moc źródła światła 20 W Maksymalny pobór mocy 56 W Klasa bezpieczeństwa Class II, IP 20 Waga bez statywu 0,5 kg Temperatura - podczas użycia +10°C to +30°C - podczas przechowywania 0°C to +40°C Długość fali 480 - 3400 nm Stopień polaryzacji >95% (590 - 1550 nm) Gęstość mocy śr. 40 mW/cm² Wydatek energetyczny na min. śr. 2.4 J/cm²

Wyposażenie

Wyposażenie opcjonalne

- Zestaw do koloroterapii
- Statyw

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Filtr fullerenny zawiera cząsteczki fulereny. Fuleren został odkryty w 1996 roku. Autorzy owego odkrycia otrzymali za nie nagrodę Nobla. Skraca czas naświetlania oraz sprzyja przyniesieniu lepszych efektów w krótszym czasie. Przyspiesza między innymi działanie:

- przeciwbólowe - szybko przywraca ulgę, bez skutków ubocznych

- przeciwwzapalne
- strukturyzuje wodę w organizmie (układa cząsteczki wody, która lepiej przenika i lepiej przewodzi)
- stymuluje KLATRYNY - białka w centralnym układzie nerwowym (stymuluje pamięć, koncentrację, sprawność intelektualną)
- odbudowa układu immunologicznego - mobilizuje organizm do walki z infekcjami, poprawia odporność
- pobudza i zwiększa syntezę kolagenu i elastyny
- gojenie i regeneracja ran
- (pourazowych, pooperacyjnych, cukrzycowych, miażdżycowych, owrzodzeń) BEZ BLIZN

Lampa Bioptron - instrukcja użytkowania

Tylko poprawne użytkowanie **lampy Bioptron MedAll** zapewnia skuteczną terapię. Jak stosować urządzenie?

- Oczyszczyć powierzchnię ciała przed zabiegiem
- Strumień światła skieruj pod kątem 90 stopni do leczonego obszaru
- Zachowaj odległość 10 cm
- Czas naświetlania powinien mieścić się w przedziale od 4 do 10 minut
- Nie przesuwaj wiązki światła podczas zabiegu

Terapia światłolecznicza z wykorzystaniem **lampy Bioptron MedAll** powinna być przygotowana indywidualnie do potrzeb pacjenta. W zależności od leczonej dolegliwości zarówno czas naświetlania jak i częstotliwość naświetlania są różne.

Więcej o światłolecznictwie znajdziesz na stronach:

- Światło spolaryzowane – lampa BIOPTRON
- Czym jest światłolecznictwo – rodzaje, zastosowanie, urządzenia
- Jakie są korzyści ze stosowania lampy sollux
- Promieniowanie ultrafioletowe UV- zastosowanie lampy kwarcowej
- Promieniowanie podczerwone IR – jak działa lampa sollux?

Tablica naświetlań lampą Bioptron (pobierz w pliku pdf) **RODZAJ SCHORZENIA MIEJSCE NAŚWIETLANIA CZAS MINIMALNY DZIENNE MINIMUM**

Afty Miejsce występowania bólu 6 min 3 razy 10-20 dni Alergie Objawowo, splot słoneczny, grasicca 6 min 2 razy Do skutku Astma Splot słoneczny, grasicca 8 min 2-3 razy Do skutku Bielactwo Bezpośrednio z odl. 5 cm 6 min 3 razy Do skutku Bóle gardła Gardło wewnętrzne, nasada nosa 8 min 2 razy 3 dni Bóle głowy W miejscu bólu, tył głowy 12 min 3 razy 10 dni Bóle wątroby Miejsce bolące + receptory 8 min 3 razy 20 dni Ból zębów Miejsce występowania bólu 8 min Do skutku Bóle żołądka Miejsce bolące + receptory 16 min 2 razy 20 dni Cellulitis Miejsce występowania + Oxy Spray 6 min 3 razy 20 dni Choroba Alzheimera Splot słoneczny + receptory mózgu 10 min 2 razy 60 dni Chrypka Tchawica, receptory + Oxy Spray do gardła 8 min 2-3 razy 10-20 dni Cukrzyca Trzustka, receptory trzustki 12 min 2-3 razy 20-60 dni Depresje Splot słoneczny, grasicca, twarz 6 min 3 razy wg potrzeb Dolegliwości menstruacyjne Środek podbrzusza 16 min 2-4 razy Do skutku Dolegliwości pozawałowe Splot słoneczny, grasicca, łuk strzelca 8 min 2 razy 20 dni Dyskopatie Punktowo, kręgosłup na całej długości 6 min 2-3 razy Do skutku Egzema Punktowo + Oxy Spray 8 min 3 razy 10-30 dni Gronkowiec Migdały, receptory + Oxy Spray doustnie 10 min 3 razy Do skutku Grzybica Punktowo + Oxy Spray 6 min 3 razy Do skutku Halluxy Na miejsca występowania 8 min 2-3 razy Do skutku Hemoroidy Bezpośrednio na chore miejsca 12 min 3 razy 20 dni Jaskra Na zamknięte oczy, receptory 6 min 2-3 razy Do skutku Jęczmień Na zamknięte oczy, receptory 6 min 2-3 razy Do skutku Kamica nerkowa Nerki 16 min 3 razy Do skutku Kamica woreczka żółciowego Bezpośrednio na bolące miejsca 12 min 3 razy Do skutku Kaszel Tchawica, receptory + Oxy Spray 8 min 3 razy 10 dni Katar Katar 8 min 3 razy 7 dni Katar sienny Splot słoneczny, grasicca, krtań, zatoki szczękowe, nasada nosa 6 min 2 razy Okres pylenia Krótkowzroczność Na zamknięte oczy, receptory 6 min 2 razy Do skutku Krwiaki Chore miejsca 12 min 3 razy 10 dni Łuszczyca Chore miejsca + Oxy Spray 6 min 3 razy Do skutku Łysienie plackowate Objawowo + Oxy Spray, splot słoneczny 6 min 3 razy Do skutku Martwice Miejsca objawów + Oxy Spray 6 min 3 razy Do skutku Miażdżyca Miejsca bólu, receptory układu krążenia 10 min 2 razy Do skutku Migrena W miejscu bólu, tył głowy 12 min 3-5 razy Do skutku Nadciśnienie tętnicze Receptor za lewym uchem, serce 6 min Rano Do skutku Naderwania ścięgien Miejsce występowania bólu 12 min 2 razy Do skutku Nerczyca Nerki, pęcherz moczowy, receptory 16 min 3 razy Do skutku Neuralgie Punktowo, kręgosłup na całej długości 6 min 3 razy Do skutku Niedowład mięśni Splot słoneczny, punktowo chore miejsca 16 min 3 razy Do skutku Odciski Bezpośrednio na miejsce występowania 8 min 3 razy Do skutku Odklejenie siatkówki Zamknięte oczy, receptory oczu 6 min 3 razy Do skutku Odleżyny Punktowo na chore miejsca + Oxy Spray 8 min 3 razy Do skutku Odmrożenia Punktowo na chore miejsca + Oxy Spray 8 min 3 razy Do skutku Odparzenia Punktowo na chore miejsca + Oxy Spray 6 min 3 razy Do skutku Odra Splot słoneczny, miejsca objawów + Oxy Spray 6 min 3 razy 10 dni Oparzenia Punktowo na chore miejsca + Oxy Spray 6 min 3 razy Do skutku Opryszczka Objawowo + Oxy Spray, splot słoneczny 6 min 2 razy 2 dni

Ospa Objawowo + Oxy Spray, splot słoneczny 6 min 3 razy Do skutku Osteoporoza Punktowo na miejsca dolegliwości 12 min 3 razy Do skutku Ostrogi Bezpośrednio na miejsce występowania 8 min 8 min Do skutku Owrzodzenia żylakowate Punktowo na chore miejsca + Oxy Spray 6 min 3 razy Do skutku Paradontoza Punktowo na chore miejsca + Oxy Spray 8 min 3 razy Do skutku Paraliż Punktowo na chore miejsca + Oxy Spray 10 min 3 razy Do skutku Plamy starcze Punktowo w miejscach występowania 6 min 3 razy Do skutku Półpasiec Objawowo + Oxy Spray, splot słoneczny 8 min 3 razy Do skutku Prostata Punktowo na chore miejsca, receptory 16 min 3 razy Do skutku Przebarwienia skóry Punktowo na chore miejsca + Oxy Spray 6 min 3 razy Do skutku Przeszczepy Punktowo na chore miejsca + Oxy Spray 6 min 3 razy 15 dni Przeziębienia Splot słoneczny, grasicca, nasada nosa 8 min 3 razy Do skutku Rany oka Zamknięte oczy, receptory oczu 6 min 3 razy Do skutku Rany wszelkiego typu Punktowo oraz wokół rany 6 min 3 razy 10 dni Rewitalizacja Splot słoneczny, grasicca, twarz 6 min 3 razy wg potrzeb Rozstępy Punktowo na chore miejsca + Oxy Spray 6 min 3 razy Do skutku Rumień Punktowo na chore miejsca + Oxy Spray 6 min 2 razy 10 dni Schorzenia reumatyczne Splot słoneczny, punktowo na chore miejsca 12 min 3 razy Do skutku Sińce Chore miejsca + Oxy Spray 8 min 2 razy 14 dni Skręcenia Chore miejsca 8 min 3 razy 14-30 dni Skurcze mięśni Bezpośrednio na miejsce występowania 8 min 3 razy Do skutku Stany zapalne oka Objawowo + Oxy Spray, splot słoneczny 6 min 3 razy Do skutku Stany zapalne Objawowo + Oxy Spray, splot słoneczny 8 min 3 razy 10-30 dni Stany zapalne dziąseł Miejsce występowania bólu 6 min 2 razy 14 dni Stłuczenia Miejsce występowania bólu 8 min 2 razy 14 dni Stwardnienie skóry Bezpośrednio na miejsca występowania 6 min 3 razy Do skutku Stwardnienie rozsiane Splot słoneczny, punktowo chore miejsca 8 min 3 razy Do skutku Szum w uszach Bezpośrednio do ucha, receptory uszu 8 min 2 razy Do skutku Trądzik Punktowo na chore miejsca + Oxy Spray 6 min 3 razy Do skutku Wrzody dwunastnicy Miejsca występowania bólu, receptory 16 min 3 razy Do skutku Wrzody żołądka Miejsca występowania bólu, receptory 16 min 3 razy Do skutku Wysypki Punktowo na chore miejsca + Oxy Spray 6 min 3 razy 7 dni Zaćma Zamknięte oczy, receptory oczu 6 min 3 razy Do skutku Zakrzepowe zapalenie żył Punktowo na chore miejsca 6 min 3 razy 30 dni Zapalenia korzonków Punktowo na chore miejsca, receptory 8 min 3 razy 14 dni Zapalenie migdałków Punktowo na chore miejsca, receptory 8 min 3 razy 7-14 dni Zapalenie oskrzeli Splot słoneczny, drzewka oskrzeli, receptory 8 min 3 razy 7-14 dni Zapalenie ucha Bezpośrednio do ucha, receptory uszu 8 min 3 razy 7-14 dni Zapalenie zatok Splot słoneczny, zatoki 8 min 3 razy 7-14 dni Zespoły bólowo korzeniowe Punktowo na chore miejsca 16 min 2 razy Do skutku Złamania Dwa miejsca – przed i za gipsem 8 min 3 razy 14 dni Zmarszczki Twarz + Oxy Spray 8 min 2 razy Do skutku Zwichnięcia Punktowo na chore miejsca + Oxy Spray 16 min 3 razy 7-14 dni Zwyródnienia stawów Punktowo na chore miejsca + Oxy Spray 16 min 3 razy Do skutku Żylaki Punktowo na miejsca występowania 6 min 3 razy Do skutku

Widok 360

GPSR

Producent: Zepter

Adres: ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa, Polska

Email: info@zepter.com.pl

Telefon: +48(22) 230 99 40

Informacje o bezpieczeństwie

Galeria produktów:

