

## DILA nakładka skupiająca

4 500,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: A-AL-AST-DILA

Nakładka skupiająca DILA do aparatów Polaris HP S oraz M



### Opis produktu:

#### Przystawka skupiająca DILA

**Nakładka aplikacyjna skupiająca DILA** (Deep Intratissue Laser Adapter). Jest to układ optyczny, pozwalający na uformowanie wiązki laserowej tak, aby kompensować straty mocy w tkankach powierzchniowych, powodując ograniczenie efektu termicznego w skórze i tkance podskórnej.

**Nakładki DILA** używamy do efektywnej i precyzyjnej terapii tkanek głęboko położonych. Np. głębokie zmiany śródmięśniowe, głęboko położone blizny lub punkty spustowe. Można ją także stosować do naświetlania dużych powierzchni.

Przy większym doświadczeniu terapeuty, w związku z tym że skupienie wiązki występuje w odległości ok. 5 cm od soczewki można ją stosować do każdego zabiegu odpowiednio dystansując nakładkę od powierzchni skóry, a także u pacjentów o dużej masie mięśniowej czy grubszej warstwie tkanki tłuszczowej.

**Nakładkę DILA należy stosować w kontakcie ze skórą lub w odległości nie większej niż 3 cm gdyż łatwo może dojść do poparzenia tkanek powierzchniowych.**

*Eksperyment wykonany w wyizolowanym środowisku (woda).  
Widać wyraźnie punkt skupienia wiązki lasera.*

### Cechy produktu:

#### Specyfikacja techniczna

#### Wyposażenie

## Informacje dodatkowe

### Informacje dodatkowe

---

Oto różnice w temperaturze tkanek, jakie wykazało doświadczenie z kamerą termowizyjną dla zastosowania nakładki 5 cm (lewa strona) oraz nakładki DILA (prawa strona).

Porównanie na wykresie 3D. Nakładka 5 cm (lewa strona), nakładka DILA (prawa strona)

## Widok 360

### Galeria produktów:

