

Filtr czerwony do lampy sollux

250,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 23%

Odniesienie: A-AO-AST-FILTR_CE



Opis produktu:

Filtr czerwony do lampy sollux

Filtr przeznaczony jest do stosowania we współpracy z lampą Lumina produkcji Astar (wersja niższa niż 5.0). **Filtr do lampy sollux** stosuje się w lampie terapeutycznej sollux w celu uzyskania promieniowania o określonej charakterystyce. Elementem wpływającym na charakterystykę w filtrze jest barwne szkło, posiadające właściwości odpowiednie do warunków pracy. Wykonywane jest w taki sposób, aby zlikwidować naprężenia wewnętrzne, co pozwala uzyskać zwiększoną odporność na pękanie w wyniku lokalnego nagrzewania do wysokich temperatur.

Filtr czerwony sollux - zastosowanie

- rozluźnienia mięśni, przed masażem lub planowanymi ćwiczeniami rehabilitacyjnymi,
- łagodzenia przewlekłych stanów zapalnych,
- przyspieszenia gojenia trudno gojących się ran,
- leczenia odczynów skóry po terapii promieniowaniem rentgenowskim,
- łagodzenia stanów po przedawkowaniu UV i diatermii,
- leczenia niektórych zmian skórnych

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

1. Umieszczamy **filtr czerwony do lampy sollux** w szczelinie tubusu. Trzymając za rączkę przekreślamy do lewej lub prawej krawędzi.
2. Ustawiamy odpowiednią odległość lampy od pacjenta, w razie potrzeby zakładamy okulary ochronne i włączamy lampę.

3. Przeprowadzamy zabieg.
4. Po zabiegu pozostawiamy **filtr do lampy sollux** w środku w celu wychłodzenia.
5. Gdyby zaistniała potrzeba wymiany filtra bezpośrednio po zakończeniu zabiegu, należy pamiętać aby odłożyć go na płaską, odporną na ciepło i izolującą powierzchnię.

Gdybyśmy odłożyli **filtr czerwony do lampy sollux** np. na chłodny parapet okienny, moglibyśmy doprowadzić do pęknięcia szkła w filtrze. Dzieje się tak, gdyż w gorącym szkłe pojawią się naprężenia w kontakcie z zimnym podłożem.

Widok 360

Galeria produktów:

