

## Filtr czerwony do lampy sollux

250,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 23%

Odniesienie: A-AO-AST-FILTR\_CE



### Opis produktu:

#### Filtr czerwony do lampy sollux

Filtr przeznaczony jest do stosowania we współpracy z lampą Lumina produkcji Astar (wersja niższa niż 5.0). **Filtr do lampy sollux** stosuje się w lampie terapeutycznej sollux w celu uzyskania promieniowania o określonej charakterystyce. Elementem wpływającym na charakterystykę w filtrze jest barwne szkło, posiadające właściwości odpowiednie do warunków pracy. Wykonywane jest w taki sposób, aby zlikwidować naprężenia wewnętrzne, co pozwala uzyskać zwiększoną odporność na pękanie w wyniku lokalnego nagrzewania do wysokich temperatur.

#### Filtr czerwony sollux - zastosowanie

- rozluźnienia mięśni, przed masażem lub planowanymi ćwiczeniami rehabilitacyjnymi,
- łagodzenia przewlekłych stanów zapalnych,
- przyspieszenia gojenia trudno gojących się ran,
- leczenia odczynów skóry po terapii promieniowaniem rentgenowskim,
- łagodzenia stanów po przedawkowaniu UV i diatermii,
- leczenia niektórych zmian skórnych

### Cechy produktu:

#### Specyfikacja techniczna

#### Wyposażenie

#### Informacje dodatkowe

##### Informacje dodatkowe

1. Umieszczamy **filtr czerwony do lampy sollux** w szczeliny tubusu. Trzymając za rączkę przekręcamy do lewej lub prawej krawędzi.
2. Ustawiamy odpowiednią odległość lampy od pacjenta, w razie potrzeby zakładamy okulary ochronne i

- włączamy lampę.
- Przeprowadzamy zabieg.
  - Po zabiegu pozostawiamy **filtr do lampy sollux** w środku w celu wychłodzenia.
  - Gdyby zaistniała potrzeba wymiany filtra bezpośrednio po zakończeniu zabiegu, należy pamiętać aby odłożyć go na płaską, odporną na ciepło i izolującą powierzchnię.

Gdybyśmy odłożyli **filtr czerwony do lampy sollux** np. na chłodny parapet okienny, moglibyśmy doprowadzić do pęknięcia szkła w filtrze. Dzieje się tak, gdyż w gorącym szkłe pojawiają się naprężenia w kontakcie z zimnym podłożem.

## Widok 360

## GPSR

Producent: ASTAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres: ul. Świt 33, 43-382 Bielsko-Biała, Polska

Email: [astarmed@astar.eu](mailto:astarmed@astar.eu)

Telefon: 33 829 24 40

**Informacje o bezpieczeństwie: Filtr stanowi opcjonalne wyposażenie pomocnicze lampy do naświetleń światłem podczerwonym typu sollux. Obowiązują dla niego ostrzeżenia i informacje na temat bezpieczeństwa jak dla odpowiedniego sterownika.**

## Galeria produktów:

