

Filtr niebieski do lampy sollux

250,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 23%

Odniesienie: A-AO-AST-FILTR_NB



Opis produktu:

Filtr niebieski do lampy sollux

Filtr przeznaczony jest do stosowania we współpracy z lampą Lumina produkcji Astar (wersja niższa, niż 5.0). **Filtr niebieski sollux** wykorzystuje się w lampach terapeutycznych w celu uzyskania promieniowania o określonej charakterystyce. Elementem wpływającym na charakterystykę w filtrze jest barwne szkło, posiadające własności odpowiednie do warunków pracy. Wykonywane jest w taki sposób, aby zlikwidować naprężenia wewnętrzne, co pozwala uzyskać zwiększoną odporność na pękanie w wyniku lokalnego nagrzewania do wysokich temperatur.

Filtr niebieski sollux - zastosowanie

- Leczenia przeczulic i nerwobóli
- Łagodzenia bólów mięśniowych
- Wywołania działania uspokajającego
- Uzyskania efektu przeciwzapalnego
- Leczenia niektórych zmian skórnych
- Łagodzenia podrażnień po złuszczeniu naskórka

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

1. Umieszczamy filtr niebieski do lampy sollux w szczelinie tubusu. Trzymając za rączkę przekreślamy do lewej lub prawej krawędzi.
2. Ustawiamy odpowiednią odległość lampy od pacjenta, w razie potrzeby zakładamy okulary ochronne i włączamy lampę.

3. Przeprowadzamy zabieg.
4. Po zabiegu pozostawiamy filtr do lampy sollux w środku w celu wychłodzenia.
5. Gdyby zaistniała potrzeba wymiany filtra bezpośrednio po zakończeniu zabiegu, należy pamiętać aby odłożyć go na płaską, odporną na ciepło i izolującą powierzchnię.

Gdybyśmy odłożyli filtr niebieski do lampy sollux np. na chłodny parapet okienny, moglibyśmy doprowadzić do pęknięcia szkła w filtrze. Dzieje się tak, gdyż w gorącym szkłe pojawiają się naprężania w kontakcie z zimnym podłożem.

Widok 360

GPSR

Producent: ASTAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres: ul. Świt 33, 43-382 Bielsko-Biała, Polska

Email: astarmed@astar.eu

Telefon: 33 829 24 40

Informacje o bezpieczeństwie: Filtr stanowi opcjonalne wyposażenie pomocnicze lampy do naświetleń światłem podczerwonym typu sollux. Obowiązują dla niego ostrzeżenia i informacje na temat bezpieczeństwa jak dla odpowiedniego sterownika.

Galeria produktów:

