

Zamów na: serwisastar.pl



Zestaw naprawczy do fali uderzeniowej
(Impactis M/M+)

1 600,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 23%

Odniesienie: A-AF-AST-IMMREG

Zestaw naprawczy do fali uderzeniowej Impactis M / M+

Opis produktu:

Zamówienie zestawu naprawczego do fali Impactis M/M+ możliwe jedynie poprzez formularz: serwisastar.pl

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne

Producent Astar Deklarowana trwałość 2 miliony uderzeń Wymiary 20 mm/186mm (średnica/długość) Waga 265 g
Przeznaczenie do Impactis M i Impactis M+

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Wymiana zestawu balistycznego

W momencie potrzeby wymiany zestawu na wyświetlaczu fali uderzeniowej pojawi się komunikat:

Dla Impactisa M:
na przemian z:
Dla Impactisa M+:

Natomiast po przekroczeniu 2.000.000 na wyświetlaczu widzimy następujące komunikaty:

Dla Impactisa M:

Natomiast dla Impactisa M+ ekran wygląda następująco:

Zestaw do fali uderzeniowej

Należy pamiętać o tym aby **zestaw naprawczy do fali uderzeniowej** wymienić w limicie uderzeń, gdyż co prawda **zestaw do fali uderzeniowej** może nadal pracować, ale nie ma gwarantowanego poziomu transmisji energii do tkanki, a ponadto w miarę zużywania się elementów zestawu, w rurce, w której porusza się pocisk pojawiają się drobne opiłki. Opiłki te mogą doprowadzić do lawinowego pogorszenia stanu toru balistycznego, ale nie to jest problemem, gdyż w krótkim czasie zestaw i tak zostanie wymieniony kiedy pocisk przestanie pracować. Problemem może okazać się natomiast to, że opiłki dostaną się do niewymiennej części pistoletu i uszkodzą zawór. Taka awaria wiąże się z dużo wyższymi kosztami niż wymiana zestawu. Awaria pistoletu podlega bezpłatnej naprawie w okresie gdy urządzenie znajduje się na gwarancji, jednak pod warunkiem, że zestawy były wymieniane zgodnie z zaleceniami.

- Po wymianie **zestawu do fali** należy pamiętać o skasowaniu licznika uderzeń w trybie ustawień.
- Aparat nie wykrywa samodzielnie wymiany **zestawu naprawczego** i musimy to zrobić ręcznie.

Skasowanie licznika po wymianie zestawu regeneracyjnego powinno odbyć się w kilku krokach:

Dla Impactisa M na ekranie startowym klikamy kluczyk:

Pojawi się ekran ze statystykami:

Resetujemy licznik przy ikonke pistoletu:

Dla Impactisa M+ w menu Setup mamy:

I dalej:

Ostatecznie potwierdzamy:

Więcej ciekawostek oraz informacji o metodach fizykalnych czy też studiach przypadku, znajdziesz w serwisie fizjotechnologia.com:

- **Co to jest fala uderzeniowa?**
- **Rodzaje fali uderzeniowej.**
- **Fala uderzeniowa** - wskazania i korzyści.
- **Fala uderzeniowa** - przeciwwskazania, ograniczenia, skutki uboczne.
- **Metodyka zabiegu falą uderzeniową.**
- Porównanie radialnej i zogniskowanej fali uderzeniowej.
- Porównanie fali uderzeniowej kompresorowej i napędzanej elektromagnetycznie
- **Fala uderzeniowa** - ostroga piętowa.
- Leczenie zaburzeń erekcji falą uderzeniową.
- **Fala uderzeniowa** - cellulit
- **Aparat do fali uderzeniowej** - zabiegi

Widok 360

Galeria produktów:

