

Transmitter tytanowy (20mm)

1 200,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%



Odniesienie: A-AF-AST-TR20SET-TI

Transmitter tytanowy 20 mm przeznaczony do medycyny sportowej (Impactis M/M+)

Opis produktu:

Transmitter tytanowy 20 mm

- W zestawie dodatkowe elastyczne zawieszenie transmitera i oring.
- **Transmitter fali uderzeniowej** jest elementem przekazującym energię z zestawu balistycznego do ciała pacjenta.
- **Transmitter** ma przewidywaną trwałość 2 mln uderzeń. W aparacie Impactis M nie było możliwości śledzenia ilości wykonanych uderzeń na aktualnie zamontowanym w pistolecie **transmitterze**. W Impactisie M+ istnieje taka możliwość. Użytkownik może przypisywać wykonywany zabieg do **transmitera**. W ten sposób liczniki w aparacie podają aktualną ilość strzałów wykonanych na transmitterach.

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne

Producent ASTAR Średnica transmitera 20 mm Średnica zestawu 30 mm Długość zestawu 40 mm Kształt transmitera wypukły o promieniu 40 mm Masa zestawu 42 g Gwint mocujący do pistoletu M22 x 1 Materiał tytan i POM-H
Przeznaczenie Impactis M i Impactis M+ Zastosowanie Duże obszary, terapia sportowców Trwałość 2 mln uderzeń

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

O czym należy pamiętać w przypadku użytkowania fali uderzeniowej

1. Coroczne przeglądy urządzenia w autoryzowanym serwisie
2. Regularna wymiana zestawów naprawczych po przekroczeniu 2 mln strzałów

3. Wymiana transmiterów po przekroczeniu limitu 2 mln uderzeń

Kiedy transmitter jest zużyty

W miarę użytkowania transmitera, w miejscu uderzania naboju pojawia się krater (zagłębienie), które sukcesywnie się pogłębia. Gdy transmitter do medycyny sportowej się zużywa to oddala się powierzchnia, w którą uderza nabój. Krater o zbyt dużej głębokości doprowadzi do zablokowania naboju w lufie gdyż nabój porusza się w przewidzianym przez producenta zakresie. Zakres przemieszczania się naboju jest ograniczony aby zabezpieczyć nabój przed wystrzeleniem z lufy gdy ktoś uruchomiłby urządzenie bez przykręconego transmitera.

Kiedy brak wymiany transmitera może stać się kłopotem dla użytkownika

Gdy użytkownik zaniedba wymianę transmitera i w wyniku użytkowania przekraczającego 2 mln uderzeń dojdzie do uszkodzenia pistoletu i/lub zestawu balistycznego może to narazić użytkownika na kosztowną naprawę urządzenia nieobjętą gwarancją.

Kiedy transmitter jest objęty świadczeniem gwarancyjnym

Jeżeli transmitter do fali uderzeniowej nie przekroczył 2 mln uderzeń i uległ uszkodzeniu to w takim przypadku zostaje wymieniony w ramach świadczenia gwarancyjnego.

Widok 360

Galeria produktów:

