

Wkładka wiskozowa 60 mm x 2

Oferta z dnia: 2021-01-16



Wkładka wiskozowa 60 mm do ssawki 60 mm do aparatu Avaco

Podkład wiskozowy do **ssawki o średnicy 60 mm** do aparatu do terapii podciśnieniowej. **Podkłady do ssawek** są stosowane w tym samym celu co wkładki wiskozowe przy elektrodach silikonowo-węglowych, w elektroterapii. Woda, którą nawilżony jest **podkład wiskozowy**, przewodzi prąd i w efekcie cała powierzchnia wkładki wiskozowej staje się elektrodą. Poprawa przylegania elektrody do ciała pacjenta.

Kiedy wymieniamy wkładki?

Wszystko zależy od tego jak często wkładki były stosowane, nie ma określonej ilości zabiegów po których należy się wkładek pozbyć i zastąpić je nowymi. Wymiana wkładek jest zalecana gdy te się już zużyją, jak są postrzępione, lub przełamane.

Jak dbać o pokrowce wiskozowe?

Materiał, z którego jest wykonany pokrowiec do elektrod, umożliwia jego wielokrotne użycie. Pokrowiec wiskozowy po każdym zabiegu powinien być dokładnie wypłukany w czystej wodzie. Jeżeli zachodzi potrzeba usunięcia osadów wapiennych, można dodać odrobinę octu. Wówczas należy ponownie wypłukać podkład wiskozowy w czystej wodzie.

Wkładka wiskozowa może być dezynfekowana 70% roztworem spirytusu. Można także stosować gotowe środki do szybkiej dezynfekcji stanowiące mieszaninę alkoholu etylowego i izopropylowego. Sposobem na zapewnienie najwyższego poziomu higieny jest przeznaczenie jednego zestawu pokrowców wiskozowych dla jednego pacjenta.

Zobacz jeszcze:

- [Ssawki 90 mm](#)
- [Wkładka wiskozowa 90 mm](#)